

浴室内での立ち座りや移動をサポートします

いたわりお風呂ですり

- 浴室への出入り
- 洗い場での立ち座りや移動
- 浴槽での立ち座りや身体の保持、出入り…等
使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け
位置を選択できます。

■材 質：抗菌AES樹脂 ■色：ホワイト
■サイズ：外径寸法 32mm
長 さ 450mm



取 扱 い 説 明

ご使用前に必ず読み、たいせつに保管してください。

警告

本説明書記載以外での使用（改造など）は安全性が保証できません。その際に発生した事故については一切責任を負いかねます。

ご使用上の注意

- 浴槽（バスタブ内）には絶対取り付けないでください。
- この手すりの取り付け位置は、お使いになる方に適した高さに調節して取り付けてください。
- この製品の制限荷重は100Kgです。（体重が100Kg以下の方でも乗ったりぶら下がるなどの行為をすると一時的に荷重が100Kgを超える恐れがありますので絶対にしないでください。）
- 永くお使いいただくために、必ず正しい取り付け方法によって取り付けてください。
- 取り付け後も時々、ネジ・ビス等のゆるみを点検（しめ直す）し、安全をご確認ください。
- 柱や壁等に確実に固定してください。
- 取り付け部の水もれにご注意ください。
- 直射日光に当たると製品の劣化が早まります。
- 塩素系洗剤による殺菌・消毒はお避けください。製品の劣化が早まります。


取り付け方法

■ネジのきく所（壁に木の下地がある所）に取り付ける場合
※安全のために、必ずネジのきく場所を選んで取り付けてください。

下地の桟をさがしてネジ止めをしてください


下地の桟を探す

桟の探し方は壁をたたくとわかりますが、分かりにくい時は図1のように針状の道具などで手応えのあるところを探してください。

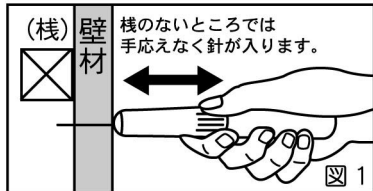

ネジ止めをする（図2）


手すりのカバーを外して、探した桟の所で、取り付けの位置を決め、キリや干枚通しなどで軽く穴（直径3mm、深さ20mm以下）を開け、正確な位置が決まればネジでしっかりと締め付けた後、カバーを付けてください。ネジを必要以上に締め付けると故障や破損の原因になりますのでご注意ください。

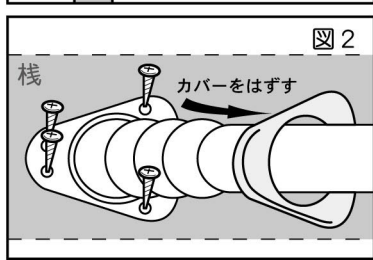

※取り付け後のカバーのはずし方


壁にキズをつけないよう、マイナスドライバーで外してください。（カバーは割れにくく、やわらかい樹脂で出来ていますが、作業は十分にご注意ください。）

図3のように柱・間柱のあるところにネジでしっかりと取り付けてください。

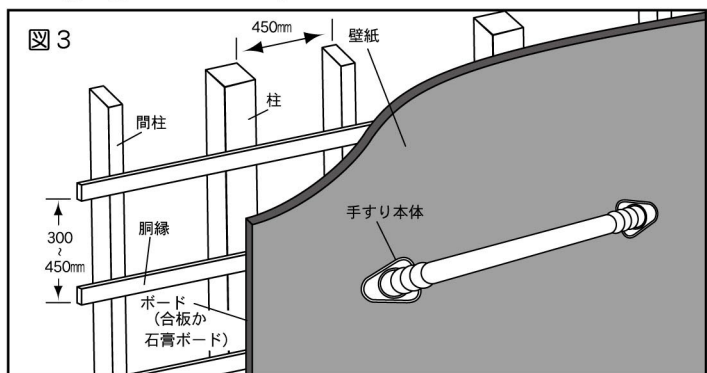

※長さ調節（短く）をする場合


ブラケット裏側のネジをゆるめ、手すり棒を外して適当な長さのこぎり等でカットした後差し込み、ブラケット裏側のネジは手すり棒がから廻りしないよう、しっかりと締め付けてください。

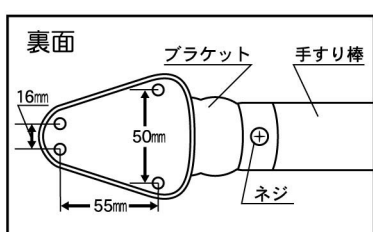

■タイル・コンクリート面に取り付ける場合



ドリルで下穴をあける

タイルに下穴をあける場合は、ドリルの刃がすべりやすいので、セロテープを貼ると便利です。また、ドリルはタイル用の刃を使用し、低速回転であけてください。（使用ドリル刃先径6.0mm）

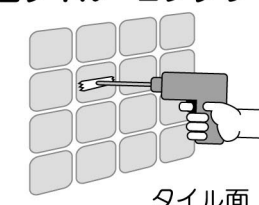

プラグを下穴に入れる（直径6mm/深さ25mm）

堅い場合は、ハンマー等で軽く打ち込んでください。

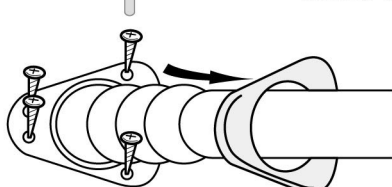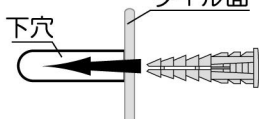

お風呂ですりのカバーを外してネジで締めつけて固定した後カバーを付けてください

※ユニットバスへの取り付けは、専門家に必ずご相談ください。

部品入数	品質表示
手すり本体	1本 抗菌AES樹脂
タッピングネジ	8本 ステンレス(SUS 304) 4×30
プラグ	8本 プラスチック(高密度ポリエチレン) 6×25

ネジ・プラグは、ブラケット内部に入っております。



※注：介護保険の住宅改修について

介護保険による住宅改修を行うには、事前申請が必要です。事前に必ずケアマネージャー及び、介護保険施設等とご相談、または市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。

—— お買い上げありがとうございます。 ——

本製品の製造には万全を期しておりますが、湿度、温度変化等によって若干の寸法誤差（そり、曲がりを含む）が発生する場合がございます。万一取り付け時に、不都合がございましたら、至急下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

発売元 **SHIMIZU OMSORG DIV.**
TEL.06-6723-8537(代)
http://www.shimizu-net.co.jp

PAT.

製造元 **OGASAWARA. CO., LTD**