


ラムダライン 使い捨て式防じんマスク・N95マスク LINEシリーズ 装着方法

立体構造をしっかりキープ!

ラムダライン
LINE

ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープするマスクの愛称。

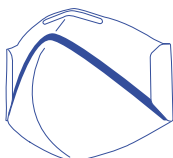

■構造

鼻当て
(内側クッション付)

アジャスター
(しめひも調節部)

しめひも
上側

しめひも
下側



1

鼻当て

マスク内側
マスクを広げて鼻当て(---囲み部分)を平らにします。

2

しめひも
下側

しめひも下側を首に掛けます。

3

しめひも
上側

しめひも上側をマスクの外側にします。
マスク両端を持ち、あごから口と鼻を覆います。

4

しめひも
上側

鼻当て

しめひも
下側

片手でマスクを押え、もう片方の手でしめひも上側を頭頂部に掛けます。

5

アジャスター

アジャスターを持ち、しめひもを引っ張り、長さを調節します。

6

上下のしめひもの張り具合を調節します。

7

鼻当て

鼻当てを両手の指で押えて、鼻に合わせます。

密着性の確認 (シールチェック ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器 (マスク内圧・フィッティングテスター等) を用いる (定量法) か、次の方法 (定性法) でご確認ください。

- マスク全体を両手で覆い、
- 陽圧法** 息を吐きます。
マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。
 - 陰圧法** すばやく息を吸います。
マスクと顔の間から空気が流入しなければ、密着性は良好です。(マスクが顔に吸い付く感じです。)
- ※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。



漏れがある場合 は、次を調節してください。

- マスクの位置
- 鼻当て
- しめひも