

ハクゾウファイナガードセット

日本製



AR

フレームに取り付ける際は、
保護フィルムを取り外し、
装着してください。

PET 0.125mm
(保護フィルム付き)

飛散物から顔全体を防護する
シールド交換式のフェイスガードです。

眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡・N95マスクなどの上からも装着できます。

採用
シールド

反射防止加工

防曇加工

フレーム1本 フェイスシールド5枚入



Design Your Voice

Hakuzo

透過率96%

※数値は代表値であり、保証値ではありません。

【反射の比較】着用者からの視線



シールドに表裏があります。
「HAKUZO」の文字が外側から
読めるように装着してください。

シールドが薄く軽量です。

防曇加工・反射防止加工がされているため、

長時間の使用や穿刺などの処置時に適しています。

パソコン・電子カルテの使用時の映り込みや目の疲れを低減します。

取り付け方法



QRコードから
ご確認頂けます。



シールドは使い捨てです。
アルコール等で清拭すると透明度や
防曇効果が劣化する可能性があります。

取り外し方法



シールドの内側から
穴近くを押し、
シールドを外します。
ゴミ箱の上で、
外側に触れず内側を
押し込むことで、
汚染部分に触れずに
取り外しできます。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3002800	セット ARタイプ	フレーム ブルー1本 シールド5枚	50箱	4 958286 717883

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320