

ラッシュ プラス

# RUSH+

ヘルスケア用

ヘルスケア用に特別にデザインされたアドバンスモデルで、職場の事故やウイルスの目への侵入を防ぐ。両面レンズに傷防止と曇り止めのコーティングがされており、長時間の着用も快適。

PLATINUM<sup>®</sup>



26 g



調整可能ノーズピース

RUSH+のカスタマイズ:

レンズマーキング、カラーテンプル等




- + PLATINUM<sup>®</sup> 傷防止、曇り止めコーティング(+P)
- + PCとラバー素材の一体成型のしなやかなテンプル
- + 調整可能ノーズピース
- + 水洗いできて再使用可

**bolle**  
SAFETY  
ボレー セイフティ

ラッシュ プラス

# RUSH+

ヘルスケア用

モデル名	レンズ	アイテム番号	規格	コーティング
<b>RUSH+</b> ラッシュプラス	 クリア	 PSSRUSPA07	JIS	プラチナ 



## テクノロジー

### PLATINUM

合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理<sup>※1</sup>でくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失すると言われております。弊社にて121°C 20分でテストした結果です。

パッケージとEAN13コード	
	<b>PSSRUSPA07</b>
個包装	3660740014728
ボックス (10個入り)	3660740114725
マスターカートン (120個入り)	3660740214722

## お手入れ・保管方法

**洗浄方法:** レンズ・つる等は、使用毎に清掃してください。お手入れにはB-CLEANシリーズのクリーニング製品の使用をお勧めします。

**メンテナンス:** レンズやフレームに傷やダメージがある場合は使用せずに、交換してください。使用後はマイクロファイバークロスに入れて保管することをお勧めします。

**保管方法:** 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

**消毒方法:** 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流してください。

マテリアル	
レンズ	PC-2.2MM - CURVE9
フレーム	-
テンプル	PC+TPR
スペアレンズ	なし

7/12/2021

## ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

**bolle**  
SAFETY  
ボレー セーフティ