

トライオンOTG

TRYON OTG

ヘルスケア用

ヘルスケア用に特別にデザインされたアドバンスモデル。眼鏡の上から着用可能で、職場の事故やウイルスの目への侵入を防ぐ。両面レンズに傷防止と曇り止めのコーティングがされており、長時間の着用も快適。

+PLATINUM®



41 g

- + 柔らかい上部のプロテクション (TPR)
- + +PLATINUM® 傷防止、曇り止めコーティング(+P)
- + 長さ調整可能テンプル
- + FLEX 160°のしなやかなテンプル
- + 水洗い・再使用可能

bollé
SAFETY
ボレー セイフティ

トライオンOTG

TRYON OTG

ヘルスケア用

モデル名	レンズ	アイテム番号	規格	コーティング
TRYON OTG トライオンOTG	 クリア	 PSOTRYO016	JIS	プラチナ 



お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃してください。お手入れにはB-CLEANシリーズのクリーニング製品の使用をお勧めします。

メンテナンス: レンズやフレームに傷やダメージがある場合は使用せずに、交換してください。使用後はマイクロファイバーポーチに入れて保管することをお勧めします。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流してください。

テクノロジー

PLATINUM

合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理^{※1}でくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失すると言われています。弊社にて121°C 20分でテストした結果です。

パッケージとEAN13コード	
	PSOTRYO016
個包装	3660740014735
ボックス (10個入り)	3660740114732
マスターカートン (120個入り)	3660740214739

マテリアル	
レンズ	PC-2.2mm - CURVE4
フレーム	-
テンプル	PC+TPR
レンズ上部プロテクション	TPR
スペアレンズ	なし

7/12/2021

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY
ボレー セーフティ