


新唾液採取キット

サライバクリア

Saliva Clear

唾液 約5分 自己採取

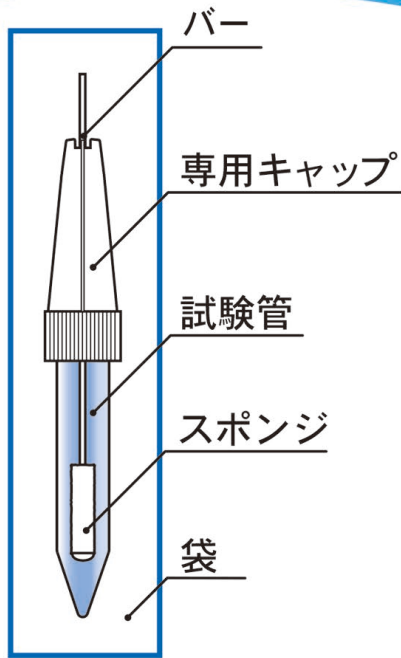

特徴

- あめ玉のように唾液分泌を刺激する
- 試験管へ直接採取できる
- 唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジです
- バーの先のスポンジをあめ玉を舐めるように採取する
 - └ マスクしたまま OK
 - └ 飛ばつしない
 - └ スポンジが柔らかくなれば採取 OK サイン
- バーを引っ張りスポンジを圧縮して採取する
 - └ 約 1ml 採取できる
 - └ バーが切断できコンパクトになる

操作手順

1 袋を開封しキャップを回して**取り外す**

注意!
採取部には絶対に手で触れないで下さい!

2 スポンジをあめ玉のように**舐める**

マスクをしたままでも **OK!**

3 スポンジが柔らかくなれば試験管にキャップを**戻して**しっかりと閉める

※しっかりとキャップをネジ止め

4 凹みが見えるまでバーを**引っ張り上げる**

この位置以上を取って下さい。

取れない場合はバーを戻して、②からやり直してください

図の位置まで取れた場合は⑤に進んでください

※スポンジが柔らかくならないと凹みまで引っ張る事ができません

約1ml

5 左右に曲げればバーが**折れる**

※機能上バーに検体は触れていません

提出