


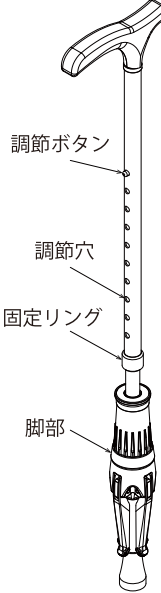


C R O S S P O D

クロスポッド 立てられるつえ



クロスポッドの Web サイト  
<https://crosspod.jp/#crosspod>

 注意	使い方
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 本つえは自立歩行可能な人が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。自立歩行できない状態での使用はお控えください。</li> <li>● 使用前には各部の点検をしてください。パイプや杖先ゴム等に異常がある場合は使用を中止してください。</li> <li>● 長さ調整部が固定されている（調節ボタンが調節穴から出て、固定リングが確実に閉まっている）ことを確認してください。</li> <li>● 本製品の自立用脚は杖を立てる為のもので、大きな重量には耐えられません。破損の恐れがありますので、脚を開いた状態で 4 点杖のように体重をかける等の使用は絶対にしないで下さい。</li> <li>● 濡れた路面等、滑りやすい状況での使用、又平坦でない路面での使用は、注意するか、ご使用をお控えください。</li> <li>● 先端ゴム（穴径 16mm）は消耗品です。摩耗、劣化したら交換してください。</li> </ul>	<p>&lt; つえ長さの目安 &gt;            （身長 ÷ 2） + （2 ～ 3cm）            例えば身長 160Cm の場合            （160cm ÷ 2） + （2cm） = 82cm            杖長は 82cm が目安となります。</p> <p>&lt; つえ長さの調節 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定リングを緩める。</li> <li>● 調節ボタンを押して適正な調節穴に合わせる。</li> <li>● 調節ボタンが調節穴から出ていることを確認したのち、固定リングを確実に締める。</li> </ul> <p>&lt; 杖を立てる際の - 脚の開閉 &gt;            裏面を参照してください。            （クロスポッドの Web サイト（上記）にも動画等で説明を用意しています）</p> 

## 保証書

本保証書をレシート、領収書等（販売店、購入日の記載のある書類）と一緒に保管ください

保証期間内に製造上の不備による欠陥、又は正常な使用状態での故障の際には無償修理・交換いたします。


### < 保証規定 >

- (1) 保証期間はご購入日より 12 ヶ月です。
- (2) 保証申請の際には、本保証書をレシート、領収書等（販売店、購入日の記載のある書類）と一緒に提出ください。
- (3) 次の場合は、保証対象外となります。
  - ・ 必要書類（本保証書、及び上記（2）に記載の証明書類）のご提示がない場合
  - ・ 誤まった使用、分解、改造による故障
  - ・ 日常的な摩耗、経年劣化による消耗
  - ・ 天変地異、事故、落下等、外的要因による故障



脚を開く


1

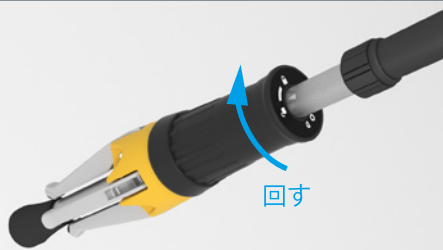

ロック解除

🔓 (ロック解除マーク) を ▼ マークに合わせます

2

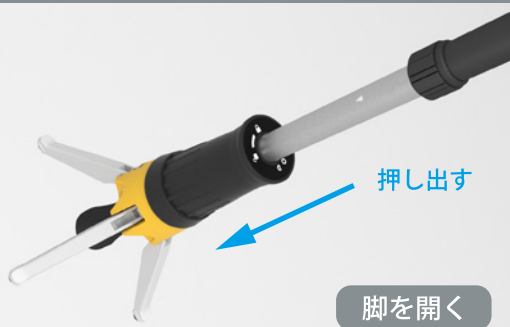


脚を開く

杖先方向に、カチッと音がするまで、押し出します  
(脚部がストップフックに引っかかり、自立できる状態になります)

脚を閉じる


1

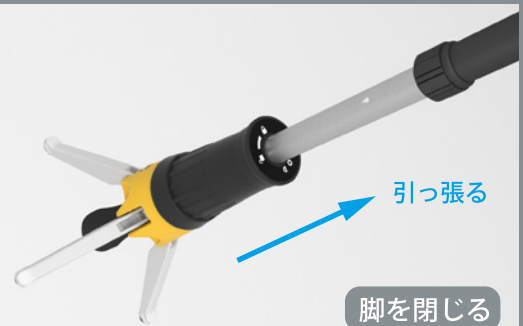

脚を閉じる

▼ マーク位置まで引っ張り、脚が閉じた状態を保持します

2

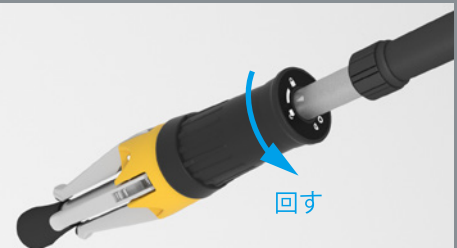

ロック

脚を閉じた状態で 🔒 (ロックマーク) を ▼ マークに合わせます



本製品の脚は、杖を立てるためのもので、大きな荷重には耐えられません。

破損防止機構は付いていますが、状態によっては破損の恐れがありますので、足を開いた状態で4点杖のように体重をかける等の使用はしないでください。



破損防止機構について

破損防止の為、脚に無理な力がかかるとストップフックが外れる構造になっています。外れた後、再び自立させるには、再度ストップフックに引っかかるまで、杖先方向に押し出して下さい。