

PROFECIO®

医療・介護用途でご使用される皆様へ

洗える リユース アイソレーションガウン 【PA7915HA】取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品は、医療、介護の現場において、感染（汚染）から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護することを目的としたガウンです。
ご使用前には、必ずこの取扱説明書を精読の上、使用期間中は大切に保管してください。
取扱説明書には当製品をご利用いただく際の大切な情報が記載されています。使用者に精読いただくため、この取扱説明書を当製品使用者以外が取り除いてはなりません。

洗える リユース アイソレーションガウン 【PA7915HA】取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前には、必ずこの取扱説明書を精読の上、使用期間中は大切に保管してください。
取扱説明書には当製品をご利用いただく際の大切な情報が記載されています。使用者に精読いただくため、この取扱説明書を当製品使用者以外が取り除いてはなりません。
製造元、販売店は本製品の使用によって感染や身体損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

安全上の注意

誤った取扱いをした場合に生じる人体への危害及び財物への損害の程度を説明しています。表示と意味をご理解の上、本書をお読みください。

- 危険** 製品の取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いことを示します。
- 警告** 製品の取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことが想定されることを示します。
- 注意** 製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的損害の発生が想定されることを示します。

■ 本製品の用途

医療、介護の現場において、感染（汚染）から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護することを目的としたガウンです。

■ 使用上の注意

- 危険** 本製品の用途以外に使用しないでください。密閉構造の防護服ではありません。従事される環境に応じた作業安全性を十分に確認した上で、使用者の責任においてご使用ください。AAMI PB70 レベル2相当の生地を使用していますが、本製品は全ての感染を防ぐものではありません。使用前に製品の損傷が無いか確認してください。異常が見つかった場合は使用せず廃棄してください。表面に傷、又はピンホール等が生じた場合には液体防衛性能が低下して危険です。また、縫い合わせ部は液体が浸透します。本製品の再使用は使用者の責任においてご判断ください。

- 警告** 可燃性の製品のため、火気及び高熱な場所での使用・保管はしないでください。本製品は火や熱に対する防護性能は有しません。火傷や引火の恐れがありますので、火気や高温の近く又は爆発の危険性があるところでは使用しないでください。ガウンに静電気が溜り、放電することがあります。爆発性、可燃性物質のあるところでは使用しないでください。

- 警告** 体調や健康状態に不安がある場合は着用しないでください。熱中症や熱ストレスによる体調不良を防ぐため、着用前・着用中に十分な水分補給をし、適切な頻度での休憩を行ってください。万が一体調に異変を感じた場合、直ちに作業を中止し安全な場所でガウンを脱いでください。

- 警告** 使用中は製品の損傷が無いか状態を適時確認し、異常が認められた場合には直ちに使用を中止し廃棄してください。

■ 使用方法

- 警告** ●着用前
着用前に製品の損傷が無いか確認してください。異常が見つかった場合は使用せず廃棄してください。着用前に手指衛生（手洗い、アルコール消毒剤の擦り込み）を行ってください。
●着用手順
袖を先に通し、次にボタン付き首紐を留めます。腰紐を右脇で結び、その後手袋を着用します。手首の露出が無いようにしてください。紐は他のものに引っ掛かり大変危険ですので絡まないように正しく調整してお使いください。
●脱衣手順
ボタン付き首紐を外し、腰紐をほどきます。汚染されたガウンの外側に触れないよう、内側をつまみながら脱衣します。汚染面を内側にしてたたみ、使用管理者（責任者）が指定した回収箱に入れます。脱衣後は手指衛生を行います。

- 注意** ボタン付き首紐、腰紐を無理に引っ張ると破損しますので注意してください。

■ 保守管理について

- 警告** 下記条件において保管してください。
 - ・紫外線を避けて保管してください。
 - ・直射日光、雨風を避けて保管してください。
 - ・高温多湿を避けて保管してください。
 - ・物理的な損傷が起きない場所に保管してください。繰り返し洗濯によりはっ水性が低下します。使用品の洗濯前には国及び自治体の指示に従った消毒処理をしてください。本製品は、高圧蒸気滅菌（121℃ 20分）、又は次亜塩素酸ナトリウムによる消毒（濃度0.05%、30分浸漬）、又は熱水消毒（80℃ 10分間）が可能です。熱水消毒の際に、製品を揉んだり、絞ったりしないでください。防水性能が低下します。洗濯機を使用する際は、紐の絡まりによる破損を防ぐため、必ずネットに入れて洗濯してください。金属や面ファスナー等の突起物があるものと一緒に洗濯しないで下さい。本製品は修理できません。また改造しないでください。本製品の再使用は使用者の責任においてご判断ください。

■ 廃棄について

- 警告** 使用後のガウンは国及び自治体の指示に従い廃棄してください。

お問い合わせ先
株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター
TEL 0120-307-560
受付時間 9:30~17:00（土・日・祝日及び、弊社指定休業日を除く）
〒150-8517
東京都渋谷区松涛2-20-6