

フレキタッチ電極2（クリップ式）

品番 00143A00

取扱説明書

この取扱説明書は
お読みになったあとも
大切に保管してください

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- 万一、取扱説明書にしたがわず使用された場合の故障などについては責任を負い兼ねることがあります。
- 発送には十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、破損・汚損 故障などがございましたら、ご一報下さいますようお願い申し上げます。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目 次 フレキタッチ電極 2 (クリップ式)

1. 安全上のご注意	2
2. 使用上のご注意	2
3. 本製品の特長	2
4. 機器の構成	3
5. 各部の名称	3
6. ご使用方法	4
7. サービス&サポートについて	5
8. 仕様	5
■保証規定	6
■保証書	7

付 属 品

- 取扱説明書（保証書付き）（本紙） 1冊

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明していきます。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない
内容です。



実行しなければならない
内容です。

2. 使用上のご注意



(1) 無理に曲げたり、強い衝撃を与えないでください。


3. 本製品の特長

- (1) 本製品は、タッチセンサーSCまたはタッチセンサーSと合わせて使用します。
- (2) 先端の電極部に、唇や舌で軽く触れるだけでスイッチ操作が可能です。
- (3) フレキシブルに位置決めが可能です。
 - ・ベッドサイド等にクリップで固定して、自由にフレキシブルパイプを曲げて位置決めが出来ます。

4. 機器の構成

番号	品名	数量	外観	備考
1	本体	1		電極部本体
2	取扱説明書	1		付属品


5. 各部の名称

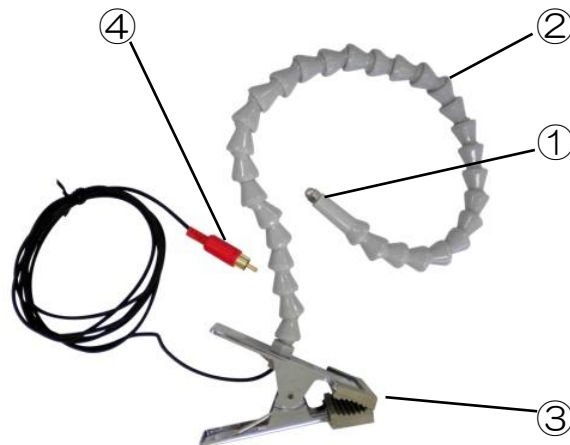

番号	品名	備考
①	電極部	唇や舌で、電極部に軽く触れるだけでスイッチの操作ができます。
②	フレキシブル部	唇などの確実に動かすことの出来る範囲に電極部がくるように位置を調整します。
③	クリップ部	台やサイドレール等にはさむことで本体を固定します。
④	接続プラグ	タッチセンサーコントローラのスイッチ入力部と接続します。

6. ご使用方法

- (1) フレキタッチ電極の接続プラグを、タッチセンサーコントローラーのスイッチ入力部に差し込み、接続します。
- (2) クリップ部を固定して、電極部を唇や舌の近くに位置決めします。
操作部から5mm程度離してセットし、操作できることを確認して下さい。
- (3) 電極部に触れるとスイッチが入ります。

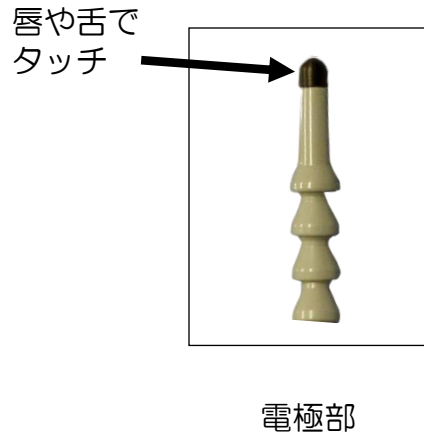

❗注意

- 先端スイッチ部を無理に曲げたり、大きく曲げたり引っ張ったりしないでください。

7. サービス&サポートについて

(1) トレサビリティ（商品追跡）と製造番号について

- 弊社商品の追跡管理として、商品の裏面等に商品ラベルを貼り付けています。
- 商品ラベルに製造番号を表示していますので、サービス時はその番号をご提示ください。

(2) サポートの方法について

①電話サポート

- 使用方法やトラブルに関する技術的な質問、故障時の修理依頼など、ご購入後の製品に関するお問い合わせについては、専門スタッフが電話でお答えいたします。以下へご連絡ください。

TEL：0978-33-5595

②Eメールサポート

- 使用方法やトラブルに関する技術的な質問、故障時の修理依頼など、ご購入後の製品に関するお問い合わせについては、Eメールでお答えいたします。以下へご連絡ください。

Eメール：support@amor.co.jp

③点検、修理時の商品の送り先

点検、修理等で商品をお送り頂く場合は、以下へ送ってください。

〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318番地
トクソー技研株式会社 商品部 商品サービスグループ宛
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

8. 仕様

商品名	フレキタッチ電極2（クリップ式）
商品番号	00143A00
電源	不要
フレキシブル部寸法	505mm
質量	約200g
コード長さ	約1.8m
接続プラグ	RCAプラグ

ーやさしさをカタチにー
トクソー技研株式会社
〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

保証規定

- 1) 取扱説明書等の注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。お買い上げの販売店にご依頼下さい。
 - 2) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷。
 - 当社又は表記の販売店以外による修理改造による故障及び損傷。
 - 火災、天災地変又は異常電圧、公害、塩害、異物又は害虫の侵入等による故障及び損傷。
 - 油煙、熱、塵、水、直射日光等の劣悪設置環境による場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
 - 4) 故障その他による使用上の機器損失は当社では補償致しません。
 - 5) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in japan.)
- ※この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

-----修理メモ-----

保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または下記販売元に修理をご依頼ください。

製品名	フレキタッチ電極2（クリップ式）		
品番	00143A00	製造番号	
保証期間	お買上日から6ヵ月間 （本体のみ、他は保証外）		
お買上日		年	月 日
お客様 ご住所 ご氏名 電話番号	〒 TEL () 様		
ご購入店 ご住所 店名・印 電話番号	〒 TEL () 様		

〔販売元〕

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL 0978-33-5595

キリトリ線