

S F マウススティック (i P a d 用)

品番 00150B00

取扱説明書

この取扱説明書は
お読みになったあとも
大切に保管してください

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- 万一、取扱説明書にしたがわず使用された場合の故障などについては責任を負い兼ねることがあります。
- 発送には十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、破損・汚損 故障などがございましたら、ご一報下さいますようお願い申し上げます。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目 次

1. 安全上のご注意	2
2. 使用上のご注意	2
3. 本製品の特長	2
4. 機器の構成	3
5. 各部の名称	3
6. ご使用方法	4
7. 仕様	4
■MEMO	5
■保証規定	6
■保証書	7

付 属 品

●取扱説明書（保証書付き）（本紙）	1冊
-------------------	----

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明していきます。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない
内容です。



実行しなければならない
内容です。

2. 使用上のご注意



- (1) 無理に曲げたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- (2) 熱器具の近くでは使用しないで下さい。
- (3) 洗浄の際は、柔らかいスポンジなどを使用し、強くこすらないで下さい。


3. 本製品の特長

- (1) パソコンのキーボードやタッチパッドのタッチ操作が行えるマウススティックです。
- (2) 歯科用EVA素材のマウスピースを付属した、安全軽量なマウススティックです。
- (3) マウスピースをお湯で軟化させることにより、歯形を付けることができ、ソフトなフィット感を得られ、前歯への集中加重を防ぎます。

4. 機器の構成

番号	品名	数量	外観	備考
1	本体	1		本体、先端キャップ付
2	取扱説明書	1		付属品

5. 各部の名称

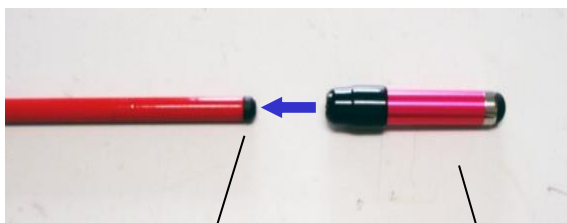

先端ゴム

先端キャップ

先端部にタッチパッド操作用
先端キャップを差し込んでください

6. ご使用方法

- (1) マウスピースを口にくわえて操作を行います。
- (2) スティック部が長い場合は、切断して先端ゴムと先端キャップを取り付けてご使用頂けます。（切断はお客様にてお願い致します。）
- (3) 使用後は洗浄し、清潔に保管してください。

7. 仕様

商品名	SFマウススティック（iPad用）	
商品番号	00150B00	
スティック部寸法	φ6×500mm	
マウスピース部寸法	50×48×厚8mm	
材質	スティック	アルミパイプ
	マウスピース	歯科用EVA
質量	40g	

—やさしさをカタチに—
トクソー技研株式会社
〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

保証規定

- 1) 取扱説明書等の注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。お買い上げの販売店にご依頼下さい。
 - 2) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷。
 - 当社又は表記の販売店以外による修理改造による故障及び損傷。
 - 火災、天災地変又は異常電圧、公害、塩害、異物又は害虫の侵入等による故障及び損傷。
 - 油煙、熱、塵、水、直射日光等の劣悪設置環境による場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
 - 4) 故障その他による使用上の機器損失は当社では補償致しません。
 - 5) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in japan.)
- ※この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

-----修理メモ-----

保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または下記販売元に修理をご依頼ください。

製品名	SFマウススティック（iPad用）		
品番	00150B00	製造番号	
保証期間	お買上日から半年間 （本体のみ、他は保証外）		
お買上日		年	月 日
お客様 ご住所 ご氏名 電話番号	〒 TEL () 様		
ご購入店 ご住所 店名・印 電話番号	〒 TEL () 様		

〔販売元〕

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL 0978-33-5595

キリトリ線