

スイッチパートナーSX

品番 00154A00

取扱説明書

この取扱説明書は
お読みになったあとも
大切に保管してください

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- 万一、取扱説明書にしたがわず使用された場合の故障などについては責任を負い兼ねることがあります。
- 発送には十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、破損・汚損 故障などがございましたら、ご一報下さいますようお願い申し上げます。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目 次 スイッチパートナーS X

1. 安全上のご注意	2
2. 本製品の特長	3
3. 機器の構成	3
4. 各部の名称とはたらき	4
5. ご使用方法	5～6
6. 故障かな？と思われたら	7
7. サービス&サポートについて	8
8. 仕様	9
■保証規定	10
■保証書	11

付 属 品

- 専用ACアダプタ（DC6V）
- 接続ケーブル（φ3.5mm、2m）
- 取扱説明書（保証書付き）（本紙）

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明していきます。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない
内容です。



実行しなければならない
内容です。



警告



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造しない。
感電の原因になります。



必ず守る

電源プラグは根元まで完全に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱の原因となります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く。
プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の
原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

万一、異常が発生したら電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止

万一、異常が発生したら電源プラグをコンセントから抜く。
〔傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。〕

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれ手で、電源プラグの抜き差しはしない。
感電の原因になります。

2. 本製品の特長


- (1) ピエゾセンサーなどのパルス入力機器で、スイッチ入力とコール操作の切り替えが可能です。
- (2) パルス入力でのコール操作切り替えの入力回数が3回、4回、5回と変更可能です。
- (3) 1つのスイッチを使って、1つの機器（意思伝達装置等）と、コール出力を切り分けて操作することができます。
- (4) 操作部位が震えて、スイッチが何回も入ってしまうような場合は、一定時間以上押し続けたときに出力するように設定ができます。

3. 機器の構成


番号	品名	数量	外観	備考
1	コントローラ	1		入力スイッチ、出力機器を接続します。 音やランプで操作方法を案内します。
2	ACアダプタ	1		付属品 DC6V、1.8A
3	接続ケーブル	2		付属品 コントローラと出力機器を接続するためのケーブルです。 Φ3.5、2m×2本
4	取扱説明書	1	本紙	付属品

4. 各部の名称とはたらき

【コントローラ 正面図】

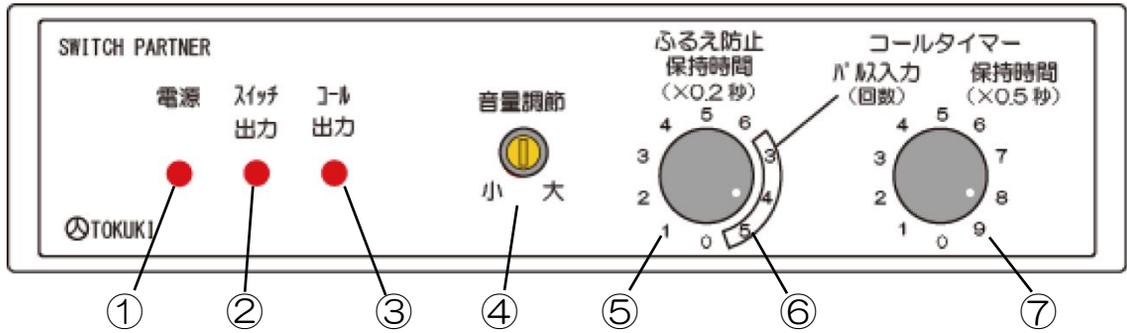


【コントローラ 背面図】

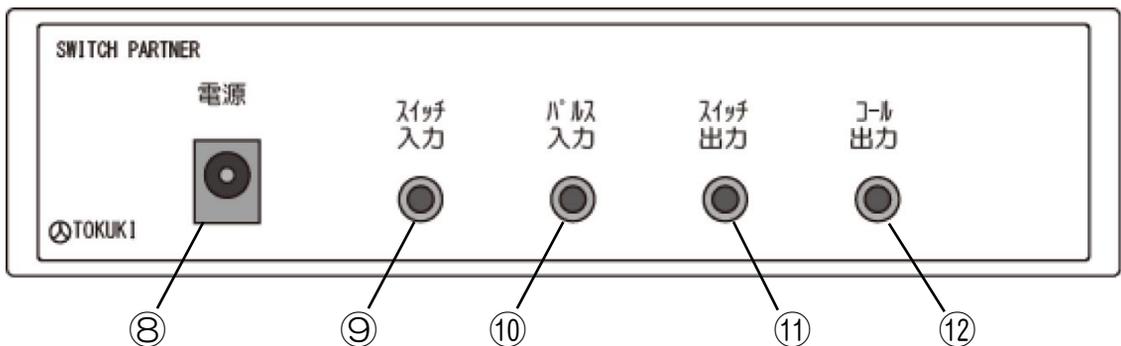

①電源ランプ	ACアダプタ接続時に点灯します。
②スイッチ出力ランプ	スイッチ出力がオンになっているときに点灯します。
③コール出力ランプ	コール出力がオンになっているときに点灯します。
④音量調節	スイッチ出力時に発生する本体ブザーの音量を調節します。
⑤ふるえ防止保持時間 (0～1.2秒)	まばたきや不随意等で誤入力操作にならないように、スイッチ操作を一定時間保持するとスイッチ出力をする誤操作防止時間の設定を行います。
⑥パルス入力 (3～5回)	パルス入力で設定時間内の入力回数を設定します。
⑦保持時間 (0～4.5秒)	スイッチ入力する場合、操作しながら設定時間保持するとコール信号を出します。
⑧電源ジャック	ACアダプタのプラグを接続します。
⑨スイッチ入力 ジャック	一般の入力スイッチ（接続式スイッチ）を接続します。 (Φ3.5モノラルジャック)
⑩パルス入力ジャック	パルス入力機器のスイッチを接続します。 (Φ3.5モノラルジャック)
⑪スイッチ出力 ジャック	スイッチ出力で操作する機器を接続します。 付属の接続コードを使用します。
⑫コール出力ジャック	コール機器を接続します。付属の接続コードを使用します。

5. ご使用方法 (1)

(1) 一般の入力スイッチ (持続式スイッチ) 使用時

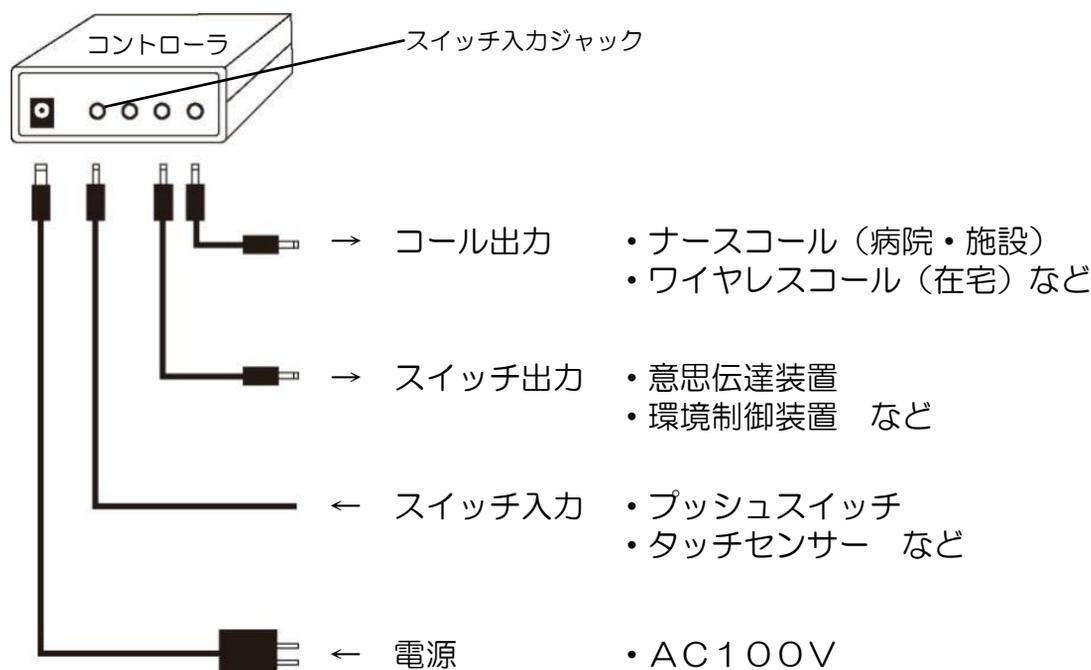


①ふるえ防止保持時間の設定を行ってください。



不随意等で誤入力操作にならないように
スイッチ操作を一定時間保持するとスイッチ出力します。
つまみを回して行います。
0～6段階 (約0～1.2秒) まで設定できます。
(注意) つまみがパルス入力回数3～5で設定されていると
動作しませんのでご注意願います。

②コールタイマー保持時間の設定を行ってください。

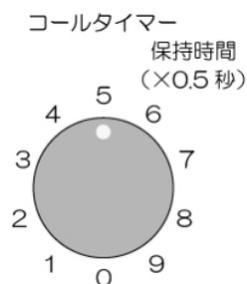

設定時間以上スイッチを押し続けるとコール出力に
切り替わります。
つまみを回して行います。
0～9段階 (0～4.5秒) まで設定できます。

③音量調節の設定を行ってください。




スイッチ出力時に発生する本体ブザーの音量を調節します。
設定はマイナスインドリバーの先端で行ってください。
つまみを左に回すと音量は小さくなり、右に回すと音量は
大きくなります。


④設定が完了したら、スイッチ出力、コール出力が行えるか確認してください。

5. ご使用方法 (2)

(2) ピエゾセンサー等 (パルス入力機器) 使用時

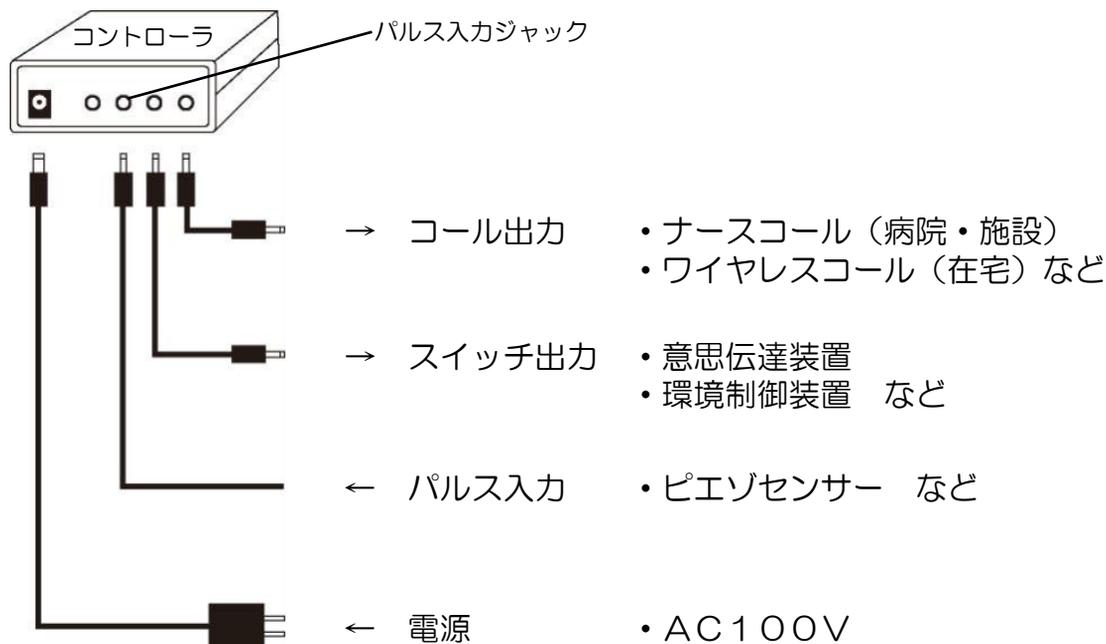


①パルス入力回数の設定を行ってください。

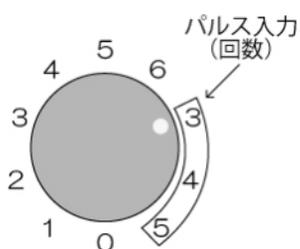

設定時間内の入力回数を設定します。
つまみを回して3回、4回、5回の設定ができます。

(注意) つまみがふるえ防止保持時間 (0~6段階) で設定されていると動作しませんのでご注意願います。

②コールタイマー保持時間の設定を行ってください。

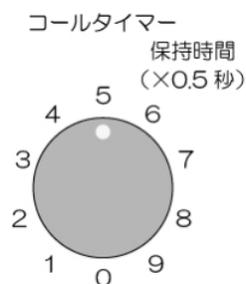

設定時間内に、設定した回数 (3回、4回、5回) 入力が入るとコール出力に切り替わります。
つまみを回して、0~9段階 (0~4.5秒) まで設定できます。

③音量調節の設定を行ってください。



スイッチ出力時に発生する本体ブザーの音量を調節します。
設定はマイナスドライバーの先端で行ってください。
つまみを左に回すと音量は小さくなり、右に回すと音量は大きくなります。

④設定が完了したら、スイッチ出力、コール出力が行えるか確認してください。

6. 故障かな？と思われたら

- ①修理サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください
②点検を行っても原因がわからないときには、販売店または弊社までお問い合わせください。

状態	点検	処理
電源ランプが点灯しない	●電源コードが外れていませんか。	→ACアダプタをコンセントコントローラに正しく接続してください。
	●電源コードが断線していませんか。	→修理が必要です。
スイッチがオンしない	●スイッチが外れていませんか。	→スイッチをコントローラに正しく接続してください。
	●入力タイマーが長く設定されていませんか。	→入力タイマーの設定時間以上、スイッチを押してください。
スイッチ出力ランプが点灯しているのに操作ができない	●機器との接続コードが外れていませんか。	→機器をコントローラに正しく接続してください。
	●スイッチ入力口、パルス入力口の接続に誤りはありませんか。	→正しい入力口に接続してください。
コール出力ランプが点灯しているのに通報が鳴らない	●コール機器との接続コードが外れていませんか。	→コール機器をコントローラに正しく接続してください。

7. サービス&サポートについて

- (1) トレサビリティ（商品追跡）と製造番号について
- ・弊社商品の追跡管理として、商品の裏面等に商品ラベルを貼り付けています。
 - ・商品ラベルに製造番号を表示していますので、サービス時はその番号をご提示ください。
- (2) サポートの方法について
- ①電話サポート
- ・使用方法やトラブルに関する技術的な質問、故障時の修理依頼など、ご購入後の製品に関するお問い合わせについては、専門スタッフが電話でお答えいたします。以下へご連絡ください。

TEL：0978-33-5595

- ②E-メールサポート
- ・使用方法やトラブルに関する技術的な質問、故障時の修理依頼など、ご購入後の製品に関するお問い合わせについては、E-メールでお答えいたします。以下へご連絡ください。

E-メール：support@amor.co.jp

- ③点検、修理時の商品の送り先
- 点検、修理等で商品をお送り頂く場合は、以下へ送ってください。

〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318番地
トクソー技研株式会社 商品部 商品サービスグループ宛
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

8. 仕様

商品名	スイッチパートナーSX		
商品番号	00154A00		
外形寸法	幅150mm×長さ110mm×厚さ40mm		
質量	250g (コントローラのみ)		
電源電圧	ACアダプタ (電圧: DC6V)		
消費電流	1W以下		
待機時間	電源投入後即時		
入力	スイッチ入力	φ3.5モノラルプラグ	
	パルス入力	φ3.5モノラルプラグ	
出力	スイッチ出力	φ3.5モノラルプラグ	
	コール出力	φ3.5モノラルプラグ	
調整	音量調節	小～大	
	ふるえ防止 保持時間	0～1.2秒 (1目盛0.2秒)	
	コールタイマー	パルス入力回数	3回、4回、5回
保持時間		0～4.5秒 (1目盛0.5秒)	

—やさしさをカタチに—

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

保証規定

- 1) 取扱説明書等の注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。お買い上げの販売店にご依頼下さい。
 - 2) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷。
 - 当社又は表記の販売店以外による修理改造による故障及び損傷。
 - 火災、天災地変又は異常電圧、公害、塩害、異物又は害虫の侵入等による故障及び損傷。
 - 油煙、熱、塵、水、直射日光等の劣悪設置環境による場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
 - 4) 故障その他による使用上の機器損失は当社では補償致しません。
 - 5) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in japan.)
- ※この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

-----修理メモ-----

保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または下記販売元に修理をご依頼ください。

製品名	スイッチパートナーSX		
品番	00154A00	製造番号	
保証期間	お買上日から1年間 (本体のみ、他は保証外)		
お買上日		年	月 日
お客様 ご住所 ご氏名 電話番号	〒 TEL () 様		
ご購入店 ご住所 店名・印 電話番号	〒 TEL () 様		

〔販売元〕

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL 0978-33-5595

キリトリ線