

★ 製品仕様

メディロック MLG series (ダイヤルタイプ/シリンダータイプ)							
		製品番号		本体外寸(mm)			質量(kg)
		ダイヤル	シリンダー	幅	奥行	高さ	
浅型	18人用	MLGC-118D-□	MLGC-118C-□	370	450	1050	31.6
	36人用	MLGC-236D-□	MLGC-236C-□	716	450	1050	53.0
	54人用	MLGC-354D-□	MLGC-354C-□	1060	450	1050	79.2
深型	9人用	MLGC-109D-□	MLGC-109C-□	370	450	1050	26.6
	18人用	MLGC-218D-□	MLGC-218C-□	716	450	1050	45.2
	27人用	MLGC-327D-□	MLGC-327C-□	1060	450	1050	65.0

※□には色番が入ります(W:ネオホワイト P:ピーチ V:ライトパープル)

付属品	ダイヤルタイプ	シリンダータイプ
	<ul style="list-style-type: none"> ・非常解錠キー ・リムーバブルピン ・見出紙(トレーに各1枚) ・取扱説明書 	<ul style="list-style-type: none"> ・リバーシブルキー 2本 ・見出紙(トレーに各1枚) ・取扱説明書

★ 保証の明細

⚠ 注意 ⚠ 本製品は簡易施錠のため、工具等による開錠やこじ開けには耐えられません。貴重品等の保管には十分ご注意ください。

保証項目 * 保証期間は御購入日から1年間です。
 ・保証期間中の製品の不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
 ・保証期間内でも、次のような場合は有料となります。
 ○火災、天災による損傷の場合。
 ○使用上の誤りや、改造など、お客様の責任に帰すると認められた場合。
 ○通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス、工場等での使用状態を想定)
 ○配送後のお客様の不注意による破損事故の場合。
 ・保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。(裏項参照)
 修理用部品の保有期間について
 ○製品の製造中止後3年間とさせていただきます。

★ 不要家具の引き取りについて (有料)

不要になった本製品の引取をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。
 適正な処理を行う有料廃棄物処理業者が、回収した製品をリサイクル商品として処分致します。
 またお客様ご自身で廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願い致します。

◆商品についてのお問い合わせは


株式会社宮成製作所
MIYANARI
 CORPORATION

〒300-2336
 茨城県つくばみらい市山谷915-2
 (TEL) 0297-38-7236 (FAX) 0297-58-4914
 (E-Mail) administrator@miyanari.co.jp
 (HP) <https://www.miyanari.co.jp>

メディロック 【MLGC series】

ダイヤルタイプ/シリンダータイプ

メディロックをお買い上げいただきありがとうございます。
 はじめに本説明書をお読みいただき、内容をご理解されたうえで
 正しくご使用くださいますようお願い致します。
 また本説明書は、必ず大切に保管下さいますようお願い致します。

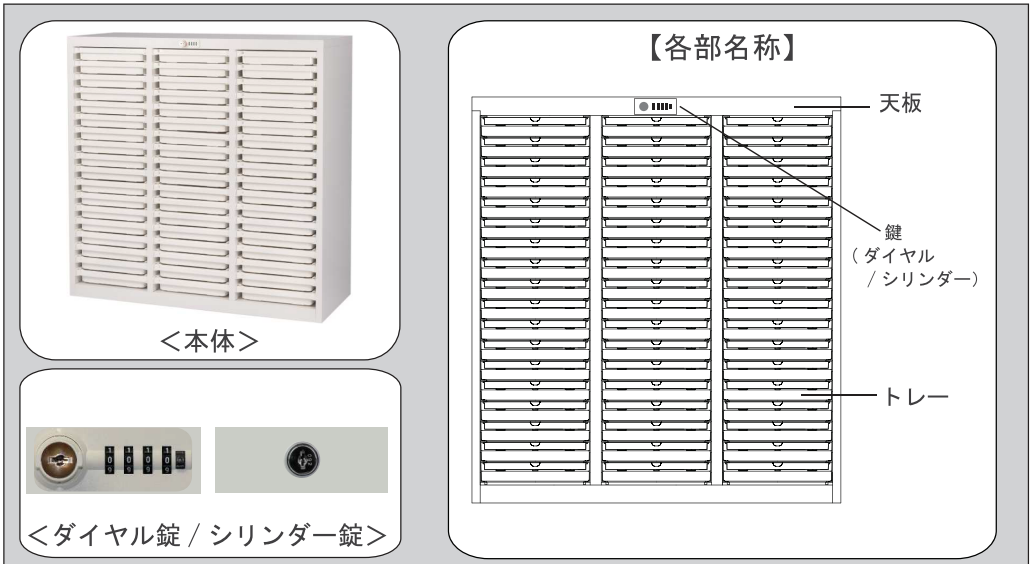

		品番(□には色番が入ります W:ネオホワイト P:ピーチ V:ライトパープル)		
		18人用	36人用	54人用
浅型タイプ	ダイヤル	MLGC-118D-□	MLGC-236D-□	MLGC-354D-□
	シリンダー	MLGC-118C-□	MLGC-236C-□	MLGC-354C-□
深型タイプ		9人用	18人用	27人用
	ダイヤル	MLGC-109D-□	MLGC-218D-□	MLGC-327D-□
	シリンダー	MLGC-109C-□	MLGC-218C-□	MLGC-327C-□

★仕様

	材質	色	表面仕上げ
本体	スチール(SPCC)	ホワイト	粉体塗装
トレー	帯電防止ABS	ネオホワイト/ピーチ/ライトパープル	

トレー寸法(幅×奥行×高さ 単位:mm)

	内寸		外寸	
浅型トレー	265	375	47	
深型トレー	265	375	97	315
				425

★安全にお使いいただくために、必ずお守り下さい。



この表示内容を無視して誤った取扱をすると、傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



メディロックは、薬剤(主に分包薬)の保管庫としてご使用ください。


- 収納されたものが万一盗難にあわれても、当社としては一切責任を負いかねます。
- 本製品は、トレーを個別に施錠することはできません。
- 施錠する際は、全てのトレーを閉めた状態で鍵をかけてください。
- 天板やトレーには、最大積載質量以上の物を載せないでください。
- 部分的に偏った質量を載せるとバランスがくずれ、落下・破損・転倒の恐れがあります。
- 乱暴な取扱や、次のようなご使用は避けてください。
 - ・・・・製品にもたれる、製品に腰をかける、製品に乗る、製品を踏み台として使用する、等
- 製品の隙間に指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- お客様による製品の改造はおやめください、安全上問題になることがあります。
- 改造によって発生したケガ・事故につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- お客様による、製品の分解・修理は大変危険です。必ず当社までご連絡ください。(設置について)
- 屋内でのご使用をお願い致します。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 転倒を防ぐ意味でも、壁際への設置をお奨め致します。
- 次のような場所への設置は、サビ・変形・変色の原因となりますのでおやめください。
 - ・ストーブの熱、エアコンの風、日光、等が直接当たる場所。
 - ・著しく高温多湿な場所。
- 窓際へ設置する際は、カーテンやブラインド等で直射日光を防いでください。
- 室内でご使用の際は、窓を閉めきらず適度に換気するようお願い致します。



最大積載質量について (全品番共通)

- 天板面：8 kg (等分布質量)
- トレー：浅型 3 kg / 深型 4 kg (いずれも等分布質量)

※等分布質量・・・積載部に均等に質量を載せること。

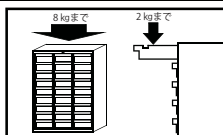

★未永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる恐れがあります。その際、当社で責任は一切負いかねます。


使用上の注意と日常のメンテナンス

- 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
 - ※アルコール・シンナー・ベンジン・油等をこぼすと、変色・変質・破損の原因となることがあります。
- 内部のレールに、一般機械用潤滑油やグリース等は絶対に塗布しないでください。
- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行ってください。
- 製品が著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤溶液 (1~3%) で柔らかい布を濡らし、固く絞って汚れを拭き取ってください。
- 製品を直接水洗いしたり、ベンジン・シンナー・アルコール類・科学雑巾などを使用すると表面の塗装が劣化したり、樹脂部分の変形・変色する場合があります。
- 市販のクリーナー等をご使用の際は、目立たない部分で変色が無いことを確認してからご使用ください。

★ ご使用方法

○解錠 / 施錠方法 (ダイヤルタイプ)


- (解錠)
1. ダイヤルを4桁の暗証番号に合わせます。
 2. ロックつまみを右方向へ180°回します。
 3. 全てのトレーが解錠されます。
- (施錠)
1. ロックつまみを左方向へ180°回します。
 2. 全てのトレーが施錠されます。
- ※施錠時に2mm以上トレーが引き出されていると施錠されません。

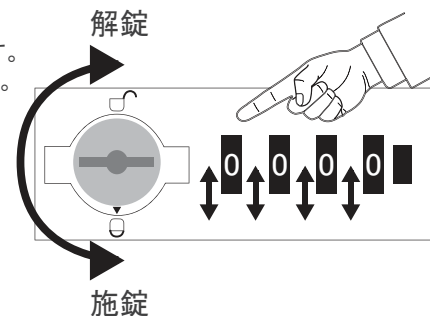

★暗証番号の設定など詳しい操作方法は、別紙「ダイヤル錠の操作方法」をご覧ください。

○解錠 / 施錠方法 (シリンダータイプ)

1. 鍵穴に鍵を入れます。(リバーシブルキーを採用していますので、どの方向でも入ります。)
 2. 図のように、鍵を180°回します。
 3. 一度に全てのトレーが施錠 / 解錠されます。
- ※施錠時に2mm以上トレーが引き出されていると施錠されません。

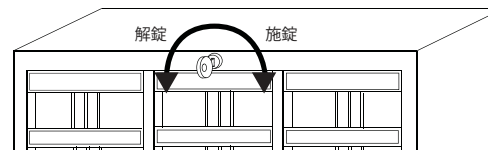

注意：鍵が抜けにくい場合などに、潤滑油を塗布することは絶対おやめください。故障の原因となります。

★故障の際及びスペアキーの製作は、お求めの販売店までご連絡ください。

★オプション (仕切板)

全てのトレーに対して、仕切板を取り付けることができます。

仕切板により、トレー内を6通りに均等割りできます。

(浅型) 4マス / 8マス / 16マス

(深型) 4マス / 8マス / 16マス / 24マス / 28マス / 32マス

* 詳細に関しましては別途お問い合わせください。

