

単回使用



一般医療機器 届出番号27B2X00243000165

穿刺部被覆保護材 100枚入

個包装タイプ

ELEBAN FINGER TIP エレバンフィンガーティップ


EOG
滅菌済

- ・指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏
- ・個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏



【サイズ】
 ●粘着フィルム:φ22mm
 ●パッド:10mm×10mm 厚み約1mm

【素 材】
 ●粘着テープ:ポリエステル不織布、
アクリル系粘着剤
 ●剥離紙:紙、シリコン樹脂
 ●パッド:レーヨン/ポリエステル不織布
 (※ラテックスフリー素材)

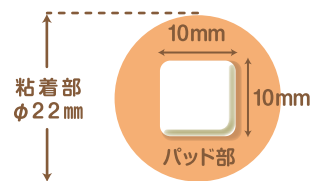

製品
特長

① 指先にフィットする形状・サイズです。

指先にフィットする形状・サイズとなっており、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用いただけます。パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。



製品
特長

② 開封操作が容易です。

開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。



折り返しがあるため
容易に開封できます。



剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、
貼り付け操作を簡単に行うことができます。


製品
特長

③ 個包装タイプのため、衛生的に使用できます。


1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。



主な使用用途

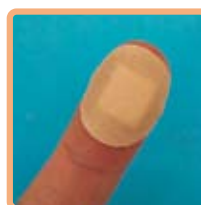


指先採血部位の保護に

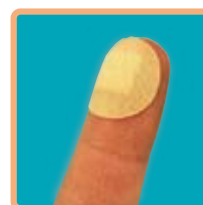

注射部位の保護に

使用方法

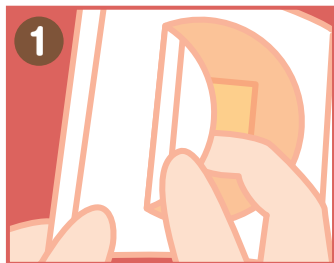


①袋を開封し、テープの端にある剥離紙とテープを持ち、台紙から剥がします。



②穿刺部にパッドを当て、剥離紙を持ったまま貼付してください。



③剥離紙を剥がし、テープ全体をよく押さえ、貼付してください。

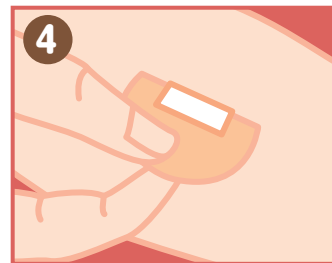

④剥がす際はテープをつまみ、皮膚から剥がしてください。

2021年9月作成(第1版)

届出番号27B2X00243000165

医04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

エレバンフィンガーティップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙:紙、シリコン樹脂

パッド:レーヨン/ポリエステル不織布

本品は滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置を変えること。
- 3) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 粘着面を患部に貼らないこと。

5) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。

6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

7) 包装開封後、速やかに使用すること。

8) 本品は貼付してから2時間を目安に剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)



「添文ナビ」アプリを使ってGS1コードから添付文書をご確認できます。

品番	サイズ	規格	箱サイズ(mm)	1梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード	GS1コード
			箱重量(g)		ケース重量(kg)		
3087722	φ22mm (パッド10mm×10mm)	100枚入	W175×D40×H45	24箱/ケース	W370×D260×H105	4 958286 718514	(01)04958286718514
			35		1.0		

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320