

7.保証について

(保証内容のご確認)

(無償修理規定)

●この取扱説明書は、無料修理規定に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

(保証期間について)

1年	外観 表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色 ・退色、レザー・クロスの摩耗
1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ コンセント、モーターなど
2年	機構部 可動部	引出・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼り付けラベルなど注意書に従った正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は無料修理をさせていただきます。
その際、部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。
また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から補償期間中に故障が発生した場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障にきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承ください。
(a)本書のご提示がない場合
(b)消耗部品(弊社指定部品)の交換
(c)第三者から転売・譲渡を受けた場合
(d)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
(e)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
(f)加工・改造、不当な修理による故障または破損
(g)野外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
(h)使用上の消耗により発生する異音などの現象
変質またはさび、カビの発生
(i)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
(j)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象
(において、音鳴りや振動など)

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店までご相談ください。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

*予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

販売店

アズワン株式会社

アルミカート 取扱説明書

MEDICAL STAFF STATION

マルチカート



1.安全上の注意点



警告

- トレーに収納するときは、最下段のトレーから入れてください。
上段のトレーに偏った収納をすると、引き出したときに本体が倒れて、けがをするおそれがあります。
- トレーが変形した状態で使用しないでください。
落下や転倒によるけがの原因になります。
- トレーにきずや欠けが生じたときは、すぐに取り替えてください。
そのまま使用していると、破損しやすくなり、けがをするおそれがあります。
- 移動させるときは、天板やトレーにのせているものが落下しないように、十分注意して行ってください。
ものが落下して、けがや破損のおそれがあります。
- 移動させるときは、キャスターのストッパーをフリー状態にしてから動かしてください。
ロック状態のまま動かすと、本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけたりするおそれがあります。また、キャスター
- 移動させるときは、ハンドルから手を離さないでください。
カートが思わぬ方向に動き、ものに衝突したり転倒したりして、けがや破損・変形の原因になります。



注意

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
 - 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。
 - この製品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
 - 耐荷重(下表の数値)を超えて、もののをせないでください。
全面に均等にのせた場合の耐荷重
- | | |
|-----------------|-------|
| H50 600*400トレー | 5kgf |
| H100 600*400トレー | 10kgf |
| H160 600*400トレー | 10kgf |
| 薬品庫 | 5kgf |
| 棚板 600*400 | 10kgf |
| H50 400*300トレー | 5kgf |
| H100 400*300トレー | 5kgf |
- 専用のオプションパーツ以外は取付けないでください。
落下して破損したり、ケガをする原因になります。

- ぬれた床面で使用しないでください。
製品が劣化する原因になります。
- トレーへの収納は均等に行ってください。
中央に偏るとトレーが変形するおそれがあります。
- 収納物がトレーの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。
トレーの開閉の女方げになつたり、故障や破損のおそれがあります。
- キャスターは消耗品です。
使用状況(走行頻度・積載荷重など)により耐久性が異なります。
※水分のある床で使用しますと、劣化して強度が低下する可能性がありますので、水分のある床での使用は避けてください。
※キャスターが劣化しますと走行に支障をきたしますので、早めの交換をお勧めします。(交換は有償になります。)
- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水れは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところで
の使用は避けてください。
変色や変形などの原因になります。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
変色や変形のおそれがあります。茶たくなべ敷きなどを下に敷いて使用してください。

- 飲み物をこぼしたままにしたり、れ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 商品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかつたり、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)
転倒や転落によるケガの原因になります。
- キャスターのストッパーを操作するとき
足以外で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- ストッパーを上げ下げするとき、靴の底で行ってください。
靴の表面を傷つけたり、けがをするおそれがあります。

- 移動させるときは、前後方向に動かし、床の段差や溝に注意して行ってください。
キャスターの破損や転倒によるけがのおそれがあります。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。
- ご使用中は、キャスターのストッパーを
ロック位置にしてください。

2.安全に使用いただくための注

- トレーを引出した状態で、上から押さえたり、もたれかかつたりしないでください。
本体の転倒やトレーの破損によるケガの原因になります。
- トレーに登らないでください。

- この商品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

3.末永く使用いただくための注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水れは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところで
の使用は避けてください。

- トレーが外れたり、本体が倒れてケガの原因になります。
- トレーが変形した状態で使用しないでください。
落下や転倒によるけがの原因になります。
- トレーや薬品庫に傷や欠けが生じたときは、すぐに取り換えてください。
そのまま使用していると、破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。
- 可動部は注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください。
ケガや故障の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるケガの原因になります。早めに締め直してください。
- アジャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、商品の破損により、ケガをするおそれがあります。
- 商品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
誤った使い方や事故を防止するためのもです。ラベルがなくなったり、剥がれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。
- 麻薬・劇薬の管理に使用される場合は管轄の地方厚生局の指導に基づきご判断ください。

4.使い方


- トレーの使い方
 - a. **注意点**
○トレーの出し入れは、ゆっくり動かしてください。
勢いよく行くと、トレーの破損や本体が動いて物が落下し、ケガをする恐れがあります。またトレーストップが脱落する恐れがありますのでご注意ください。
○トレーは1段ずつ引き出してください。
同時に2段以上引き出すと、転倒の恐れがあります。
 - b. **トレーの引出方**
トレーはゆっくりと上に上げてからに引き出してください。
 - c. **トレーの入れ方**
トレーをアルミパイプ等に乗せるように置いてください。
- キャスターの操作の仕方
キャスターにはストップがあります。
ストップを足で踏み込むとキャスターはロック状態(首振りも止まる)になり、引き上げるとフリー状態になります。

ストップ



- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.薄めた中性洗剤につけて布を固く絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭きとってください。
(汚れを落とすときの注意)水に濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

6.アルミフレームの固定の仕

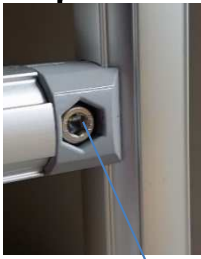

この穴に六角レンチを入れる



対辺5mmの六角レンチで締め込む

- 変色や変形などの原因になります。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを直接置かないでください。
変色や変形のおそれがあります。茶たくなべ敷きなどを下に敷いて使用してください。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、れ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- ぬれた床面で使用しないでください。
製品が劣化する原因になります。
- トレーへの収納は均等に行ってください。
中央に偏るとトレーが変形するおそれがあります。
- 収納物がトレーの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。
トレーの開閉の女方げになつたり、故障や破損のおそれがあります。
- キャスターは消耗品です。
使用状況(走行頻度・積載荷重など)により耐久性が異なります。
※水分のある床で使用しますと、劣化して強度が低下する可能性がありますので、水分のある床での使用は避けてください。
※キャスターが劣化しますと走行に支障をきたしますので、早めの交換をお勧めします。(交換は有償になります。)

7.故障かなと思ったら

不都合項目	対処方法
トレーが閉まらない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。 動きを妨げている物を取り除いてください。
移動させるときに重く感じる	キャスターのストップがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストップをフリーの状態にしてください。 キャスターにごみ等の異物が絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は取り除いてください。
キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする	キャスターのストップがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストップをフリーの状態にしてください。 キャスターにごみ等の異物が絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は取り除いてください。
トレーが引き出せない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを引出してください。
アルミフレームがしっかりと固定されてなくてガタつく アルミフレーム固定部のねじが緩んでいる。	対辺5mmの六角レンチで締め込む
◎ 以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	