

# バスボード

この一台で自立入浴から介助入浴まで幅広い対象者の入浴をサポートします。

H-S / H-L

## はねあげくん



プラネット福祉用具アワード2017  
二ツ星獲得



製品紹介



Video



### はねあげ座面で浴槽への出入りを、より安心で行えます。

自立で入槽できる！



自立で立位移乗。




自立で座位移乗。

介助負担を軽減！



片手で簡単に座面はねあげ。

より安心な入浴

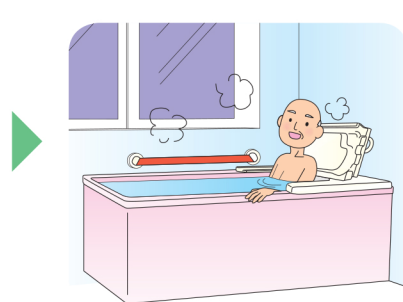

●ゆっくり閉まる座面



オイルダンパーを採用しているため、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。

●壁付け手すりと併設可能



座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。

●枕形状の座面裏



はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。

●アロン独自の「キノコ型グリップ」



グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。

## 入浴時の介助負担を軽減できます。

### >> Before

これまでのバスボードは、介助者が利用者を抱えながらボードを取り外さなければならず、介助負担が大きかった。



### >> After

座面をはねあげられるので、入浴介助の負担を軽減できます。



抱えて立ち上げらせ、バスボードをはねあげます。

## <座位入浴>

## 一人でも安全に座位入浴が行えます。

### >> Before

これまでのバスボードでは、一度取り外さないと浴槽に浸かれないので、介助してくれる人がいないと使えず、一人で入浴できなかった。



### >> After

座面をはねあげられるので、一人でも安全に入浴ができます。




手すりにつかまって立ち上がり、バスボードをはねあげます。

## <またぎ入浴>

## これまでのバスボードの使い方に加え、安全にまたぎ動作が行えます。

### >> Before

自宅の浴槽に浴槽手すりが取り付けられず、またぎ動作が不安定なので、浴槽に浸れることを諦めていた。

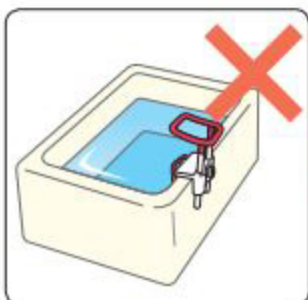

### >> After

様々な浴槽に対応でき、安全にまたぎ動作ができます。



バスボードで身体を支えながら浴槽に入ります。