

## 手すり(屋内用)

段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に

手すりを取り付ける


## 上がりかまち用手すり

安心して  
段差昇降するための  
手すりの設置

## ポイント 1 手すりの高さ

利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。  
(床から70~80cm)

## ポイント 2 手すりの水平部

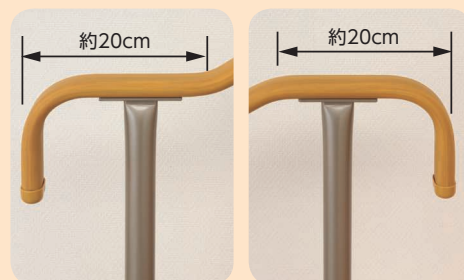段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支え  
やすい手すり水平部。

## ポイント 3 固定板

固定板の形状が2タイプから選べます。又、樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。

L型タイプ固定板  
取付可能なかまち高さ 6~45cm  
(SM-1100Lは16~45cm)  
※名称末尾[L]上がりかまちにしっかり固定  
できます。フラットタイプ固定板  
取付可能なかまち高さ 0~45cm  
(SM-1100Fは10~45cm)  
※名称末尾[F]上がりかまちの形状に合わせて  
取り付け位置が選べます。

## 上がりかまち用手すりの選び方

### ●玄関の奥行きが狭い場合(60cm以下)



K-140L/F



KM-300L/F

より狭い  
スペース



最小設定

上がりかまち用手すり  
K-140L/F



水平部で  
体を安定

上がりかまち用手すり  
KM-300L/F

### ●玄関に広さがあり手すりですっかり体を支えたい方(60cm以上)

K-650L/F  
KM-650L/FS-650L/F  
SM-650L/FS-950L/F  
SM-950L/F

SM-1100L/F


手すりの  
高さ調整をしたい



上がりかまち用手すり  
S-650L/F  
S-950L/F  
SM-650L/F  
SM-950L/F  
SM-1100L/F

手すりの見た目に  
こだわりたい

#### ●上がりかまち用手すり(木製)

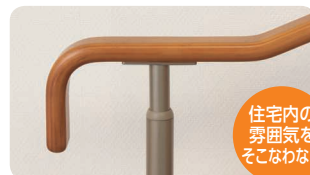

住宅内の  
雰囲気を  
そこなわい

KM-650L/F SM-650L/F  
SM-950L/F SM-1100L/F

#### 少し不安な方は…

滑りにくい素材(エラストマー)を被覆した木目調の手すり

#### ●上がりかまち用手すり(ソフト)

ソフトな  
ざわり  
ごごち



K-650L/F S-650L/F  
S-950L/F

# 手すり(屋内用)

## 昇降動作にかかせない木製玄関台との組み合わせ

●木製玄関台と上がりかまち用手すりを組み合わせて使用すると、段差の昇降動作を安定した姿勢で安心して行うことができます。



上がりかまち用手すり1100と木製玄関台2段の組み合わせ



上がりかまち用手すり950と木製玄関台1段奥行40cmの組み合わせ



上がりかまち用手すり650と木製玄関台無しの組み合わせ

### ■木製玄関台・上がりかまち用手すり推奨組み合わせ


段差高さ	木製玄関台	上がりかまち用手すり
15cm以下	—	140、300、650シリーズ
25cm	木製玄関台1段 奥行30cm	650シリーズ
25cm	木製玄関台1段 奥行40cm	950シリーズ
30cm	木製玄関台2段	1100シリーズ
40cm	木製玄関台3段	(住宅用連続手すり設置)

### ●式台がある玄関にも対応

設置例①(土間にスライド脚を設置)




土間にスライド脚を設置

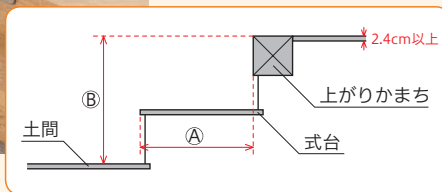

設置例②(式台にスライド脚を設置)



式台にスライド脚を設置

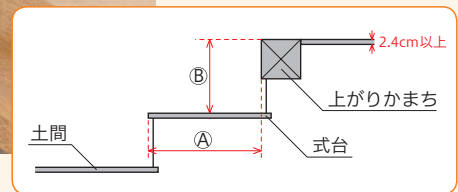

### ■土間にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	L型の場合	F型の場合	寸法B
	寸法A	寸法A	
K-140	—	—	L型6~45cm F型0~45cm
KM-300	21cm未満	21cm未満	
K-650	32cm未満	32cm未満	
KM-650			
S-650			
SM-650	59cm未満	15cm以上	
S-950		59cm未満	
SM-950	29cm未満	15cm以上	L型16~45cm F型10~45cm
SM-1100		29cm未満	

※式台の幅が設置可能寸法から外れている場合は取り付けることができません。

### ■式台にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	L型の場合	F型の場合	寸法B
	寸法A	寸法A	
K-140	12cm以上	12cm以上	L型6~45cm F型0~45cm
KM-300	27cm以上	21cm以上	
K-650	38cm以上	21cm以上	
KM-650			
S-650			
SM-650			

※S-950・SM-950・SM-1100は、式台には設置できません。  
※取り付け位置をずらして設置する場合は、式台の端から2cm奥にスライド脚を設置してください。