

室内での段差につまづきやすい方に

玄関等の段差を解消する

段差スロープ

室内の段差解消に
取り付けやすいスロープの設置

段差スロープEVA

部屋の開口部に合わせた幅76cmタイプ

●端末形状




側面からのつまづきを防ぐ端末形状です。

対応段差 (段差スロープ EVA)

商品	サイズ (幅×奥行×高さ)	段差対応高さ
#20	76× 8×2cm	1.8～2.2
#25	76×10×2.5cm	2.3～2.7
#30	76×12×3cm	2.8～3.2
#40	76×16×4cm	3.8～4.2 ※1
#50	76×20×5cm	4.8～5.2 ※2

(※1) 3.3～3.7cmへの対応は右図を参考にしてください。
(※2) 4.3～4.7cmへの対応は右図を参考にしてください。

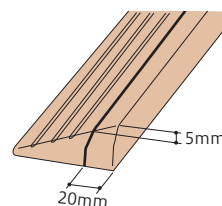

高さの調節方法


高さを5mm低くする場合、図のように端から20mmの位置で長手方向にカッターナイフでカットすると、5mm低くなります。

段差スロープEVA1000

広い開口部にも対応できる幅1mタイプ

●スロープ幅を1mに設定

広い開口幅にも対応できる幅1m設定。さらに設置場所に合わせてカットして使うことができます。

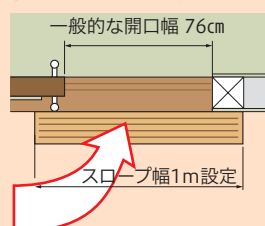

車いすで斜めに入りやすいよう、スロープ幅を広く設置



※カッターナイフで切断できます。

車いすでの乗り上げも余裕をもって安心して行えます。



車いすの幅
JIS規格: 70cm以下

●段差に合わせて高さを調節可能

カッターナイフでカットできる素材 (EVA発泡樹脂) を使用しているため、施工現場での高さ調節が可能。さらにスロープ高さを微調節できるライナーを添付。(2枚入り・厚み2mm)



カットライン



ライナー (両面テープ付)

●すべり止め加工

スロープ表面にはすべり止めの溝とシボ加工を施しているため、すべりやすい靴下で歩いても安心です。



表面シボ加工 (すべり止め)




対応段差 (段差スロープ EVA-1000)

商品	サイズ (幅×奥行×高さ)	段差対応高さ
#20	100× 8×2cm	1.5～2.4
#30	100×12×3cm	2.5～3.4
#40	100×16×4cm	3.5～4.4
#50	100×20×5cm	4.5～5.4

高さの調節方法

高さを5mm低くする場合図のように、端から20mmの位置にある目印の溝に沿って長手方向にカッターナイフでカットすると5mm低くなります。

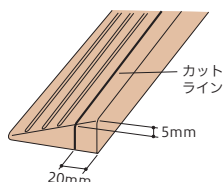

施工のしかた (共通)



① 設置場所に合わせて、カッターナイフでカットして幅と高さを調整します。




② 必要に応じて付属のライナーで高さを微調整します。(2mm単位で調整できます) ※EVA1000のみ



③ 本体裏側に貼られている両面テープははがし、設置場所に仮止めします。



④ 付属の木ねじで床面に固定します。

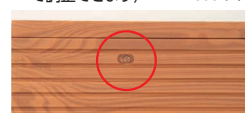

⑤ ねじ穴に付属の目隠しシールを貼って完成です。