


●歩行車 トライリンク

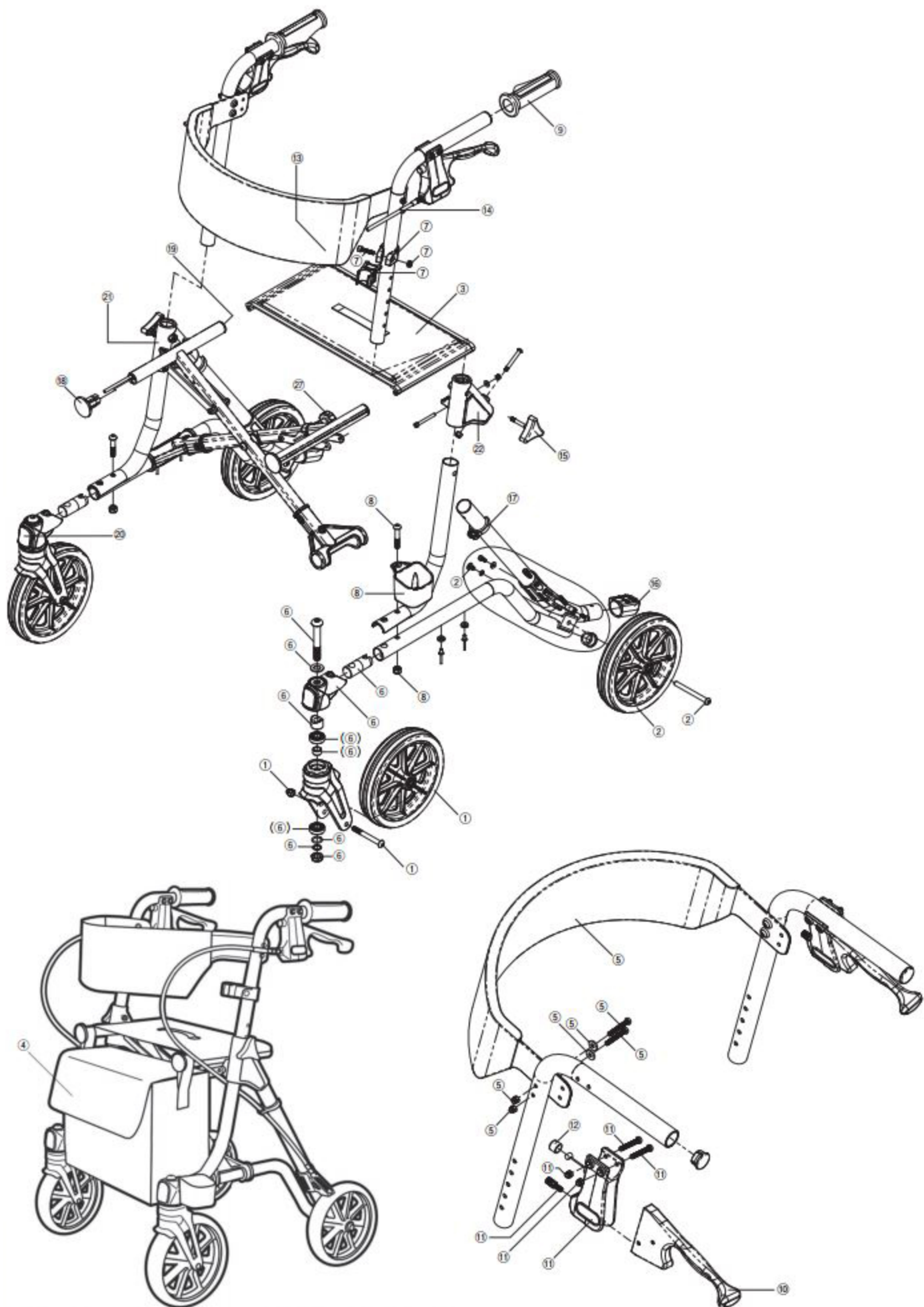

※部品については、お届けまでに日数をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。

部品一覽

製品名	No.	部品名	部品コード	価格	備考
トライリンク	①	前輪セット (前輪、前輪固定ボルト、前輪固定ナット)	592140		
	②	後輪セット (後輪、後輪固定ボルト(短) 後輪固定ボルト(長))	592141		
	③	座面	592142		
	④	バッグ	592143		
	⑤	姿勢保持ベルトセット (姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト固定用ボルト×4、姿勢保持ベルト固定用ワッシャー×4、姿勢保持ベルト固定用ナット×4)	592144		
	⑥	前輪フォークセット (前輪フォーク、前輪フォーク基部、前輪フォーク固定用ボルト、ワッシャー×2、前輪フォーク固定用ナット、Oリング、スペーサー、芯材)	592145		
	⑦	杖固定具セット (杖固定具、杖固定具基部、杖固定具固定ボルト、杖固定具固定ナット)	592146		
	⑧	杖ホルダーセット (杖ホルダー、杖ホルダー固定用ボルト、杖ホルダー固定用ナット)	592147		
	⑨	ハンドルグリップ	592148		
	⑩	ブレーキレバーセット (ブレーキレバー、金属軸×2、滑車×2)	592149		
	⑪	ブレーキ基部セット (ブレーキ基部、ブレーキ基部固定ボルト×2、ブレーキ基部固定ナット×2、ブレーキワイヤー固定ボルト、ブレーキワイヤー固定ナット)	592150		
	⑫	ブレーキ基部キャップ	592151		
	⑬	ブレーキワイヤー	592152		
	⑭	ブレーキワイヤーアウターチューブ	592153		
	⑮	高さ調節ノブボルト	592154		
	⑯	フレームエンドキャップ	592155		
	⑰	ブレーキワイヤーガイド	592156		
	⑱	シートパイプ端部キャップ(前)	592157		
	⑲	シートパイプ端部キャップ(後)	592158		
	⑳	反射板(前)	592159		
	㉑	反射板(右)	592160		
	㉒	反射板(左)	592161		
	㉓	ブレーキ操作シール 10枚入り	592162		※
	㉔	指はさみ注意シール 10枚入り	592163		※
	㉕	補修用ペイント(スプレー) 300ml	592164		※
	㉖	ブレーキ基部固定ナット4個セット	592193		※
	㉗	折りたたみ防止ロック	592079		

「備考」欄に※印がある部品は図示していません。

※部品については、お届けまでに日数をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。