

分類コード123303:体位変換用クッション

180930:シート、シートクッション、外転防止、ブロックシート

TJISコード 02022-00006(Mサイズ)、020022-00007(Lサイズ) 貸与

カラー:パープル

日本製

Uクッションの特性

丸洗いでできます

蒸れにくい
高い吸水性と通気性

防臭効果
備長炭ソフトパイプ材使用



長さ 135 cm

抗菌効果
NANOFRONT[®] 使用

疲れにくい
柔らかすぎない適度な硬さ

支持面が安定
NANOFRONT[®] 使用

体にフィット
トータルコンタクトで体圧分散

NANOFRONT[®] 使用
by TEIJIN 東人フロンティア株式会社

【使用用途】

監修: 大野浦病院 黒瀬PT

① 車椅子両サイドのアンカー

〈対象〉

- ・体幹の保持が不安定な方
- ・長時間座位保持が必要な方



〈特徴〉

- ・車椅子のバックサポートの両サイドにクッションを置き、体幹を包み込むよう設置
- ・体幹の左右への安定をサポート

② 車椅子 前傾姿勢+前腕サポート

〈対象〉

- ・食事時、前傾姿勢が取れない方



クッションなし



クッションあり

〈特徴〉

- ・食事時、体幹の前傾姿勢が可能
- ・前腕支持により姿勢の安定向上

〈お問い合わせ〉

〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津4424

株式会社コーポレーションパールスター

Tel 0846-45-0116 fax 0846-45-150

Email parlstar@pastel.ocn.ne.jp

③車いす 片麻痺片側への傾き



〈対象〉

- ・食卓時、前傾姿勢が取れない方



〈特徴〉

- ・片側への体幹の傾きを防ぐ事ができる
- ・クッションの厚み調整が可能

④車椅子 円背 骨盤サポート



〈対象〉

- ・円背患者
- ・骨盤保持により座位保持安定する患者

〈特徴〉

- ・円背患者など、骨盤の隙間をなくし、座位を安定させる

⑤上肢安楽肢位



〈対象〉

- ・食後リラックスした姿勢で休みたい方など

〈特徴〉

- ・上肢を安定させ、リラックスした座位保持が可能

⑥ベッド U肩甲帯サポート・上肢拘縮予防



〈対象〉
円背がある方

〈特徴〉

- ・肩甲帯に隙間ができやすい方に接触面積を増やし安楽な姿勢をつくる



⑦ベッド 側臥位 両脚間・背中

〈対象〉

- ・骨突出があるやせた方など

〈特徴〉

- ・側臥位において両膝～足部への骨接触を避け安楽な姿勢を作る
- ・側臥位における背中サポート

