





装着時のご注意

タフシロン人工筋肉膝サポーター **ネクスト**

本製品は、伸縮性のタフシロン®(シリコーン)素材を使用し、しっかりしたサポートと程よい締め付け感を目指したサポーターです。

装着時はタフシロン®(シリコーン)加工部を持たず、サポーター生地両端を上方向に持ち上げる様に装着してください。

生地を引っ張りすぎるとタフシロン®(シリコーン)加工部が切れる可能性があります。

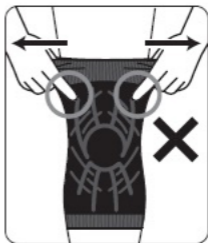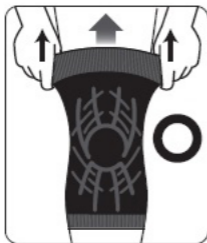

- ※過度の荷重がかかった場合、タフシロン®(シリコーン)加工部が切れる可能性があります。ただし、機能上の問題はありません。
- ※スポーツ等で膝部に瞬間的に強い力が加わる運動や、長時間強い力がかかる動作をする際のご使用はお避けください。
- ※脚にフィットしたジーンズ等のパンツ類の内側に装着される場合は、生地と強い摩擦が発生しシリコーン加工部が破損する場合がございますのでご注意ください。

本製品は、半透明のタフシロン®(シリコーン)素材を使用しておりますので、サポーターの引っ張り・曲げの状態により光の屈折率が変化し、タフシロン®(シリコーン)素材部の透明感にばらつきが出る場合があります。製品の品質に問題ございませんので、そのままご使用くださいますよう、お願い致します。



発売元/株式会社タナック 〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4-24

<https://tendersense.jp/> お客様相談室:0120-638-122 (平日9:00~17:00 土日概休み)

MANU-00701