



からだふき

ウエットタオル エンボス



温めて使用できて冷めにくい
個包装タイプのウエットタオルです。




看護・介護製品

介護ティッシュ

商品特長

1 温めて使用できる


- 個包装のため、ホットボックスや電子レンジで温めて使用できます。
電子レンジで温める場合、あらかじめ袋を開封し、500Wで20秒(目安)で温めます。

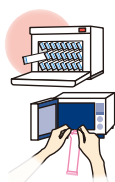

⚠ 電子レンジなどで温める場合は、やけどに注意してください。

2 冷めにくい

- 水分をたっぷり含んだシートを、畳み直さず手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。

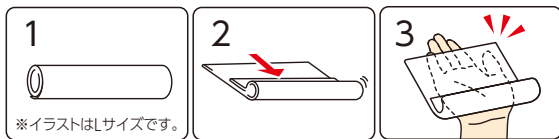

広げて畳み直さなくても、手のひらサイズに!

3 丸まりにくくしっかり拭ける

- エンボス加工により基布が丸まりにくいため、看護する方のストレスを軽減します。
- かき取り性の高いエンボス不織布のため、体の表面の汚れをしっかり除去できます。

4 長期の保管が可能

- 個包装に使用した特殊フィルムと水分が減少しにくい包装方法により、製造日から2年間の保管が可能です(直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください)。
- 製造日と使用期限表示付きです。
- 災害備蓄にも最適です。


5 肌にやさしい成分でしっとり

- アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後はしっとりします。

アロエベラエキス + ビタミンCを多く含み、水分保持力がある、肌にやさしい成分です。

6 利用者に配慮したパッケージ

- 使う方に気持ちよく使って頂ける、清潔感のあるデザインのパッケージです。

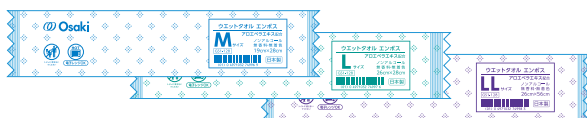

7 WWマーク付き

- WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウエットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。



商品情報

■ 使用用途

おすすめサイズ	使用用途	主な使用部署
Mサイズ	モーニングタオル	病棟
	食事・おやつ時の手拭き	病棟
	おしりふき	病棟
Lサイズ	エコージェルの拭き取り	外来・産科病棟
	足拭き	病棟
	からだふき(半身)	病棟・NICU
LLサイズ	からだふき(全身)	病棟・ICU・ER

■ 成分

水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド

■ 素材

ポリエチレンテレフタレート、レーヨン

⚠ 水に溶けないため、トイレには流さず適切な廃棄方法で処理してください。

- 内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数開けてあります。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
74996	ウエットタオル エンボス M 1枚入(100個×12袋) 19cm×28cm	販売単位 550 × 310 × 360	11.5kg	—	4971032749969 14971032749966
74997	ウエットタオル エンボス L 1枚入(100個× 8袋) 26cm×28cm	販売単位 550 × 300 × 360	11.5kg	—	4971032749976 14971032749973
74998	ウエットタオル エンボス LL1枚入 (50個×12袋) 26cm×56cm	販売単位 550 × 300 × 360	13.5kg	—	4971032749983 14971032749980

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店