

折り畳み担架収納ボックス

取扱説明書

1. 安全上のご注意

●担架を収納する用途のみでご使用ください。●屋外では使用出来ません。

2. 仕様とセット内容

※プラスドライバーをご用意ください。

■サイズ：W470×D400×H951mm

■材質：スチール

■重量：約 16kg

セット内容

背面に固定用
ネジ 2 本付

底板 × 1 枚

上フタ × 1 枚

ボックス × 1 台


ベース × 1 台

連結用ネジセット

ネジ × 4 本


スプリングワッシャー
× 4 個

ワッシャー
× 4 個

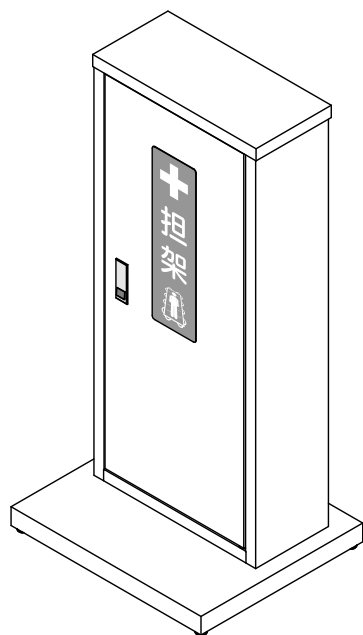

3. 扉の開閉方法

- [1] 扉を開ける時は、まず赤い四角のボタンを押し、銀色のレバーを起こします。図 1
- [2] 銀色のレバーを引いて、扉を開けます。図 2
- [3] 扉を閉じる時は、扉を押して静かに閉じ、銀色のレバーを元に戻します。

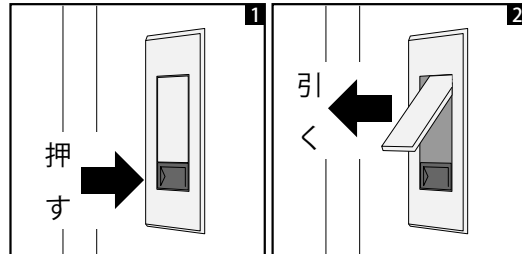

4. 組立方法

- [1] 作業の妨げになる場合、ボックスの扉は取り外すことができます。図 3
- [2] 扉を開け、ベースとボックスを連結させるため、4箇所の穴位置を合わせます。
この時、ベースの広い方が正面側になる向きに設置します。図 4
- [3] ボックスの内側より、ネジ、スプリングワッシャー、ワッシャーの順に下に向けて固定してください。図 4
- [4] ボックスへ底板をセットしてください。図 4
- [5] ボックスへ上フタを乗せ、フタの背面にあるネジ 2 本を締めて固定します。図 5

