

医療現場の
お困り事に…

車いすポンベキャッチャー

よりそいくん

「車いすにつながる」新発想のポンベキャリー

患者さんの搬送時

点滴台

+

ポンベ
キャリー

+

車いす



1 繋げて
車いす搬送

リハビリ時

点滴台

+

ポンベ
キャリー



2 単独で
自走カート

現場の負担
軽減!

車いすとポンベがつながるだけで
取り回しが快適に



どんなタイプの車いすでも
すぐにつけられると、
かなり時短になりますね。

衛生面を考えると、
手を汚さないで
操作できるといいな。

使いやすさ
を追求!

現場スタッフの
ニーズを反映

快適な
ケアのために

現場の声 ×
国産メーカーの
共同開発

医療従事者の
声を反映して
開発しました

サイズ	・本体……………外径φ346×1,520～1,970mm
	・ポンベ固定リング内径……………φ105mm
	・ティッピングレバー対応径……………φ19～22mm
	・車輪径……………φ65mm
	・連結ジョイント……………377mm×91mm×57mm

重量 7kg


点滴台 使用長……………1,520mm／1,745mm／1,970mm (3段階調節)

材質	・点滴台……………アルミ合金(φ18/22mm)、スチール
	・点滴台サイズ調節ピン……………POM、ステンレス
	・点滴台グリップ……………合成ゴム
	・ポンベキャリア……………アルミ合金、スチール
	・キャスター……………ウレタン

工具不要で簡単脱着!



1 車いすのレバーに、「よりそいくん」接続用パーツを差し込みます。

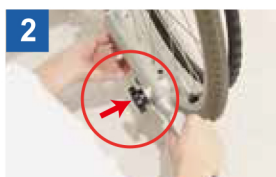

2 奥まで差し込んだら、つまみを手で回して締め、固定します。



3 車いす側のパーツが固定できました。



4 本体をつなげます。まず、車いす側パーツの受け口に、位置を合わせます。



5 足でレバーを踏み、受け口を開いて、本体の固定具を押し入れます。



6 「よりそいくん」本体がつかまりました。本体は足だけで付け外しできます。


今ある車いすがそのまま使える車いす固定具

高さ調節可能で幅広い仕様の車いすに合わせられます。
※ティッピングレバー対応径φ19～φ22mm



足のみで脱着可能!

「よりそいくん」接続用パーツ

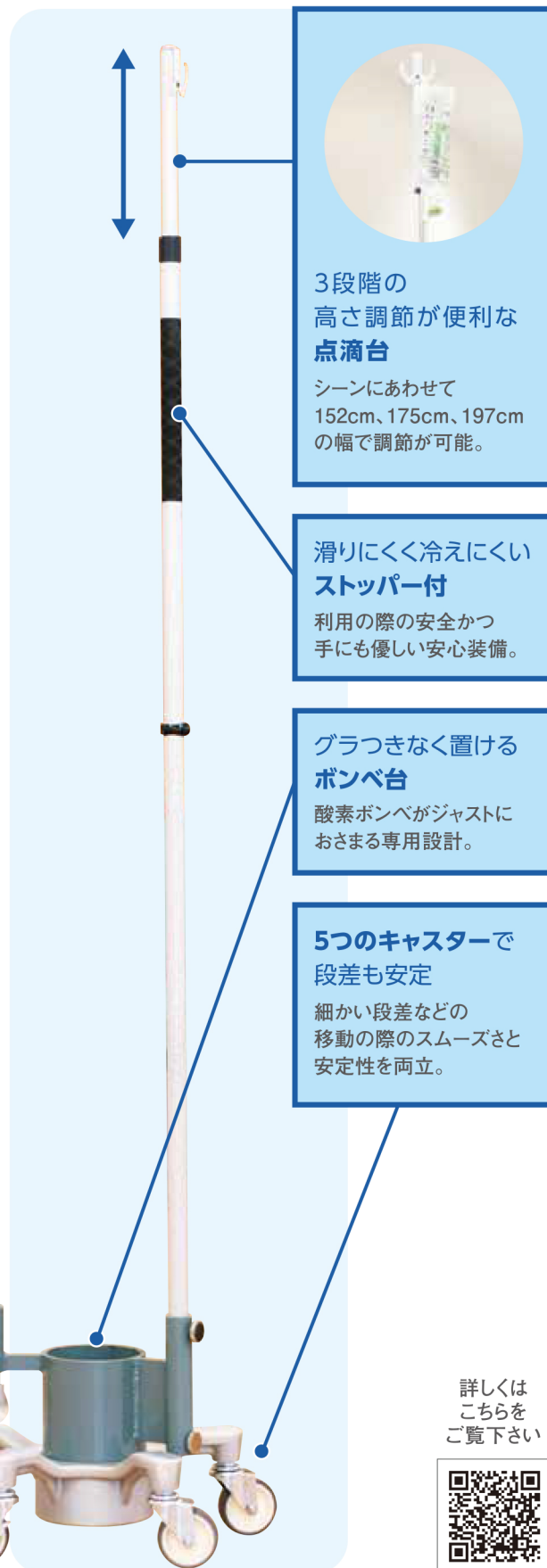

3段階の高さ調節が便利な点滴台

シーンにあわせて152cm、175cm、197cmの幅で調節が可能。

滑りにくく冷えにくいストッパー付

利用の際の安全かつ手にも優しい安心装備。

グラつきなく置けるポンベ台

酸素ポンベがジャストにおさまる専用設計。

5つのキャスターで段差も安定

細かい段差などの移動の際のスムーズさと安定性を両立。

詳しくはこちらをご覧ください

