

ワンタッチ顎バンド

# ソフラ® あごバンデージⅡ



日本製  
MADE IN JAPAN




▲商品詳細  
はこちら

## あご関節の脱臼予防に

- 2点留めで“かんたん”装着
- 面ファスナーで“しっかり”固定
- 綿が主体の“やさしい”素材



寝ているときじゃまにならない形状

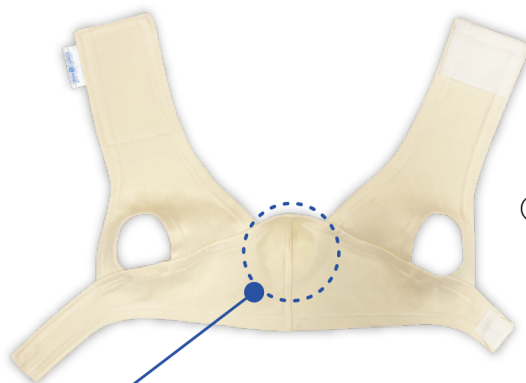

あごにしっかりフィット

コンパクトな  
パッケージ



商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
007332	ベージュ S	1枚	4958995073324	10枚
007333	ベージュ M	1枚	4958995073331	10枚
007334	ベージュ L	1枚	4958995073348	10枚
007322	ピンク S	1枚	4958995073225	10枚
007323	ピンク M	1枚	4958995073232	10枚
007324	ピンク L	1枚	4958995073249	10枚

## 素材

綿・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル

## サイズの選び方


サイズ	顔廻り	首廻り
S	55cm～62cm	30cm～42cm
M	62cm～69cm	
L	69cm～76cm	

※値がぎりぎりの場合は1サイズ下をおすすめします


### 計測部位目安



## 装着方法

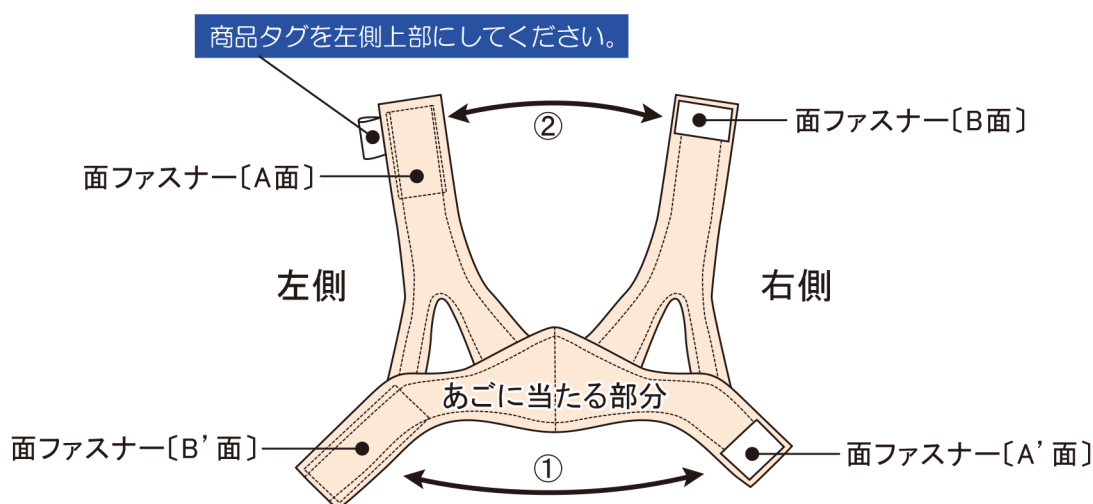

▲商品詳細はこちら

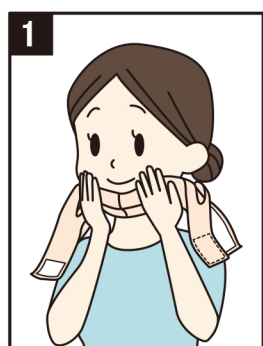


1 あごに当たる部分をあごに当て、装着位置を確認します。



2 面ファスナー[A'面]と[B'面]の両端を持ち、首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。(①) (右手側の[A'面]が上になります)



3 面ファスナー[A面]と[B面]の両端を持ち、あごにフィットするように頭の上でとめます。(②) (右手側の[B面]が上になります)

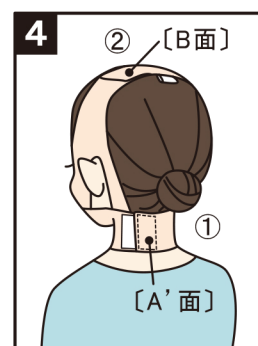

4 \* 後ろから見た図 固定力を微調整してください。



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

### 【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 観メディアビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店