


～ 取扱説明書 (T字杖) ～

1. この取扱説明書は、必ずお読み下さい。
2. この取扱説明書は大切に保管して下さい。
3. 杖は必ず自分の身長に合わせてお使い下さい。
4. 長さの決め方
 - 正しい握りの位置を決めるには杖先を同側の足先の前方20cmにおき、肘は30～40度屈曲した位置がよく、この状態で杖の長さを決めて下さい。
5. 長さの調整の仕方
 - 先ゴムをはずし、木製の杖はノコギリで、アルミ製の杖は鉄切りノコギリで先端を切り落として下さい。
 - 切り落とした後、バリ等がある場合は、バリを取ってから必ず先ゴムをしっかり差し込んで下さい。
6. 使用前に必ず各部を点検して下さい。
7. 足ゴムはキチンと装着して下さい。磨耗したりキズがついた場合は、速やかに新しいゴムと交換して下さい。
8. 先ゴムは必ず専用先ゴムを使用して下さい。
9. ぬれた路面や、すべり易い所を歩行する場合は充分気をつけて下さい。
10. ご専門の先生方、あるいは看護婦さんに正しい使用方法をご指導いただいで下さい。
11. 杖は歩行補助具です。それ以外の目的 (例えば、登山、護身用など) には使用しないで下さい。
12. 保管は立て掛けて日陰に保管して下さい。
13. このT字杖にはロットナンバーを記したステッカーが貼ってあります。ステッカーは絶対にはがさないで下さい。ロットナンバーのないものには責任をもちかねる場合があります。
14. この杖の耐用年数は2年です。

正しいつえの長さ

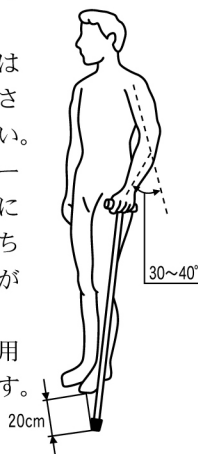

製造元 〒955-0093 新潟県三条市下須頃5-1

株式会社 サ ン

TEL 0256-33-3749 FAX 0256-33-3754