

# ひじかけ付シャワーチェア 取扱説明書

品番 :SR-SBC018KD



この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

## ⚠ 安全上の警告・注意


- ◆本製品を改造しないでください。
- ◆本製品の各部に破損または、変質等の異常が見られたときは使用を中止してください。
- ◆お湯をはった浴槽内では使用しないでください。製品が浮き上がって転倒したり、パイプに水が入り製品が劣化する恐れがあります。
- ◆脚部の破損や転倒の恐れがありますので、座ったままで製品を引きずらないでください。
- ◆転倒の恐れがありますので、背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。
- ◆勢いよく座ると破損や変形、転倒の恐れがありますので、ゆっくりと腰をかけてください。
- ◆座面の穴に指等を入れると抜けなくなる恐れがあります。
- ◆本製品についた汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。
- ◆踏み台のように本製品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。

## 付属品






※はじめにご確認ください。

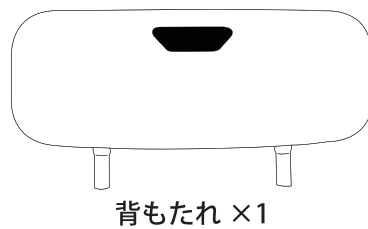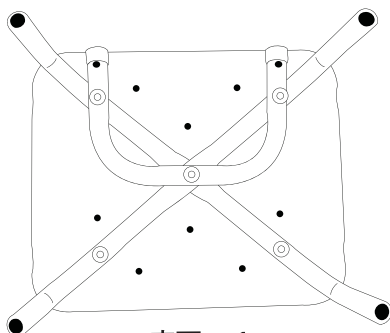

連結パーツ ×4

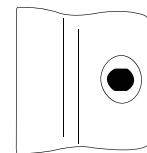


専用ネジ ×8

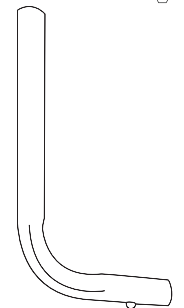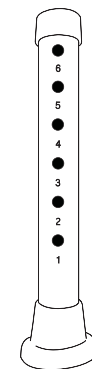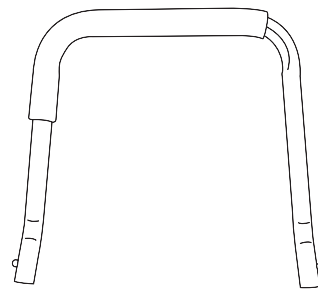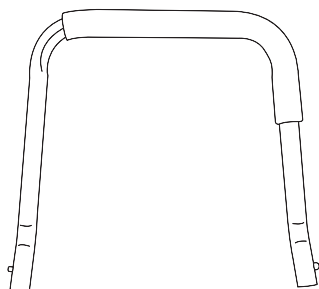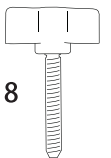


※脚 A と脚 B が別に表記されておりますが、実際は脚 A の内部に脚 B が入っている状態で梱包されています。


# 組み立て方

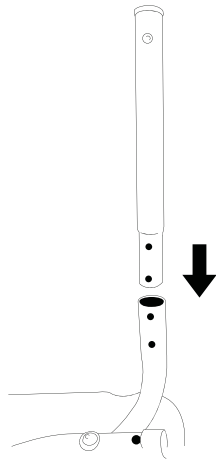


- ① 座面四隅のパイプ部分全てに、穴の位置を合わせるようにして、脚 B を差し込みます。

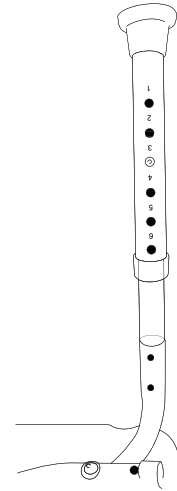


- ② 脚 B に脚 A を差し込み、スナップボタンと、穴の位置を合わせながら、高さを調節します。この時、全ての脚が同じ高さになるよう調節してください。

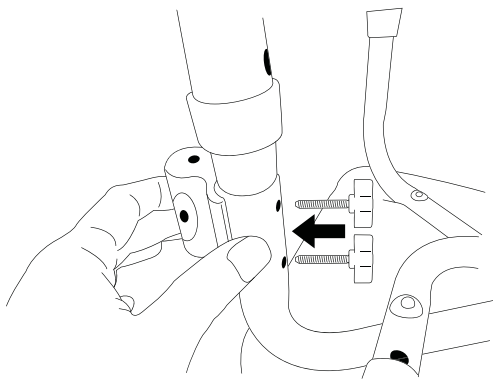


- ③ 座面四隅のパイプと脚 B の穴を合わせた部分に、連結パーツを取り付けます。反対側の穴からネジを差し込み、連結パーツを固定します。

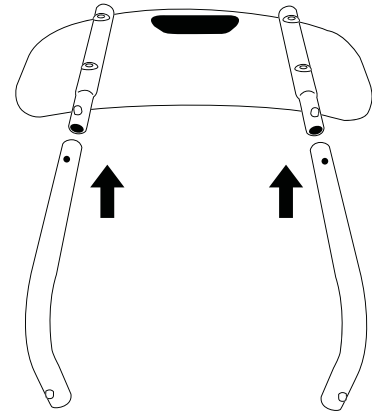

- ④ 背もたれのパイプ部分に、L 字パイプを差し込みます。スナップボタンが、しっかり穴から出ていることを確認してください。

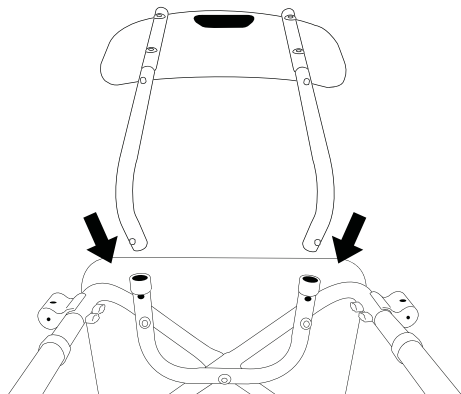

- ⑤ 背もたれに取り付けた L 字パイプを、座面裏の U 字パイプに差し込みます。U 字パイプの穴から、L 字パイプのスナップボタンが出ていることを確認してください。

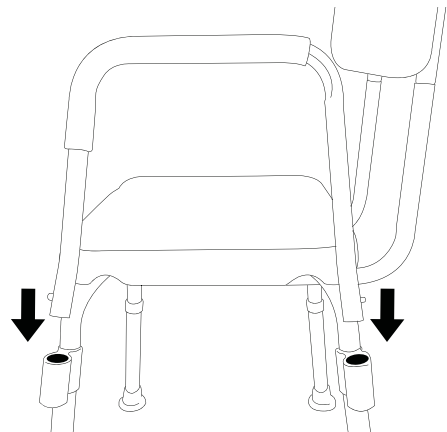

- ⑥ 連結パーツに、ひじ掛けを取り付けます。スナップボタンが連結パーツの穴から出るように差し込んでいきます。反対側も同じように取り付け、完成となります。

