

品名	アウルケア		
	40F	60F	75F
品番	OWL40F-BK1-4040	OWL60F-BK1-4040	OWL75F-BK1-4040
サイズ(mm)/重量(kg)	400×400×40/約1.1	400×400×60/約1.2	400×400×75/約1.4

品名	アウルケア		
	70C	80C	100C
品番	OWL70C-BK1-4040	OWL80C-BK1-4040	OWL100C-BK1-4040
サイズ(mm)/重量(kg)	400×400×70(46)/約1.2	400×400×80(35)/約1.6	400×400×100(55)/約1.6

※()内数値は坐骨部高さ

カラー	本体：ベージュ/カバー：ブラック		
材質	本体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
カバー	表材	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
		マチ	ウレタン合成皮革
		裏材	滑り止め加工付きナイロン

製品/付属品内容：クッション本体1個・専用カバー1枚・取扱説明書(本書類)1枚・保証書1枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL: 0854-54-2288
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88 8F TEL: 045-482-3551
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7 TEL: 0774-98-2633

メールでのお問い合わせ



○エクスジェル®/EXGEL®、アウル®/OWL®は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

OWL40F/60F/75F/70C/80C/100C-INS-JP02

EXGEL
SEATING LAB

OWL CARE

40F



70C



60F



80C



75F



100C



アウルケア(OWL40F/OWL60F/OWL75F/
OWL70C/OWL80C/OWL100C)

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

Made in Japan