



連続
8時間
使用可能

生理中でも快適に

月経カップ・ディスクで毎日を自由に！



一般医療機器


100%医療用シリコーン!

生理って、
こんなに楽だった？



医療機器届出番号：13B2X10459000007

セラフィナカップ・ディスクの構造

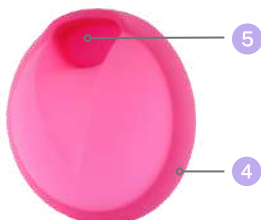


- | | |
|-------|------------------|
| ① ステム | 挿入・取り出し時のガイド |
| ② リブ | 取り出し時の滑り止め用 |
| ③ 目盛り | 経血用を測れる目盛り付き(ml) |
| ④ リム | 経血漏れのないように密着する縁 |
| ⑤ くぼみ | 挿入・取り出し時のガイド |

セラフィナシリーズ 使い方

01 挿入

月経カップ・手指を洗い
スクワットなどの楽な姿勢で
折りたたんだカップを挿入します。

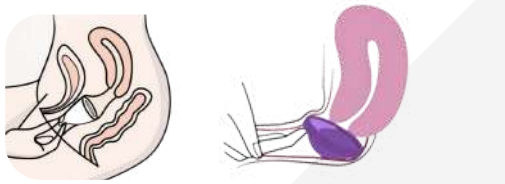

02 取り出す

セラフィナシリーズは
すべて最大8時間使用可能
です。
指でステムやくぼみを掴み
取り出します。

03 洗浄・消毒

カップ・ディスクにたまった
経血を捨て。必ず洗浄・
消毒を行います。
使用後は、収納ケースに
保管しましょう。

※使用前、使用後は必ず煮沸などで消毒・洗浄を行ってからご使用ください。

※使用中に痛み・かゆみが生じた場合直ちに使用をおやめください。

※使用時間は必ず守ってください。

カラー

- ピンク
- パープル
- マーブルオレンジ
- マーブルピンク
- ターコイズ
- ベージュ



RUNA
- ルナ -

メーカー希望小売価格：3,000円

くぼみ付きで簡単に取り出し

ディスクのリム部分にくぼみがついているので、指を引っ掛けるだけで、初心者でも簡単に挿入や取り出しができます。



容器部分に仕切りがある為

ルナを取り出す際に傾いて経血が漏れるのを防ぎます！



100%医療シリコーン使用

セラフィナ月経ディスクは、肌に優しく、敏感肌の方にも安心。医療グレードのシリコーン素材は、アレルギー反応のリスクを減らし、長時間の着用でも不快感なく快適な使用感を提供します。

防漏構造で、45mlの大容量ながら漏れの心配を軽減。忙しい日も安心して過ごせます。



サイズ



サイズ	容量 ml	幅 cm	長さ cm	カップ cm	リム cm	直径 cm
S	30	5.3	6	1.5	1	6
L	45	6.4	7.2	2	1	7.2



MERMAID -マーメイド-

カラー

- マーブル
- ピンク
- ホワイト



メーカー希望小売価格 2,500円

取り出しやすく、挿入しやすい設計

やわらかくしなやかな素材と、膈内での違和感を最小限に抑えたやさしい形状で、初めての方でも安心して使えます。



経血量がひと目でわかる便利なメモリ付き

カップには目盛りがついているので、毎回の経血量を簡単にチェックでき、体調管理にも役立ちます。




リップ（滑り止め）付きでしっかりグリップ！

底部にはリップ（滑り止め加工）が施されており、指が滑りにくく、挿入時も取り出す時もスムーズ。力を入れやすく、操作性も抜群です。



空気穴付きで密閉を簡単解除

装着時や取り出すときにしっかりと空気が抜ける設計。密閉状態をやさしく解除でき、負担を感じずにスムーズな取り出しが可能です。

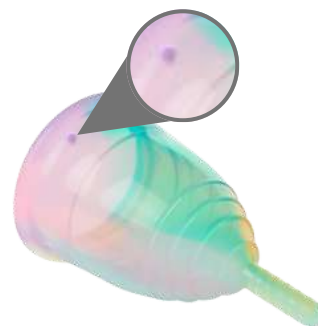


サイズ



サイズ	容量 ml	幅 cm	長さ cm
S	20	4	6.7
L	30	4.45	7

カラー

- ホワイト
- パープル
- マーブル
- ターコイズ

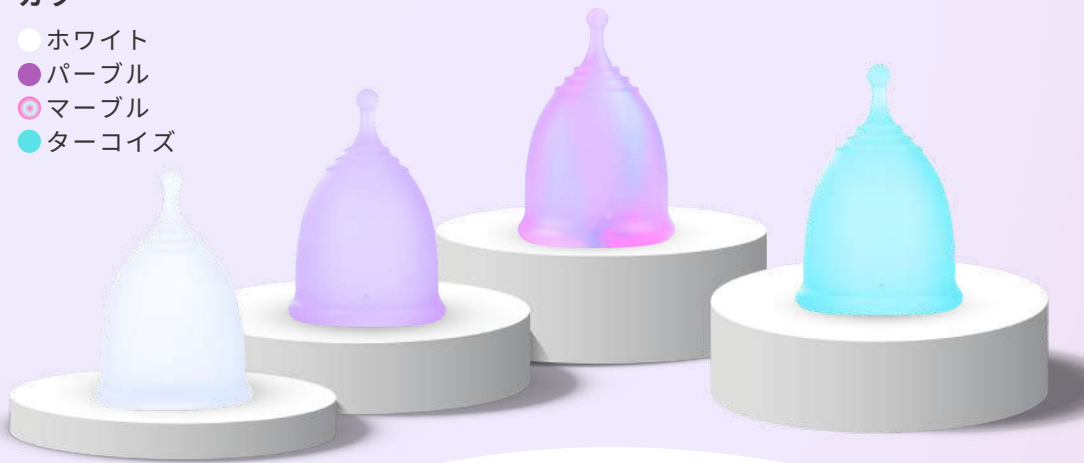

RURI
- ルリ -

メーカー希望小売価格 2,500円

ボールタイプで快適なつけ心地

膣内に接触する面積が少ないコンパクトなボール形状。異物感を軽減し、より自然な装着感を実現！



経血量がひと目でわかる便利なメモリ付き

カップには目盛りがついているので、毎回の経血量を簡単にチェックでき、体調管理にも役立ちます。




リブ（滑り止め）付きでしっかりグリップ！

底部にはリブ（滑り止め加工）が施されており、指が滑りにくく、挿入時も取り出す時もスムーズ。力を入れやすく、操作性も抜群です。



空気穴付きで密閉を簡単解除

装着時や取り出すときにしっかりと空気が抜ける設計。密閉状態をやさしく解除でき、負担を感じずにスムーズな取り出しが可能です。

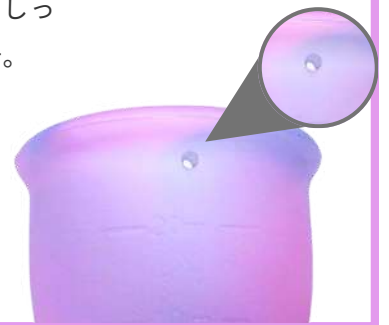

サイズ



サイズ	容量 ml	幅 cm	長さ cm
S	20	4.3	6.3
L	25	4.6	6.9

カラー

- ピンク
- ターコイズ
- ブルー
- パープル



BELL
- ベル -

メーカー希望小売価格 3,000円

取り出しやすく、挿入しやすい設計

やわらかくしなやかな素材と、膣内での違和感を最小限に抑えたやさしい形状で、初めての方でも安心して使えます。



リング付きで取り出しラクラク

リングに指をかけるだけで、力を入れずにスムーズに取り出し可能。初心者にも扱いやすく、毎回のケアがもっと快適に。



かわいくてわかりやすい「指紋デザイン」！

見た目もキュートで、指がすべりにくくて操作しやすい♪挿入や取り出しのときにしっかりフィットして安心。



経血量がひと目でわかる便利なメモリ付き

カップには目盛りがついているので、毎回の経血量を簡単にチェックでき、体調管理にも役立ちます。



サイズ



サイズ	容量 ml	幅 cm	長さ cm
S	20	4.3	6
L	30	4.5	6.8

カラー

- ピンク
- ターコイズ
- ブルー
- パープル



折りたたみ 洗浄カップ

メーカー希望小売価格 2,000円

厚みのある底面&滑り止め付き

厚みのある底面&滑り止め付きで、置いたときも安定感バツグン！

使わないときはコンパクトに折りたためて収納ラクラク♪



円形カップ口で扱いやすい

手にフィットする円形デザインで、洗いやすく注ぎやすい！
毎日のケアにうれしい便利仕様。



使わないときは折りたたんでコンパクトに♪

バッグにすっきり入るサイズ感で、持ち運びにもとっても便利！
旅行や外出先でも大活躍◎



密閉できる防塵キャップ付き

ホコリや汚れをしっかりとガードし、衛生的に保管できます。



< 洗浄簡単3STEP >



月経カップと水を折りたたみ洗浄カップに入れ蓋を閉じます



電子レンジ(500W)で3分温めた後、取り出します



折りたたみ洗浄カップの蓋を開け10分放置し、月経カップを完全に乾燥させてから洗浄カップに保管します



(月経ディスク用)
ハードケース
ソフトケース

カラー
● ピンク
● パープル



カラー
● ピンク
● ブラック

ソフトケースのサイズ


メーカー希望小売価格 2,500円



収納・持ち運びに！
コンパクトで可愛いシリコンケース
※他社製品でも収納可能です。

ハードケースのサイズ

メーカー希望小売価格 2,500円

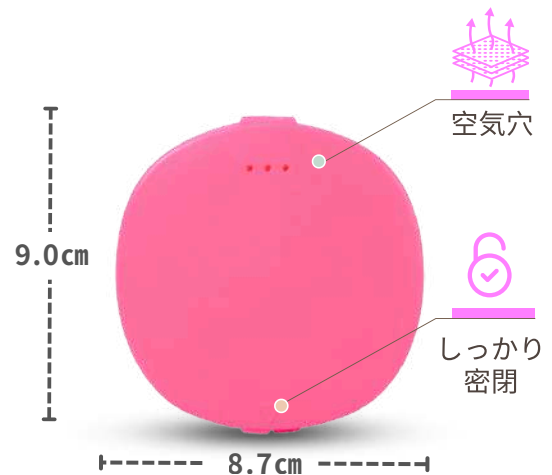

1つあるだけで、保存&煮沸消毒の
2つをする事ができる便利なアイテムです。

< 洗浄簡単3STEP >



月経ディスクと水をハード
ケースに入れ蓋を閉じます



電子レンジ(500W)で3分
温めた後、取り出します



ケースの蓋を開け10分放置し
月経ディスクを完全に乾燥さ
せてからケースに保管します

月経カップ&ディスクの 新しい洗い方

えっ、こんな方法 あったの!?



紫外線(UV)洗浄クリーナーボックスメーカー希望小売価格 5,000円
セラフィナクリーンウォーターメーカー希望小売価格 オープン価格

消毒の新しい選択肢!



- point**
✔ ボタン1つでOK!
月経カップ消毒がたった
2分で完了
- point**
✔ 持ち運び自由!
USB&乾電池対応の
消毒ボックス
- point**
✔ 火傷を防ぐ安心設計!
耐久性抜群のABS素材で
安全消毒

3ステップで清潔・安心!

① 洗浄・セット

使用後の月経カップや月経ディスクを軽く水洗いし、
クリーナーボックスにセットします。

② 蓋を閉め、消毒開始

クリーナーボックスの蓋をしっかりと閉め、
電源ボタンを押して紫外線消毒を開始しま
す。消毒時間は約2分です。

③ 消毒完了後、取り出し

2分の消毒が完了したら、蓋を開けて
アイテムを取り出します。清潔で衛生
的な状態で使用できます。



外出先での月経カップ洗浄にお困りの方へ



セラフィナ クリーンウォーター

『セラフィナクリーンウォーター』で簡単ケアを実現! 煮沸が難しい環境でも、この洗浄液がしっかり清潔に保ち、敏感肌にも優しく使えます。消臭効果もあるので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。

医療機器メーカーが開発!
臨床実験済みの信頼品質!



臨床実験
済み

安全性

殺菌力

私らしい生理を応援するパートナー



Serafina Cup

ソーシャルメディア公式アカウント



FUJI MEDICAL
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

〒123-0863

東京都足立区谷在家1-19-7

TEL : 03-5856-8047

FAX : 03-5856-8048

Mail : fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp

販売業者：