

⚠️ 安全上のご注意

取扱いを誤ると事故、故障および破損につながる場合があります。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


【禁忌・禁止】

次の症状のある患者には使用しないでください。

1. 頸椎脱臼、頸部結核、腫瘍、熱のある人。
2. 頸椎骨折で嚴重な固定が必要な人。
3. 中・重度の頸椎症のある人。
4. 皮膚損傷、出血傾向のある人。
5. 重大な心疾患、脳血管疾患のある人。
6. 認知症、意識障害のある人。

● 各部の名称

【本体】

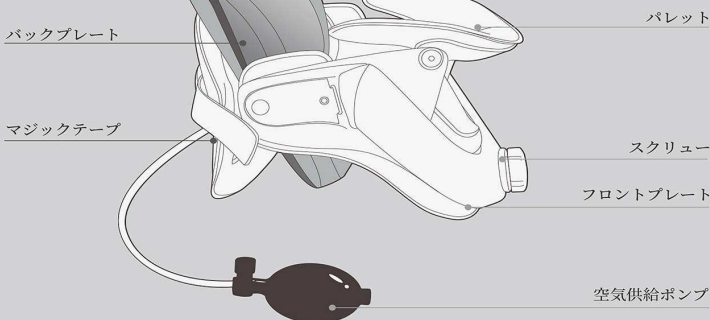

● 保証とアフターサービス

本製品には、保証書が付いています。

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。

修理を依頼する時

保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の記載内容により、無償修理を致します。

万が一、本体等を落としたり、破損したりした場合は、点検修理を依頼してください。
(有料サービス。)

使用に伴う消耗による部品の交換及びメンテナンス費用は、保証期間であっても有料となります。

点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

⚠️ 使用上のご注意


【使用注意】

1. 本品に破損等がないことを確認してください。
2. 装着に際して、締め付けすぎず、緩みすぎず、適正な締め付け具合に調節してください。
3. 1回の使用は、10～30分程度とし、続けて使用する場合は、一旦はずし、適度な休憩をとった後、再度装着してください。
4. 装着時に何らかの活動及び運動をする場合は、頸部が圧迫されないよう、極度に首を曲げないようにしてください。
5. エアーバッグを用いる時は、呼吸困難、不快感が生じないように本体装着時、マジックテープを締め付けすぎないようにしてください。
6. エアーバッグの空気充填時、息が苦しくなる等の不快感が生じた場合は、直ちに空気の充填を中止してください。

【重要な基本的注意】

1. 感知、知能、経験及び認知が不足している人、又は子供の使用の際は、保護者等の付き添いなしでは使用しないでください。
2. エアーバッグ装着時、バッグが破裂しないよう、硬いもの等によぶつからないようにしてください。

● 構成品

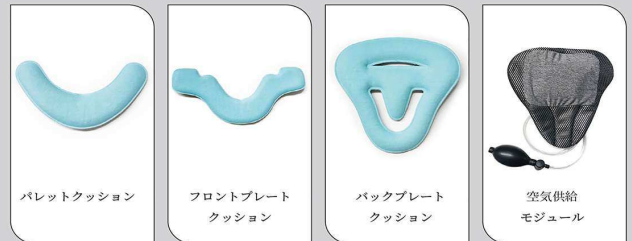

● 使用目的又は効果

頭頸部を固定して、頸椎や脊髄を保護し損傷を防止する。

アフターサービスについて不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合せください。

業者情報

〈発売元〉

極楽島製薬株式会社
東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F
TEL:03-5284-8296
<http://techlove.jp/>

〈製造販売業者〉

〈製造業者〉
株式会社ノイフルス
静岡県静岡市駿河区西脇913番地

SMART NECK BRACE




● 製品仕様

製品名称	Tech Love ネックストレッチャー
品番	TL028A
色	ミントグリーン
サイズ	255(長さ) × 200(高) × 170(幅)mm
重量	約260g
パレット可動域	37mm
材質	フロントプレート：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、高密度ポリエチレン
	バックプレート：ポリアセタール、ABS樹脂
	クッション：フリース、トリコット、スポンジ
製造国	日本
発売元	極楽鳥製薬株式会社
ロット番号	本体定格銘板を参照してください
バージョン番号	J-05

※ 外観及び仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

● 期待される効用

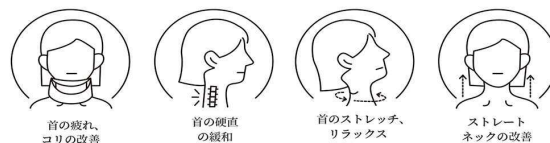

● 保管・お手入れの仕方


【保管方法】

1. 高温、多湿な環境を避けて保管してください。
2. 熱又は直射日光を避けて保管してください。
3. 本品の上に重い物を置かないでください。
4. 子供の手の届かない所に保管してください。


【保守・点検に係る事項】

1. 本品に破損等がないことを確認してください。
2. 本体部の汚れは、水拭きし、十分に乾燥させてください。
3. クッションの汚れは、水又は薄い洗剤を用いて落としてください。
4. 柔軟剤、漂白剤は、使用しないでください。


● 使用方法

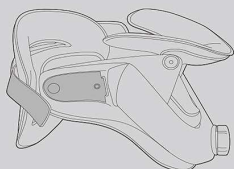


1. フロントプレートとバックプレートを左右のうち、片側のマジックテープをはずします。

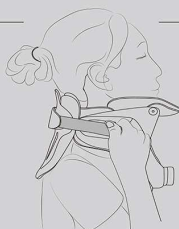

2. フロントプレートを前にバックプレートを後ろにして装着し、反対側のマジックテープを止めます。

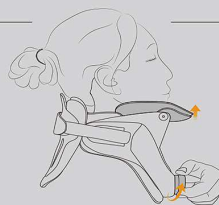

3. パレットをはじめは一番低い位置から始め、前方に顔を向けた姿勢でスクリューで徐々に固定したい高さまで調節します。

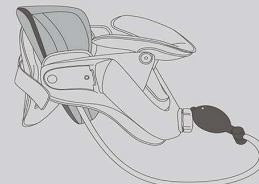

4. バックプレートクッションは、バックプレートの内側に装着し、前後の位置の調節に用います。

■ 空気供給モジュールを使う時

バックプレートクッションによる前後の位置の調節が不十分な場合は、空気供給モジュールをバックプレートクッションの装着位置に装着し、エアバッグに空気を充填することにより、前後の位置を調節します。

※【注意】空気の入れすぎに十分注意してください。

保 証 書

製品名 Tech Love ネックストレッチャー TL028A	お客様 お名前： 電話番号： ご住所：	無償修理保証期間 お買い上げ日： 年 月 日 より6ヶ月間
<p>本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。 本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。 無償修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。 正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。</p>		<p>【無償修理規定】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理若しくは交換いたします。 2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 3. 保証期間内であっても次のような場合は、有償修理となります。 <ul style="list-style-type: none"> ① 使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。 ② お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。 ③ 地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。 ④ 外力による本体の変形や変色。 ⑤ 消耗品の消耗による交換。 4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とします。
<p>製造に対するお問い合わせ先 発売元・住所・TEL 極楽鳥製薬株式会社 東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F TEL:03-5284-8296 お問い合わせ受付時間：10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)</p>		<p>取扱販売店 住所・電話番号</p>