










Tech Love 電動鼻用洗淨器

TL116A

## 図記号の説明 図形、記号、略語

	軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。		取扱説明書をよくご覧ください
	BF型装着部	IPX7	水の有害な侵入に対する保護の程度による分類
	交流電流		直流電流
	電気製品の環境にやさしい使用期限		
 Li-ion	当製品の包装は、お住まいの地域ごみ分別ルールに従って出してください。 製品を廃棄するとき、自分で分解しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。		

※ ご使用前に取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

# 製品紹介

## ● 用途・期待される効用

用途：鼻腔の洗浄


## ● 期待される効用

- 1、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、上気道感染症治療の助けになり、鼻炎を予防する
- 2、鼻詰まり、鼻水、分泌物過多などの症状を緩和する

## ● 付属品

- |        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| ①本体×1  | ②ウォータータンク×1 | ③鼻洗浄用精製塩×3 |
| ④ノズル×2 | ⑤取扱説明書×1    | ⑥充電ケーブル×1  |

## ● 製品紹介

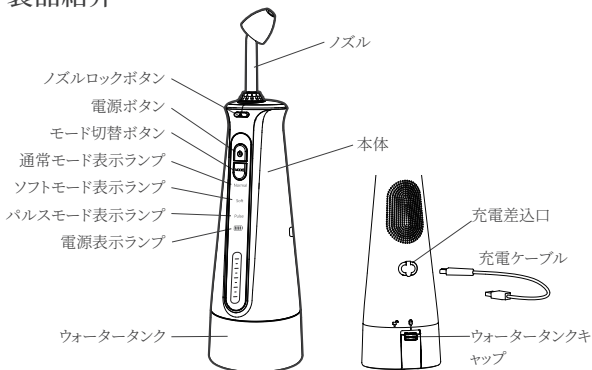

## ● 付属品について

- 1、ウォータータンクとノズルは取り外し可能です。
- 2、感染を防ぐため、ノズルを他の人と共用しない。
- 3、ノズルは消耗部品であり、三ヶ月ごとに交換をオススメします。交換部品を購入する際、販売元のものをご購入してください

# 注意事項



## 警告

ご使用する前に、下記の内容をよくご覧ください

### ● 感電を防ぐために：

- ❶ 濡れた手で抜き差ししない
- ❷ 水などの液体に浸けない
- ❸ シャワーやお風呂に入る時に使用しない
- ❹ 浴槽、シャワー、洗面器もしくは水を入った容器の近くに保存もしくは放置しない。
- ❺ 充電中に本体が水没した場合、直ちにACアダプターをコンセントから抜きます。本製品を触らない。
- ❻ 使用するごとに、充電ケーブルが破損しているかどうかを確認します。

### ● 火傷、電気ショック、火災、損壊を防ぐために

- ❶ 本製品は充電式となっています。認証済みのUSB-ACアダプター5Vを使用してください（付属しない）。初めて使用前にフル充電をしてからお使いください。
- ❷ 充電ケーブルが損傷あるいは本製品の不具合が発生した場合は、直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- ❸ 本製品はリチウム電池が内蔵しております。温度が高すぎたり低すぎたりするの環境に使用しない。-5℃～35℃の周囲温度でのご使用をおすすめします。
- ❹ 清潔、通風がよい、断熱、防湿、防塵、有毒ガスや腐食性のない環境で使用する。
- ❺ 使用場所は屋内のみ、屋外で使用しない。
- ❻ 電磁干渉を回避するために高周波医療機器又はその他の高周波機器の近くで保管・使用しない。
- ❼ 本品は鼻を洗浄する機器の為、別の用途や別の部位に使用しないこと。
- ❽ 鼻のアクセサリを取り外してから使用する。
- ❾ 酸素や噴霧器を使っている場合に使用しない。
- ❿ 電気ストーブ、オーブンの近くなど保管・使用しない。本製品が破損の原因になります。
- ⓫ ノズルや電池の差込口に異物を挿入しない。
- ⓬ 鼻腔器質性疾患のある方は医師の指示のもとで使用ください。

# 注意事項



## 警告

ご使用する前に、下記の内容をよくご覧ください

### ● 子供による使用

- ❶ 5歳以下の子供に使用することはおすすめしません
- ❷ 5歳以上の子供は保護者の指示のもとでご使用ください。

### ● お手入れ方法

- ❶ 本製品の寿命は3年。ノズルの交換時期の目安は三ヶ月です。
- ❷ 本製品は周囲環境温度-16℃～+60℃、湿度90%以下の環境下で保存ください。直射日光が当たらないところに保存ください。
- ❸ 鼻の洗浄後、精製塩により、本製品の腐蝕を防ぐために、まず電源をオフして、ウォータータンクに残るの精製塩水を捨てます。そしてウォータータンクに約100mlの水を入れ、水がなくなるまでご使用ください。
- ❹ 柔らかな布で拭きます。
- ❺ ウォータータンクを洗い流したいなら、ウォータータンクを取り外してから洗い流します。
- ❻ 水もしくは専門医師が推奨する洗浄剤だけに使用ください。普通の洗浄剤は沈殿物が残ることがあり、詰まりの原因になります。
- ❼ 注意：いくつかの抗菌洗剤を使用することや水に浸けることは本製品の損傷や耐用年数の短縮の原因になります。
- ❽ 使用后、ノズルを水で洗い流し、しっかりと乾かしてください。
- ❾ 電源の耐用年数は使い方と関わります。バッテリー残量が低下でも、事故にならないのですが、過度に使用すると、電源の構造を破壊することになるので、バッテリー残量が低下時に充電してください。また、過度受電しない。
- ❿ 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。
- ⓫ 月ごとに本製品を充電してください。

# 使用方法

## ● 洗浄・消毒

### ※重要提示：

本製品は再使用可能な滅菌医療機器ではなく、初めて使用する前に洗浄・消毒が必要です。ノズルとウォータータンクを取り外してから洗浄・消毒します。本体と一緒に洗わない！

### ※洗浄方法：

手で洗う（推奨水温15℃～30℃）

### ※消毒方法：

93℃～100℃の純水をウォータータンクに入れ、1分そのまま放置してから水を捨てます。

## ● 鼻洗浄液の作り方

本製品と鼻洗浄液の併用をオススメ：

### ※主成分：

塩化ナトリウム（塩）

### ※使用方法：

2.7gの鼻洗浄液と300mlの水を混ぜます。水温は37℃～40℃程度オススメ

下記の水のみ使用可能です


蒸留水&滅菌水（店で購入可能、「蒸留」または「滅菌」ラベルがある水を推奨）  
フィルターを使った水

### ※注意事項：

他の鼻洗浄液を利用している場合は、当該の取扱説明書をお読みください

# 使用方法

## ● 操作方法

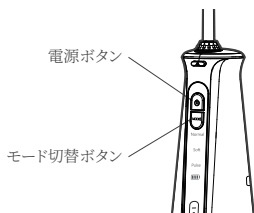

### 1、ボタン

※電源ボタンを1秒長押しすると、電源オンになります。再び電源ボタンを押すと、電源オフになります。

※モード切替ボタンを押すと、通常、ソフト、パルスモードの順に繰り返します。モードの表示ランプも青いランプが点灯しています。

※初めて起動する時に、通常モードになります。2回目以降の場合は前回、シャットダウン時に同じモードになります。


### 2、バッテリー残量表

※バッテリー残量不足時に、電源表示ランプが赤く点滅します。バッテリー残量不足時は電源がオンになりません。充電してからご使用下さい。

※充電する時、電源表示ランプがバッテリー残量不足からフル充電まで、赤、青、緑の順に点滅します。緑電源表示ランプが点灯している場合は、フル充電となります。

※充電しながら、使用できません。

注意：初めてご使用する際にはフル充電してください。

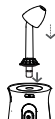

### 3、ノズルの取り付け／取り外す

※取り付ける：ノズルを本製品の上にある差込口に「ピッ」という音が聞こえるまで、差し込んでください。

※取り外す：本体のノズルロックボタンを押しながらノズルを取り外してください。

### 4、ウォータータンクに注水

※後ろにあるウォータータンクの蓋を開け、水若しくは鼻洗浄液を入れてください。


※ウォータータンク容量は最大230mlである

下記の水のみ使用可能です

※蒸留水&滅菌水


(店で購入可能、「蒸留」または「滅菌」ラベルがある水を推奨)

※フィルターを使った水

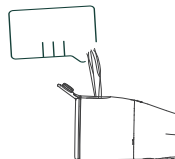

# 使用方法

## ● 操作方法

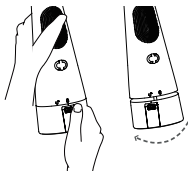

### 5、ウォータータンクを取り外す

※ 左手で本体を握って、右手でウォータータンクを反時計回りに回して、「カ」という音が聞こえたら、下に取り外すできます。

## ● 鼻うがいの方法

※電源オンにして、好きなモードを選びます

※口で呼吸しながら、ゆっくりとノズルを鼻孔に合わせます（鼻腔を完全に塞がないでください）

※水は一つの鼻孔に入れ、もう一つの鼻孔から出します

### 使用ヒント：

※ 本製品を起動する時に、すぐ水流が噴出します。

※ 初めてのご利用の際は“ソフトモード”をオススメします。

※ 洗浄する時に、しゃべらず口で呼吸し、飲み込む動作しない。

※ 左の鼻孔を洗浄する場合は、水が右の鼻孔から出るように、頭を右に傾けてください。

※ 舌全体を上あごに吸い付けます。（水を鼻孔から出するための動作です）

※ 5分以上の使用は控えてください。



## 警告

### 【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

以下の患者には使用しないこと。

- ・ 中耳炎にかかっている場合。
- ・ 風を引いている時及び鼻づまりがある時。（症状が悪化する恐れがあります。）
- ・ 鼻や耳に出血や外傷、外耳道炎などの疾患がある場合。（症状が悪化する恐れがあります。）
- ・ 鼻腔器質性疾患のある方は医師の指示のもとで、使用すること。（症状が悪化する恐れがあります。）
- ・ 酸素吸入器や噴霧器を使っている場合。（有害事象の発生につながる恐れがあります。）
- ・ 中耳に大きな圧力を与え、不快感を覚えることがある時。
- ・ 何度も試しても、別の鼻や口から出てこない



## 点検・処置

使用中異常がある場合、下記の点検と処置をお願いします：

故障	考えられる原因	処置
水が出ない 水圧が弱い	バルブが老朽化した	バルブを交換する
ノズルが割れた	ノズルが摩損された	ノズルを交換する
ウォータータンクから漏水する	1、中に排出口がなく、ウォータータンクの周辺から排出する 2、底部から漏水する"	1、故障ではありません 2、修理・交換する
起動しない	モーターが稼働しない	1、ノズルが詰まっているか。 2、電源ボタンは異常がないかを確認ください。

### 注意：

- ※ 1. バルブやノズルを交換する場合は、販売元に問い合わせください。
- ※ 2. 処置後なお異常がある場合、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。自分で分解・修理をしないでください。

# 製品情報

## ● 製品使用

販売名	Tech Love 電動鼻用洗浄器
一般的名称	電動式生体用洗浄器
品番	TL116A
定格電源	5V $\equiv$ 1A
定格電圧	3.7V $\equiv$
消費電力	5W
電池容量	約1400mAh
満充電時間	約4時間
稼働時間	約2分
使用可能時間	満充電の場合2週間（2回/日）
サイズ	Ø73.2×204mm（±10mm）
正味質量	250g（±25g）
材質	ABS樹脂、シリカゲル
製造業者	Nicefeel Medical Device Technology Co., Ltd.
製造販売業者	株式会社ICST
ロット番号	ラベルを参照してください
バージョン番号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

# 保証書

販売名/品番	Tech Love 電動鼻用洗浄器 TL116A
お客様	お名前:
	ご住所:
	お電話番号:
無料修理保証期間	お買い上げ日 年 月 日 より12ヶ月間

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理若しくは交換いたします。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
  - ①使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
  - ②お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
  - ③地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
  - ④外力による本体の変形や変色。
  - ⑤消耗品の消耗による交換。
- 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

製品に対するお問合せ先 極楽烏製薬株式会社 東京都足立区千住宮元町12-12-303 TEL.03-6822-3536 お問合せ受付時間：10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)	取扱販売店 住所・電話番号
---	---------------

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries