

布アイパッチ

斜視・弱視 訓練用

左右 兼用

日本製

全2色

お子さまの斜視・弱視訓練に


- メガネに装着するタイプのアイパッチです。
- 肌に直接貼らないので、粘着剤でかぶれやすいお子さまにもご使用いただけます。
- 肌に直接触れる裏生地に綿100%素材を使用しています。
- 裏生地に黒い布を使用していますので、光を遮ることができます。
- 眼鏡のテンプル(つる)部、及びレンズ部をワンタッチテープで固定し簡単に装着することができます。
- 様々なサイズ・形状のメガネに装着できます。
- 手洗いすることで繰り返しご使用いただけます。

アイパッチとは...


小児の斜視・弱視の訓練方法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達をうながす眼帯です。




使用方法

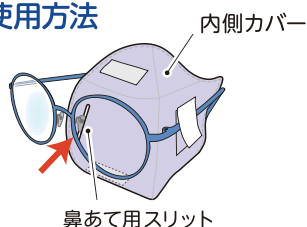

①本体を広げて、スリットにメガネの鼻あてを差し込みます。

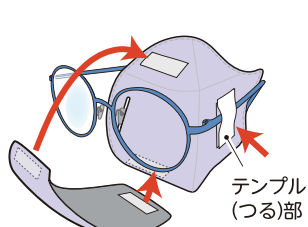

②側面のワンタッチテープでメガネのテンプル(つる)部を固定。

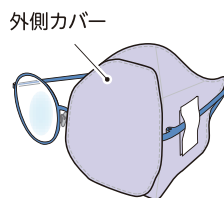

③メガネのレンズを覆うように外側カバーを取り付けて完了。

監修商品

みるみる伸ばそう、みるみるみるみる プロジェクト

子どもの眼を守り育てる
保護者・眼科・メガネ店・メーカー
連携支援プロジェクト

<https://mirumirunet.com/>

コードNo.	品名	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)／重量	JANコード ITFコード
035-152700-00	布アイパッチ子ども用 赤 1枚	オープン	108個 (36個／箱×3箱)	【個装】180×100×8／約14g 【ケース】250×375×270／約2.3kg	
035-152710-00	布アイパッチ子ども用 青 1枚				4 987601 581496 14987601581493
					4 987601 581502 14987601581509

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00～17:00月～金ただし祝日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

●ご注文・お問い合わせは