

医療従事者の方々と開発した
軽い・ずれない・痛くない

HMアイシールド



made in Japan
東大阪



超軽量
17g



病院で
使われています



メガネOK
前髪
くずれない



男女兼用
選べる3色

これまで医療機関や大学などを中心に累計50,000個以上
納入してきた「HMフェイスシールド」の姉妹品
「HMアイシールド」は、モノづくりの町東大阪で
製造されている超軽量のアイシールドです。
メガネの上から着用可能で且つ額を押さえつけないので
前髪やお化粧がくずれにくい構造になっています。



ブラック

ピンク

クリア



額に触れない構造



ポリカーボネート製
フレーム

超軽量

ずれない・疲れない

メガネOK
前髪・お化粧
くずれない

日本製

made in 東大阪

男女兼用

顔の大きな方も
痛くない

組み立て方法

PAT.P

シールドサイズ：W280×H90mm


材質 シールド：PET
フレーム：ポリカーボネート



台紙



外装：PP

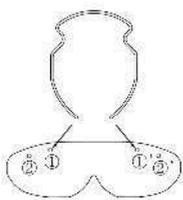

STEP 1

フレームの先端をアイシールド
の内側の穴①と①'～②と②'に
差し込んでください。



STEP 2

左右の穴に差し込みましたら、
アイシールドがフレームに沿う
ように奥にずらしてください。

使用上の注意

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・本製品は飛沫を防止するものでウイルスを完全に防ぐものではありません。
- ・シートの端で手指を傷つける可能性がありますので注意してご使用ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・火気のそばでのご使用はおやめください。

販売元

化学工業株式会社



東大阪ブランド認定企業

〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺1丁目5-22

TEL：06-6728-3222

製造元：株式会社花谷紙工

〒577-0826 大阪府東大阪市大蓮北4丁目2-27

HMアイシールド
HMフェイスシールド
詳しくはこちら

