

医療用品 (4) 整形用品
一般医療機器 皮膚接合用テープ
JMDNコード 70438000
ファスナート™
FASNAHT™

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエステル不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した皮膚接合用粘着テープである。

本品は滅菌済みである。

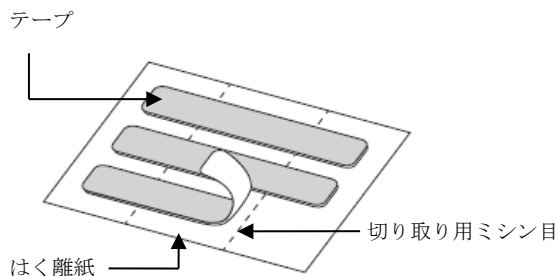

品番	サイズ
FN0438	4mm×38mm
FN0476	4mm×76mm
FN0619	6mm×19mm
FN0638	6mm×38mm
FN0676	6mm×76mm
**FN1235	**12mm×35mm
FN1276	12mm×76mm

【使用目的又は効果】

皮膚創部の閉鎖、接合又は補強等に用いる。

【使用方法等】

準備：

- 1) 本品を使用する前に、貼付部位及びその周辺の皮膚を洗浄・消毒し、皮膚をよく乾かす。
- 2) 使用目的、貼付部位にあったサイズを選択し、使用する直前に包装を開封する。

貼付：

- 1) はく離紙にあるミシン目に沿って、はく離紙の一方を切り取る。
- 2) テープの端を、手袋を着用した指や鑷子等で持ち、はく離紙からテープをはがす。
- 3) 創部の中央に、創部に対して直角の向きになるようにテープの半分を貼付する。
- 4) 手袋を着用した指や鑷子等で創縁を引き合わせ、皮膚に緊張がかからないようにテープの残り半部分を貼付する。

- 5) 複数のテープを貼付する場合、他のテープと約3mmの間隔をあけて平行に貼付する。

除去：

- 1) 創部が裂開したり皮膚を傷めたりしないよう、ゆっくりはがす。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないこと。
- 2) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 3) 本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark