

子供の注射の痛みを和らげる **超柔軟冷却ゲルパッド**

# ぷにゅ蔵くん



しっかりと冷やして  
注射の痛みを軽減!

## 穿刺痛低減アイスパック



★CRYSTAL GEL

伸縮性にも優れた素材「クリスタルゲル®」を使用  
肌当たる部分には、タナック独自配合の超柔軟ゲル素材  
(クリスタルゲル®)を使用しているので伸びた後も歪む  
ことなく元の形に戻ります。医療の現場でも使用されて  
いる安全性の高い素材です。



クリスタルゲル®と保冷ジェルの組み合わせた  
超柔軟冷却ゲルパッドだから肌当たりも抜群。  
局部を包み込むように冷却します。

## 性能評価

医療機関にて臨床研究を実施し、  
子どもの疼痛(とうつう)評価指標  
である FLACC スケールにて統計的に  
有意差があることが確認されました。



## 使用方法


- 1 冷凍庫内で3～4時間ほど冷却して下さい。
- 2 冷却された「ぷにゅ蔵くん」を取り出し、  
接種部位に30～60秒あてがってください。
- 3 「ぷにゅ蔵くん」を肌から外したのち、  
60秒以内に皮下注射を行ってください。




※医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用下さい。

## ぷにゅ蔵くん 30秒使用後の肌表面温度の変化

肌表面温度は約13～14℃急速低下。  
柔軟ゲルだから患部を面で優しく冷却します。

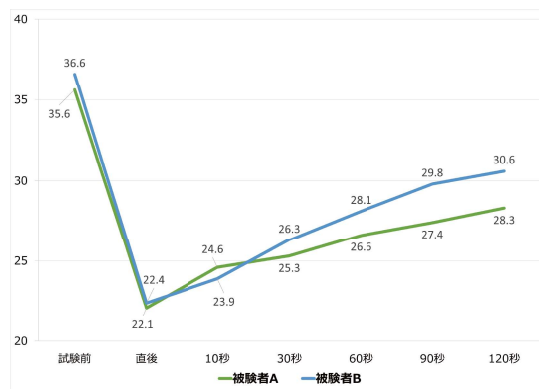

冷却前 — 冷却直後 — 30秒 — 60秒

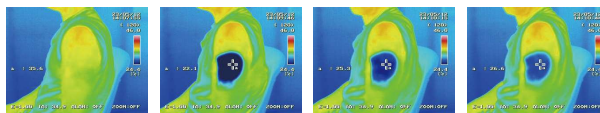

\*試験条件: 家庭用冷凍庫(-18℃設定)にて冷却した製品を  
約26℃環境下にて試験実施。

類別	器 12 理学診療用器具	一般医療機器 一般名称	冷却パック(コード: 37240020)	届出番号	21B3X10017000001
販売名	ぷにゅ蔵くん 穿刺痛低減アイスパック	JAN	4589720791031	品番	67-5761-81
		サイズ	約15.5×13cm	ケース入数	6個



TEL : 058-263-6381  
FAX : 058-263-6382

製造販売元: 株式会社タナック  
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町 4-24

タナック公式サイト  
<https://tendersense.jp/>

