


医療廃棄物容器ホルダー SK-F ご使用方法

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

各部名称

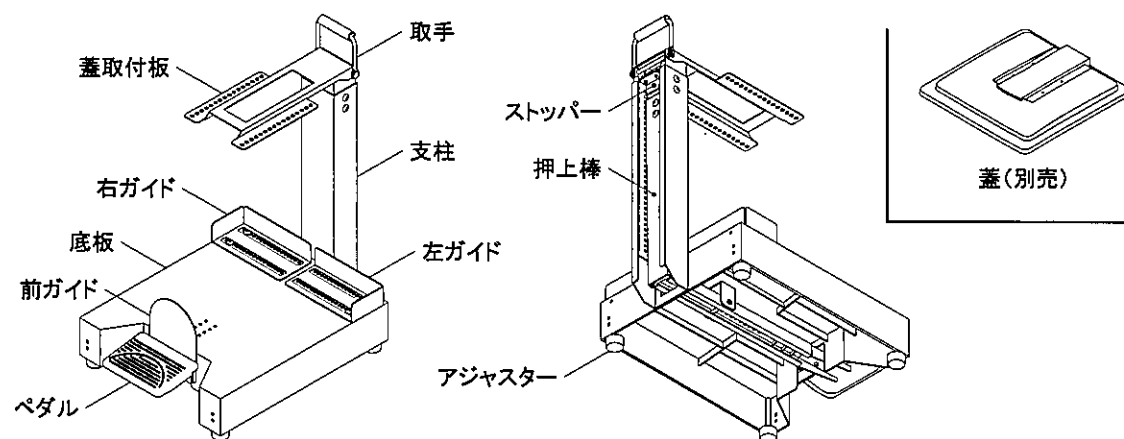


サイズ変更手順

※ねじの締め付けにはプラスドライバーをご使用ください。

1. ガイドを広げる

左右ガイドとペダルを固定しているネジ(6本)を外し、それぞれを最大の位置までスライドさせ仮止めしてください。


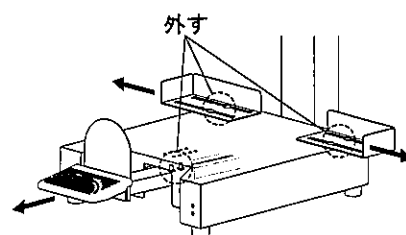


2. 支柱を仮止めする

※安全のため、取手を持ち、本体上部が落ちないように、保持した状態で作業を行ってください。

1. 支柱と押上棒を固定しているネジ(6本)を外します。(図1)


2. ご使用になる容器を置き、蓋取付板が容器より3cmほど上になるように支柱の高さを調整して、ネジ(左右1本ずつ)で仮止めします。(図2)(図3)

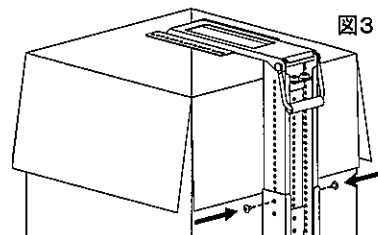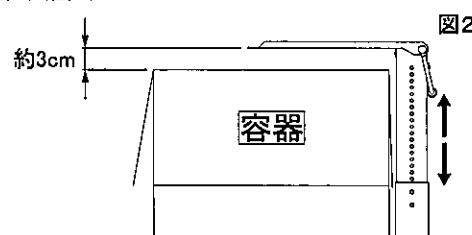

3. 左右ガイドの調整

① 容器の幅が300mm以上の場合




左右ガイドを固定しているネジ(4本)を外し、容器が本体中央に配置されるよう、左右ガイドを均等に調整し、ネジ(4本)を締め付けて固定してください。(図1)

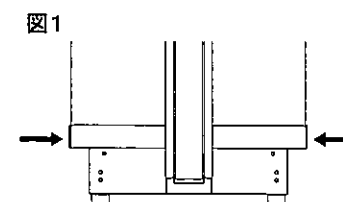

② 容器の幅が300mmより小さい場合

1. 左右ガイドを固定しているネジ(4本)を外します。(図2)

2. 容器に合わせてガイドの左右と向きを組み替えて固定してください。(図3・図4) ※3段階の調整が可能

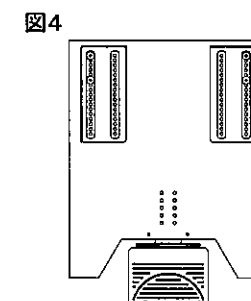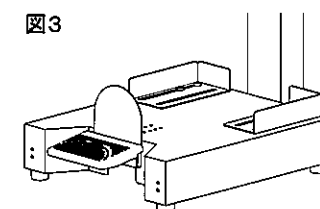
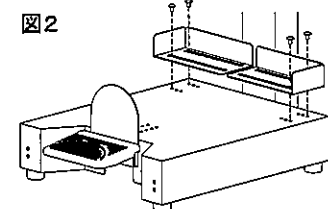


4. ペダル・前ガイドの調整

① 容器の奥行きが300以上の場合

1. 仮止めしたネジを外し前ガイドが容器に当たる位置まで、ペダルをスライドさせてください。(図1)

2. ペダルが動かないように押さえながら、本体をゆっくりと後方に倒し、底面のネジ(2本)を締め付けて固定してください。(図2)

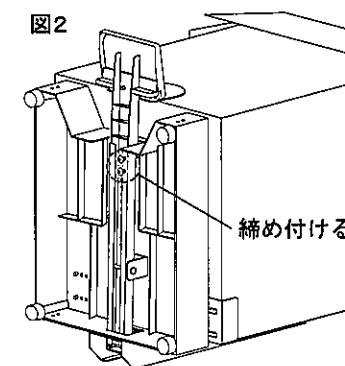
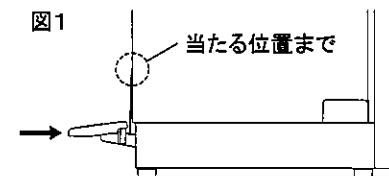


② 容器の奥行きが300mmより小さい場合

1. [手順①]を参考にペダルを一番短い位置で固定してください。


2. ペダル先端部品を外し、前ガイドを固定しているネジ(2本)を外します。(図3)

3. 使用する容器に合わせ、底板の取付穴に前ガイドを取り付けてください。(図4) ※5段階の調整が可能

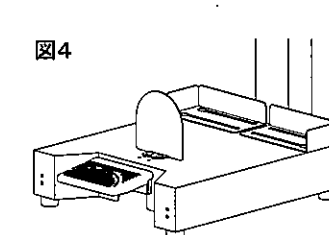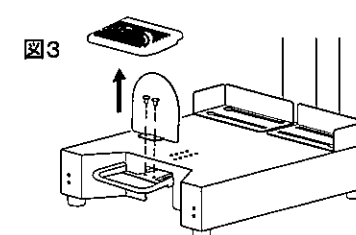



5. 蓋の取り付け

横から見て、蓋と容器のセンターが合うように位置を調整し、付属のネジとナット(4本)で蓋を仮止めしてください。

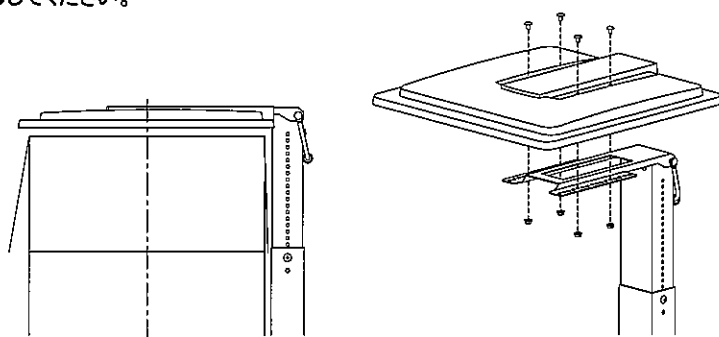


6. 支柱の調整

1. [手順2]で支柱を仮止めしているネジを外します。
2. 容器をセットした状態で、蓋が水平、もしくは若干の前傾となるように支柱の高さを調整し、ネジ(左右1本ずつ)で仮止めしてください。

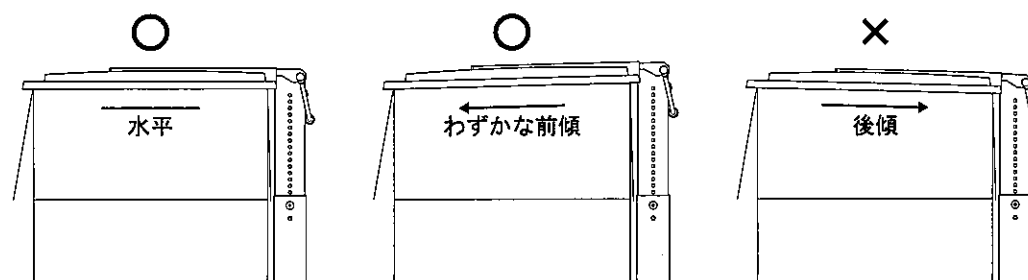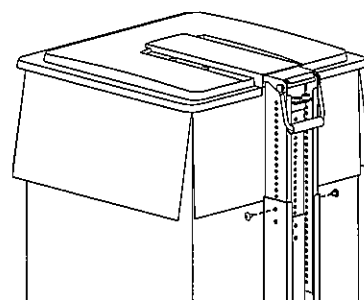



7. 押上棒の調整

ペダルを持ち上げた状態で、押上棒の内側と外側の部品の重なり合う穴を、ネジ(1本)で仮止めしてください。

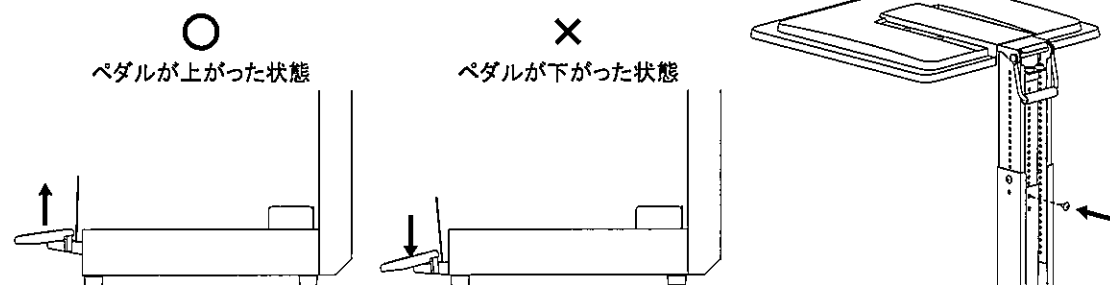

8. 動作の確認

1. ゆっくりとペダルを踏み込み、蓋の動作や位置を確認してください。問題がある場合は前の項目に戻り、再度、調整を行ってください。(図1)
2. 残っているネジ(3本)と、支柱・押上棒・蓋を仮止めしているネジ(7本)を締め付けて固定してください。(図2)

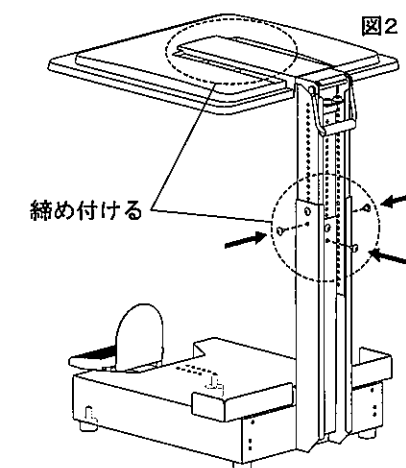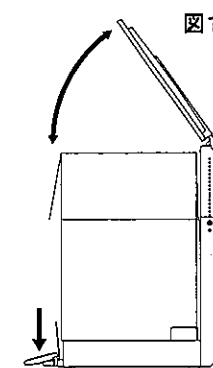

9. 完成

全てのネジで締め忘れがないことを確認して、完成です。
下記の注意事項をご確認いただき、正しく安全にお使い下さい。

- 器具の破損や、容器のズレ、廃棄物の飛散を防ぐため、ペダルはゆっくりと踏んでください。
- 蓋は最適な角度で止まるように設定しております。蓋が開ききりましたら、それ以上踏み込むことはお止めください。
- 本体を移動させる場合は取手を持ち、本体が水平な状態で移動してください。

