

WILLCURE



牛用コルセット

使いやすく
リニューアル!

子牛の出べそに

腹部を固定するメッシュタイプのコルセット

装着例



撮影協力：NOSAI兵庫

牛にやさしく、人にやさしく


～ 安心して子牛を市場に送り出しましょう ～

製品
特長

- 腹部にフィット
- 通気性が良く、蒸れにくい
- 着脱容易なファスニングテープで調整自由自在
- 新ファスニングテープで
くい込みにくく、切れにくい!

ファスニングテープの
厚み、強度がアップしました!

製品特長

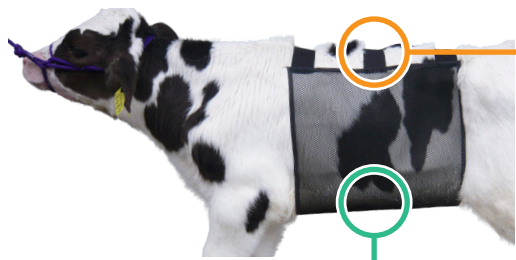

メッシュネット

① 腹部にフィット

適度な弾力と強度のあるメッシュネットが腹部にフィット

② 通気性が良く蒸れにくい



※メッシュネット拡大写真

【参考文献】 NOSAI兵庫：「子牛のヘルニアネットの考案と使用効果」、家畜診療、53 [8]、P.487-490、(2006)

ファスニングテープ


使いやすく
リニューアル!

① 簡単着脱、調整自由自在

伸縮性のあるファスニングテープ使用により着脱や調整が簡単

② くい込みにくい

テープに厚みがあるので、細くなりやすく、くい込みにくい

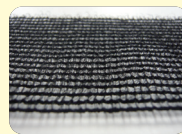


リニューアル前



リニューアル後

③ 切れにくい

テープのひっぱり強度、メッシュネットとの縫製強度がアップ

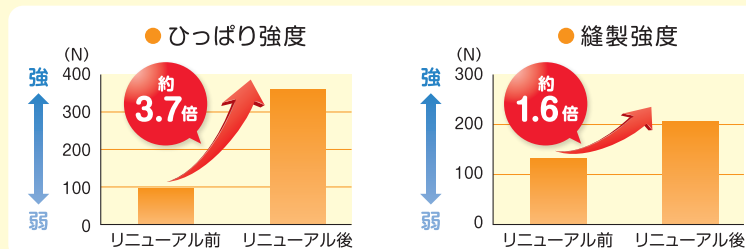

※当社調べ

使用者のコメント

※使用者のコメントは個人の感想であり、商品の効果・効能を保証するものではありません。



テープがしっかりしている分、細くなりやすいので、くい込みにくい!



テープがしっかりしたので回転しにくい!

■ サイズの目安

Sサイズ: 全長105cm×幅30cm(ネット部:70cm×30cm)
Lサイズ: 全長125cm×幅40cm(ネット部:90cm×40cm)




生後60日齢頃まで




生後60日齢頃以降

■ 使用方法

①メッシュネットの中心部が臍部に当たるように本品を腹部に当てる。

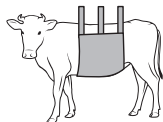

②真ん中のテープを留める。(①)その後、残り2本のテープを留める。(②)
(※残り2本を留める順番の指定はありません。)

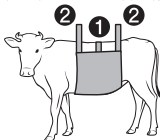

あまり強く締めすぎないように注意してください。日々のケア時に圧迫しすぎていないかを確認してください。


■ 使用上の注意

- ①本品の使用に際しては、必ず獣医師の指示に従ってください。症状が見られた際には、早めの対応をお勧めします。
- ②強く巻き過ぎると血行を阻害する恐れがあります。また、オスの場合は尿道を圧迫することがありますのでご注意ください。
- ③ファスニングテープを使用していますので簡単に着脱できますが、他の牛により剥がれる場合があります。再度付け直すか、外すことがないのであれば紐などで外れないように固定してください。
- ④鋭利な突起物に本品を引っ掛けると破れたり、切れたりする場合があります。破損した場合は使用を中止してください。
- ⑤長期間の使用および使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は使用を中止してください。

■ 保管上の注意

- ①直射日光、水濡れ、火気及び高温・多湿を避け、清潔な場所に保管してください。
- ②汚れた場合は、水洗いまたは軽くブラッシングしてください。塩素系漂白剤の使用や洗濯機による洗濯はお避けください。

■ 使用期間の目安

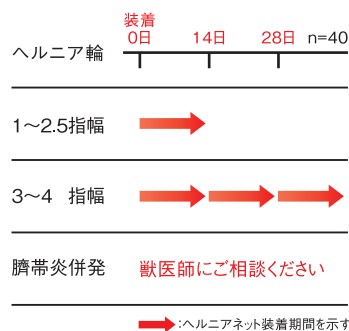

※ヘルニアネット(ファスニングテープ変更前製品)での臨床試験結果です。あくまでも目安としてお使いください。

出典: NOSAI兵庫: 「子牛のヘルニアネットの考案と使用効果」、家畜診療、53 [8]、P.487-490、(2006) (一部改訂しています。)

コード No.	品名	サイズ	希望小売価格(税別)	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm)		J A N コー ド	
					重量		I T F コー ド	
025-970110-00	牛用コルセット	S	オープン	6袋	個装	320×310×20	4 987601 506123	14987601506120
					ケース	約158g		
025-970130-00	牛用コルセット	L	オープン	6袋	個装	375×375×114	4 987601 506130	14987601506137
					ケース	約1.3kg		
					個装	420×340×20		
					ケース	約235g		
					個装	450×330×230		
					ケース	約1.8kg		

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号
●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213 (名古屋) 052(253)6213
(東京) 03(6666)6134 (広島) 082(554)1617

●ご注文・お問い合わせは