

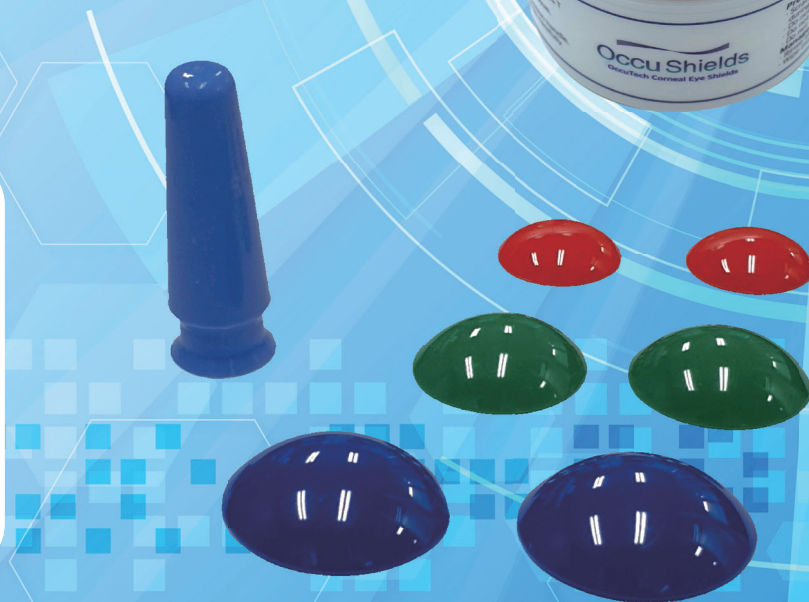


眼科用手術用角板
アイシールド

眼瞼の施術時に角膜と瞼の間に挿入し
角膜を保護します

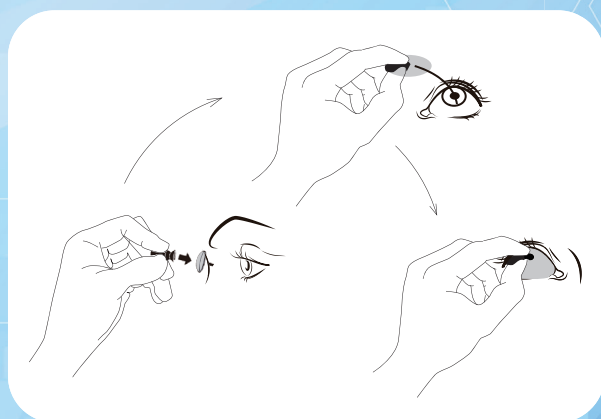

種類	ES-01 アイシールド (小)	ES-02 アイシールド (中)	ES-03 アイシールド (大)	ES-04 アイシールドセット (大・中・小)
画像				
サイズ (±10%)	長径：16.0mm 短径：15.0mm 高さ：4.8mm	長径：19.5mm 短径：18.5mm 高さ：6.0mm	長径：23.5mm 短径：22.5mm 高さ：7.2mm	
内容物	アイシールド各サイズ 4 枚、吸引スポイト 1 本			アイシールド大・中・小 各 2 枚 吸引スポイト 1 本
標準価格				
材質	プラスチック (ポリカーボネート)			

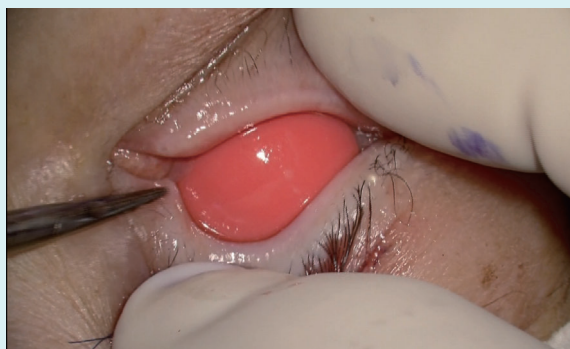

使用方法

- 1) 滅菌済の吸引スポイトを使用し、眼球を優しく覆うように本品を角膜と瞼の間に挿入する。
- 2) 施術後は吸引スポイトを使用し、本品を吸引し、ゆっくりと取り出す。
- 3) 使用後はすぐに洗浄、消毒、オートクレーブ滅菌を行う。

※本品は未滅菌のため、使用者が使用前に必ず洗浄、消毒、オートクレーブ滅菌を行うこと。

※本品に亀裂・傷、摩耗、変形等の破損がある場合は使用しないこと。

※本品の着脱には、付属品の吸引スポイトを使用し、鑷子は使用しないこと。

※本品を 2 歳以下の患者に使用しないこと。

※本品を 60 分以上使用しないこと。

※本品をレーザー手術時に使用しないこと。

販売名：アイシールド 一般的名称：眼科用手術用角板 (70944000) 製造販売届出番号：27B1X00031000013 一般医療機器