

バリケア ナチュラ フランジ

バリケア ナチュラ ソフトフランジ

ツーピースシステム

使用説明書




ディスポーザブル製品です。



ご使用の前にこの説明書をよくお読み下さい。

保存上の注意

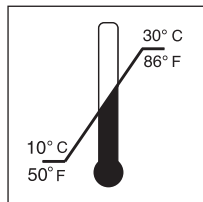

室温で保存し、高温や直射日光を避けて下さい。



多湿を避けて下さい。



製造番号を示します。



使用期限を示します。

製品の概要

バリケア ナチュラ ツーピースシステムは、フランジにパウチをスナップロック接合方式で装着する組合わせ式ストーマ装具です。


この製品はストーマの排泄管理のために使用して下さい。

警告


平らなウロストーマの周囲に粘着剤付の製品を貼付すると、特に尿管が大きくリザーバーがない場合には、まれに、尿路系内において粘着剤の存在が臨床的に報告されることがあります。粘着剤が多量に検出された場合は、製品の継続的な使用を見合わせ、医師の診断を受ける必要があります。

フランジ貼付の準備


ストーマ周囲の皮膚をよく洗って油分やべたつきを取り除き、水分をふき取って下さい。

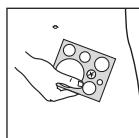

ストーマの最大径より13 mm以上大きいサイズのフランジを選んで下さい。

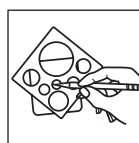

フランジの剥離紙に、ストーマの外形を正しく描いて下さい。


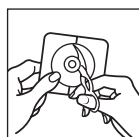


描いた線に沿ってフランジにハサミで穴を開けて下さい。開けた穴とフランジのリングとの間隔が7 mm以上あることを確認して下さい。

フランジの剥離紙をはがして下さい。




プレカット式のフランジをご使用になる場合には、ストーマの最大径と同じ大きさのプレカットサイズを選んで下さい。このとき、プレカットの穴は広げないで下さい。フランジの剥離紙をはがして下さい。

フランジの貼付

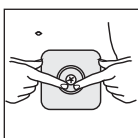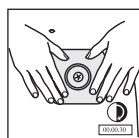


ストーマ周囲を確実に密着させて下さい。




パウチの装着

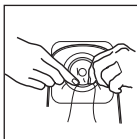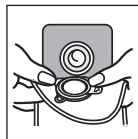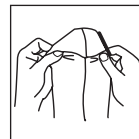

ベルトの使用

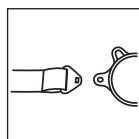


パウチのはずし方

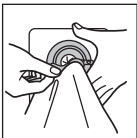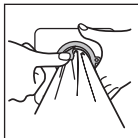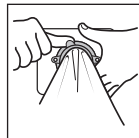


フランジのはがし方




インビジクローズドレインパウチ排出口の閉じ方

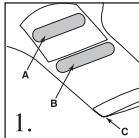


インビジクローズの排泄口閉鎖システム(1)は、フラップ(A)と中間閉鎖具(B)と排泄口端のブレード(C)から出来ています。

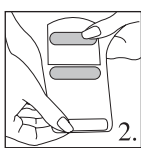


パウチ前面のフラップを持ち上げて、中間閉鎖具が現れるようにします。(2)

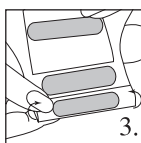

裾を手前に向かって4回折り上げます。ちょうど中間閉鎖具と裾の位置が重なります。(3)

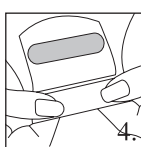


プチプチという音がして、全体が確実に固定されるまで、閉鎖具同士を押し付けてください。(4)

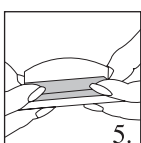


パウチを巻き込むようにして、フラップをパウチの裏側（腹部側）までまわし、プチプチと音がしてきちんと固定されるまで、閉鎖具同士を押し付けて下さい。(5)

パウチからの排泄の仕方

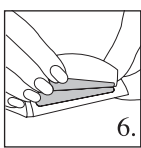

パウチの裏側（腹部側）を表に向け折返して下さい。注意深くフラップを持ちあげてはがして下さい。(6)

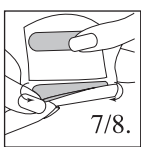

パウチの前面でフラップを持ったまま、中間閉鎖具の端からはがしていき(7)、4回折ってあったところを広げていきます。(8)




親指と人差し指で排泄口端のブレードの両端を押して排出口を開けると、排泄と拭き取りが容易にできます。(9)



パウチの裾は石鹸と水で拭き取ることもできます。その後は水分を拭き取って下さい。

ストレートクリップの取扱い方(ドレインパウチ用)

・止め方


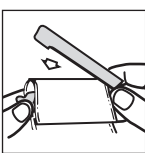


・はずし方

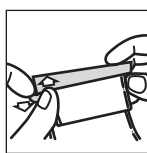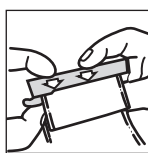

回転式尿タップの取扱い方



ーウロストミーパウチをご使用の場合ー

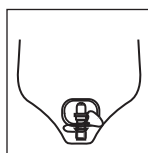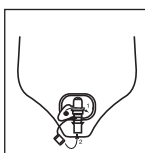

(開いた状態) (閉じた状態)



・アダプターの取扱い方

夜間ドレナージ用バッグ等へ接続する場合にはウロストミーパウチに付属のアダプターをご使用下さい。

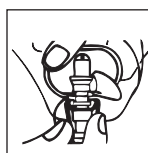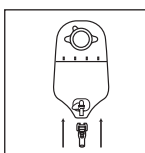


パイプ式尿タップの取扱い方

ーユリナパウチをご使用の場合ー

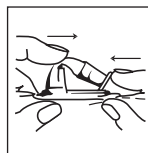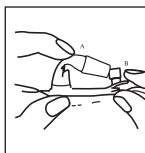

・アダプターの取り扱い方

夜間ドレナージ用バッグ等へ接続する場合にはユリナパウチに付属のアダプターをご使用下さい。

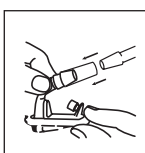

入浴やシャワーなどについて

フランジやパウチは装着したままで、入浴、シャワーや水泳などが可能です。フィルター用カバーシールが添付されているパウチについては、フィルターの上にそのカバーシールを貼って下さい。水に濡れた後は、乾いたタオル等でフランジやパウチを拭いて下さい。

使用済のフランジやパウチの処理

フランジやパウチを処分するときは、必ず中身を捨ててから、ゴミとして出して下さい。トイレが詰まる原因となりますので、トイレには流さないで下さい。ゴミの分別は各自治体の方針に従って下さい。

使用上の注意

- ・皮膚保護剤やパウチの材質が肌に合わない方は使用を控え、医師または看護師に相談して下さい。
- ・本品を貼付したまま高温の風呂に長時間入ることは避けて下さい。
- ・本品は通常連続して貼付できますが、その期間は気温、体温または排泄物の量や質などによって異なりますので、交換の時期については充分ご注意下さい。
- ・ピンホールやにおいの発生する原因になりますので、パウチを洗って再使用することは避けて下さい。

コンバテックでは上記以外にもさまざまなオストミー製品をご用意しております。製品についての情報からストアケアのご相談まで何でもお気軽にお問い合わせ下さい。



輸入販売元
コンバテック ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
お客様相談窓口
0120-532384
<http://www.convatec.com>

© 2008 ConvaTec Inc.
® はConvaTec Inc.の登録商標です。

1014091C2