

45041 スライドシート・敷パットハンガー 4連

このたびは、スライドシート・敷パットハンガー 4連をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

⚠ 取扱い上の注意

- こわれやすい物や貴重品は、置いたりしないでください。
- 不安定な状態や場所での使用はしないでください。落下の原因になります。
- 耐荷重以上のものは掛けないでください。(※パイプ 1本あたり：約 1kg・全体：約 4kg)
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故、破損等の責任は保証いたしません。
- 安定して使用できるように、前後左右均等に掛けてください。

お手入れ方法


- ときどきぬれたタオル等で、汚れをよく落としてください。著しく汚れた場合は食器用洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗い、よく汚れを落とした後、水気をよく拭き取り乾燥させてください。

ご使用前の準備

- ご使用の前に、よく拭いてからご使用ください。

※片寄がないように、できるだけ前後左右均等に掛けてください。

フック部は風で飛ばされないよう、左右互い違いにしています。

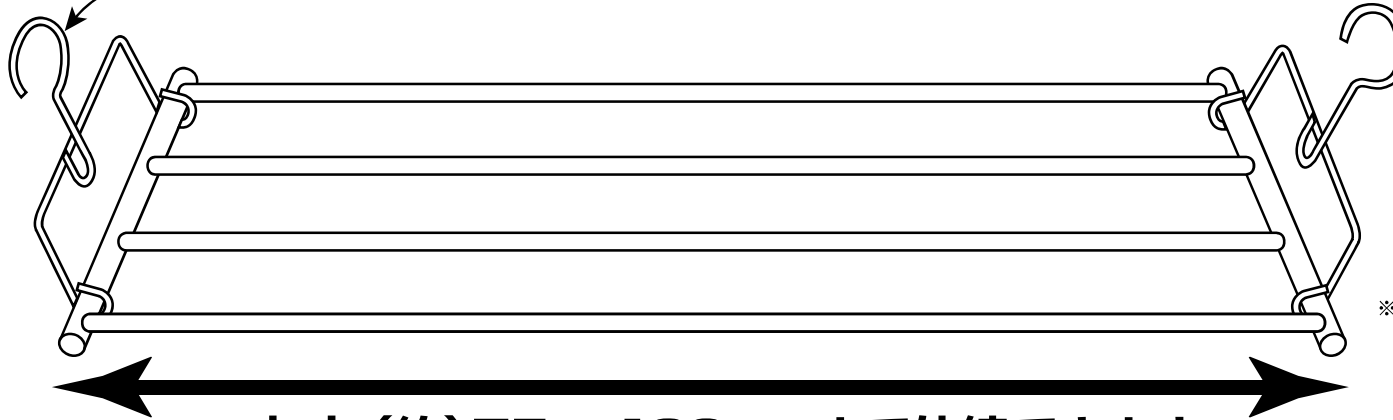

※パイプを固定しているネジが緩んだときはプラスドライバーで締め直してください

内寸 (約) 75 ~ 139cm まで伸縮できます

品質表示

パイプ・フック / 18-8 ステンレス
フレーム / 18-0 ステンレス
(キャップ/ポリエチレン)

製品については万全を期しておりますが、万一品質に不都合な点がございましたら、使用しないで購入店や問い合わせ先に連絡して下さい。金属等の取付けに不備がないか、万全を確認してから使用してください。

1022

 **下村企販株式会社**
〒959-1276 新潟県燕市小池4803-4
SHIMOMURA TEL (0256) 64-5588 (代) FAX (0256) 64-5064

MADE IN JAPAN