

## インスリンの打ち忘れ、二度打ち防止に!

# Timesulin®



Timesulin® (タイムスリン) は前回の注射からの経過時間が確認できる  
※ プレフィルド型インスリン製剤用のLED表示付き交換キャップです

### ● デジタル表示で経過時間が一目でわかります

(最大99時間59分・約4日)までカウント可能

- ▶ 投与忘れや二重投与防止の一助になります
- ▶ 食事と注射のタイミングの気づきにつながります

### ● キャップを付け替えて差し込むだけの簡単操作です



※インスリン製剤と注入器が一体型の使い捨てタイプのこと  
\*インスリン製剤は別売りです。取扱説明書をお読みください  
\*本品は医療機器ではありません

販売業者

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル 2F

【製品に関するお問合せTEL】 03-6240-9611

 オンラインストアはこちら  
<https://timesulin.net>




取り扱い説明書をよくお読みください。

使い方はこちら ▶



① 持ち方


液晶パネルの右側に Timesulin が くるように持ってください。

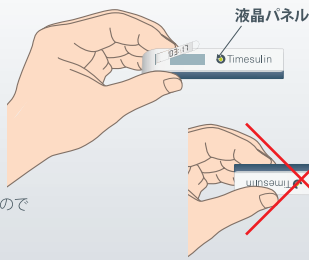

\*逆さで持つと数字を読み間違えますので 正しく持つようになしてください

② タイマーの作動


スクリーンタブを引き抜いて タイマーを作動させます。 LED画面に「00:00」と 表示され点滅します。

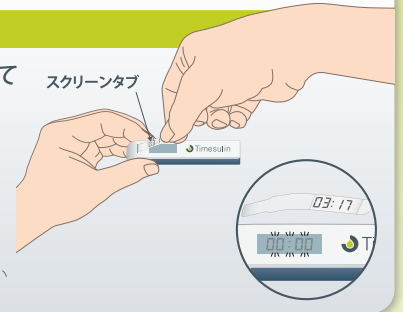

\*タブを外しても タイマーが動作しない場合は 使用せず販売業者までご連絡ください

③ インスリン製剤の挿入


プレフィルド型インスリン 製剤を差し込むとタイマーが カウントアップし始めます。 カチッというまでしっかり 奥まで差し込んでください。

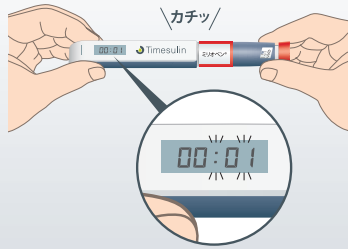

\*最初の挿入時は硬い場合があります \*注射針を外してから差し込んでください

④ タイマーのリセット

タイムスリンからプレフィルド型インスリン製剤を外すと、 タイマーは点滅を続けながらカウントアップし、8秒経つと リセットされて「00:00」の 点滅状態に戻ります。

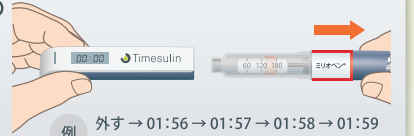

\*8秒以内にインスリン製剤を戻せば リセットされません インスリン残量を確認するときは 素早く行ってください

⑤ 液晶パネル表示

分/秒の場合

コロ点滅 + 秒カウントアップ



\*分/秒は59:59までカウントします

時間/分の場合

コロ点滅のみ



\*時間/分は99:59までカウントします

⑥ 使用開始日シール

パッケージには「使用開始日シール」が同梱されています。 電池の有効期限が分かるように 使用開始日シールをお使いください。



\*ここではミリオペンで説明しています \*取扱説明書を読み、正しくお使いください \*有効期間は製造年月日から3年です \*内蔵電池の寿命は動作開始後1年です

タイムスリンに適合するプレフィルド型インスリン製剤等

\*適合性の最新情報はHPをご確認ください

| タイムスリン            | 製品コード  | 注入器名                       | 適合するインスリン製剤、ヒトGLP-1アナログ注射液及びこれらの配合製剤   |
|-------------------|--------|----------------------------|--|
| タイムスリン® フレックスタッチ用 | T9A001 | フレックスタッチ® (ノボ ノルデクス ファーマ社) | ・フィアスプ®<br>・トレシーバ®<br>・ツルトファイ®<br>・ノボラピッド®<br>・ライゾデグ®                        |
| タイムスリン® フレックスペン用  | F9A001 | フレックスペン® (ノボ ノルデクス ファーマ社)  | ・レベミル®<br>・ノボリン®<br>・ノボラピッド®<br>・ビクトーザ®                                      |
| タイムスリン® ミリオペン用    | K9A001 | ミリオペン® (日本イーライリリー社)        | ・ヒューマログ®<br>・ルムジェブ®<br>・インスリン グラルギンBS注「リリー」<br>・ヒューマリン®                      |
| タイムスリン® ソロスター用    | S9A001 | ソロスター® (サノフィ社)             | ・アピドラ®<br>・ソリクア®<br>・ランタス®*<br>・インスリン リスプロBS注「サノフィ」<br>・インスリン アスパルトBS注「サノフィ」 |

包装単位 1本/箱

\*インスリン製剤の製品名は各社の登録商標です

\*「ランタスXR注 ソロスター」はタイムスリンに適合していません

監修:新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター センター長 教授 朝倉 俊成 先生

販売業者



Women's Health Japan

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18  
第8衛星タワービル 2F  
www.womenshealthjapan.com

【製品に関するお問合せTEL】 03-6240-9611

製造業者

英国 Patients Pending Ltd