

医療用品 3 手術用手袋及び指サック  
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 40549000  
**ダーマプレンノーパウダー**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

左手用及び右手用を一組にしたものである。

主 材 料	ポリクロロプレンゴム
形 状	C (曲指形)
表面仕上げ	T (粗面)
パ ウ ダ	なし
加硫促進剤	なし

**【使用目的又は効果】**

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護する。

**【使用方法等】**

- \*\*1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出します。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して装着します。

**\*【使用上の注意】**

**〈重要な基本的注意〉**

- \*\*1. 本品に含まれる化学物質により、遅延型アレルギー性接触皮膚炎の症状を引き起こすことがある。体質によっては、かゆみ、発疹等を起こすおそれがある。このような症状が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
2. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

**〈不具合・有害事象〉**

- \*\*1. その他の不具合  
浸透、膨潤
- \*\*2. その他の有害事象  
かゆみ、発疹

**【保管方法及び有効期間等】**

**〈有効期間〉**

3年 [自己認証(当社データ)による]  
包装の使用期限欄を参照すること。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者  
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先  
TEL 0120-923-107

製造業者  
アンセル・エヌピー社 (Ansell N.P. Sdn. Bhd.)  
国名：マレーシア