

規格一覧

JMSサージカルマスク						
品番	種別	色	滅菌	BFE	JANコード	入数
JN-M35EBX	ゴムタイプ Eタイプ*	ブルー	未滅菌	≧95%	4987494025084	50枚×40=2,000枚
JN-M35EWX		ホワイト			4987494025091	
JN-M35X	ゴムタイプ	グリーン		≧97%	4987494232109	
JN-M35PX		ピンク			4987494234264	
JN-M37X		グリーン			4987494087655	
JN-M37PX		ピンク			4987494077540	
JN-M37BX		ブルー			4987494250646	
JN-M30EX	ひもタイプ Eタイプ	グリーン	滅菌済	≧98%	4987494132416	50枚×20=1,000枚
JN-M30X	ひもタイプ				4987494128747	50枚×12= 600枚
JN-M30E	Eタイプ				4987494151677	25枚×30= 750枚
JN-M30	ひもタイプ				4987494128693	

JMSマスク					
品番	種別	色	滅菌	JANコード	入数
JN-M60X	キュービックタイプ	ホワイト	未滅菌	4987494149872	100枚×24=2,400枚
JN-M61X	キュービックタイプ H			4987494224708	50枚×28=1,400枚
JN-M80X	キュービックタイプ サージカル			4987494822904	100枚×24=2,400枚
JN-MN95X	N-95	オレンジ		4987494204984	50枚× 6= 300枚

JMSソフトマスク					
品番	種別	色	滅菌	JANコード	入数
JN-M50X	くもり止めフィルム付	グリーン	未滅菌	4987494128778	50枚×40=2,000枚

JMSキャップ					
品番	種別	色	滅菌	JANコード	入数
JN-CA2X	ゴムタイプ	グリーン	未滅菌	4987494128785	100枚×10=1,000枚
JN-CBX	ひもタイプ	ブルー		4987494128808	

※Eタイプとは、エコノミー (Economy) タイプの製品です。
お求め易くする為に、耳掛けゴムの仕様を変更、またマスク取り出しのごみ混入防止シートを省いた箱を採用する等の仕様となっております。

マスクの捕集効率

品目	捕集効率	試験方法:MIL-M-36954C
サージカルマスク	95%	菌液の懸濁液をネブライザーでエアロゾル化し、これをアンダーセンサンプラーにより28.3R/分の流量で吸引し菌を捕集した。 アンダーセンサンプラーの上に試料を装着し、試料のエアロゾルに対するフィルター効果(BFE)を次式で算出した。 $BFE(\%) = \frac{C-F}{C} \times 100$ C=試料を装着しないときのコロニー数 F=試料を装着したときのコロニー数 供試菌:黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus ATCC 6538P (IFO 12732)
ソフトマスク	98%	
キュービックタイプ	65%	
紙マスク	35%	

感染経路別予防策の概略*

	標準予防策	空気予防策	飛沫予防策
感染媒体	・血液、体液 ・分泌物、排泄物 ・創のある皮膚、粘膜	・直径5μm以下の飛沫核粒子 ・空気の流れにより飛散する	・直径5μmを超える飛沫粒子 ・微生物を含む飛沫が短い距離(2m以内)を飛ぶ ・飛沫は床に落ちる
主な疾患及び微生物	感染症の有無に関わらずすべての患者に適応される	結核、麻疹、水痘	インフルエンザ、流行性耳下腺炎、風疹など
マスク ゴーグル	血液、体液が飛散し、目、鼻、口を汚染する可能性がある場合	部屋に入るときにタイプN95微粒子用マスクを着用	患者から2m以内の距離で働くとき、マスクを着用

*病院感染対策ガイドライン2018年版 編集:国公立大学附属病院感染対策協議会より転載

装着方法

JMSサージカルマスク



マスクを上下に開きます。



ノーズピースを鼻に合うように押さえ、両頬に隙間をつくらないようにします。



上側のひもを頭頂部でしっかりと結びます。



下側のひもを首の後ろでしっかりと結びます。

JMSマスク N-95



マスクを上下に開き、ノーズピースを鼻に合うように軽く曲げます。



マスクの下側をアゴに掛け、2本のゴムの中央を持ち、頭の後ろへ持っていきます。



上側のゴムを頭頂部に、下側のゴムを首に固定します。



ノーズピースを鼻に合うように軽く曲げます。

JMS 販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-2-1
<https://www.jms.cc/>

2019.12.01XA090-IB
2023.06.000A090-JMS



MASK & CAP
マスク・キャップ



マスク

サージカルマスク（未滅菌）

呼吸がしやすく、飛沫感染予防に効果的な三層構造のマスクです。

JN-M35EBX

- ゴムタイプ
- Eタイプ※
- 材質：ポリプロピレン
- BFE：≧95%

ブルー



JN-M35EWX

- ゴムタイプ
- Eタイプ
- 材質：ポリプロピレン
- BFE：≧95%

ホワイト



JN-M35X

- ゴムタイプ
- 材質：ポリプロピレン
- BFE：≧97%

グリーン



JN-M35PX

- ゴムタイプ
- 材質：ポリプロピレン
- BFE：≧97%

ピンク



JN-M37X

- ゴムタイプ
- 材質：レーヨン
- BFE：≧97%

グリーン



JN-M37PX

- ゴムタイプ
- 材質：レーヨン
- BFE：≧97%

ピンク



JN-M37BX

- ゴムタイプ
- 材質：レーヨン
- BFE：≧97%

ブルー



M35シリーズ

ポリプロピレン製。

本体サイズ

- ピンク : 90mm×145mm
- ブルー : 90mm×175mm
- グリーン : 90mm×175mm
- ホワイト : 90mm×175mm

M37シリーズ

肌にやさしいレーヨン製。
口元にゆとりがある
カップキーパー構造。

本体サイズ

- ピンク : 90mm×145mm
- ブルー : 90mm×160mm
- グリーン : 90mm×175mm

JN-M30EX

- ひもタイプ
- Eタイプ
- BFE：≧98%

グリーン



JN-M30X

- ひもタイプ
- BFE：≧98%

グリーン



サージカルマスク（滅菌済）

三層構造で、内部に高性能フィルターを採用しており、細菌捕集効率、通気性が優れたマスクです。

JN-M30E



- Eタイプ
- BFE：≧98%

グリーン



JN-M30



- ひもタイプ
- BFE：≧98%

グリーン



キュービックタイプ（未滅菌）

口元にゆとりのある立体構造の為、息苦しさ、ムレ、口紅うつり等マスク特有の不快感を解消します。

JN-M60X

- BFE：≧65%

ホワイト



JN-M80X

- BFE：≧98%
- サージカル

ホワイト



キュービックタイプ
すべての
装着イメージです。

ソフトマスク（未滅菌）

マスク上部からの呼気漏れを防ぎ、眼鏡のくもりを防止。中空ゴムを採用し耳への負担を軽減します。

JN-M50X

- ゴムタイプ
- 材質：ポリプロピレン
- BFE：≧98%

グリーン



Point 眼鏡くもり止め機能付き

折り返しフィルム（口元側にインナーフィルム、表側にアウターフィルム）が付いていることで呼気が上にあがるのを防止し、眼鏡がくもるのを防ぎます。



N95マスク（未滅菌）

NIOSH*によって認可されたN-95グレードのマスクです。

JN-MN95X



オレンジ



- NIOSHによって認可されたN-95マスクです。（ダックビルタイプ）
- 軽量で装着維持の負担が少なく、空気感染予防に効果があります。

*NIOSH=National Institute for Occupational Safety and Health:
米国労働安全衛生研究所

キャップ

手術室、ICU等で、頭髮からのゴミの落下や、汚染を防止する為の、
通気性に優れた不織布製ディスポーザブルキャップです。

JN-CA2X



- キャップA
- グリーン



JN-CBX



- キャップB
- ブルー



※Eタイプとは、エコノミー（Economy）タイプの製品です。
お求め易くする為に、耳掛けゴムの仕様を変更、またマスク取り出しのごみ混入防止シートを省いた箱を採用する等の仕様となっております。