

使用方法

1



入れ歯やマウスピース、歯ブラシに付着した汚れを水洗いし、水滴を取る。

2



水気を取った入れ歯やマウスピース、歯ブラシの中心にスプレーをする。

※5 cmほど離す

※入れ歯、マウスピースの場合、表・裏を1～2回ずつ

3



キレイな指や綿棒で拭き上げ、スプレー液を乾燥させ、アルコール成分を飛ばしてから装着してください。

※総義歯の場合は一度水で濡らしてから装着してください。

4



1日1回のスプレーで24時間抗菌作用が持続するので、気持ちよく使用できます。

※Etak® Dental Sprayを使用後、流水やブラシで洗浄しても、抗菌作用は24時間持続します。