


【取扱説明書】

サポートアーム SYC-09SF-400A

＜ご使用にあたっての注意事項＞ ⚠

- ・ ご使用及びお取り扱いはこの取扱説明書の内容に沿って下さい。
- ・ 本製品はアームとして、お使い下さい。
- ・ 本製品を取扱説明書の内容以外の目的に使用しないで下さい。
- ・ 製品の仕様につきましては取扱説明書内に記載しております。
- ・ 本製品の設置は、決められた場所に正しく取り付けてご使用下さい。
- ・ 落下、転倒しないように設置をして下さい。
- ・ 本製品が正しく設置されている場所の周辺には何も置かないで下さい。
- ・ 布、じゅうたん、布団、土などの不安定な場所での設置はおやめ下さい。
- ・ 本製品の保管は常温常湿の風通しの良い室内にて安定された場所に保管をして下さい。
- ・ 本製品は幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 本製品の手入れは、乾いた布などで汚れを拭き取って下さい。
- ・ 本製品は高温多湿の環境下や直射日光の当たる場所では、製品が熱くなりますので、使用をお控え下さい。
- ・ 非常に危険ですので、本製品を落としたり、踏んだり、投げたりしないで下さい。
- ・ 本製品を火の中に入れたりしないで下さい。
- ・ 本製品を解体したり、分解したりしないで下さい。
- ・ 故障と思われる場合は販売店にお問い合わせ下さい。



＜製品構成＞

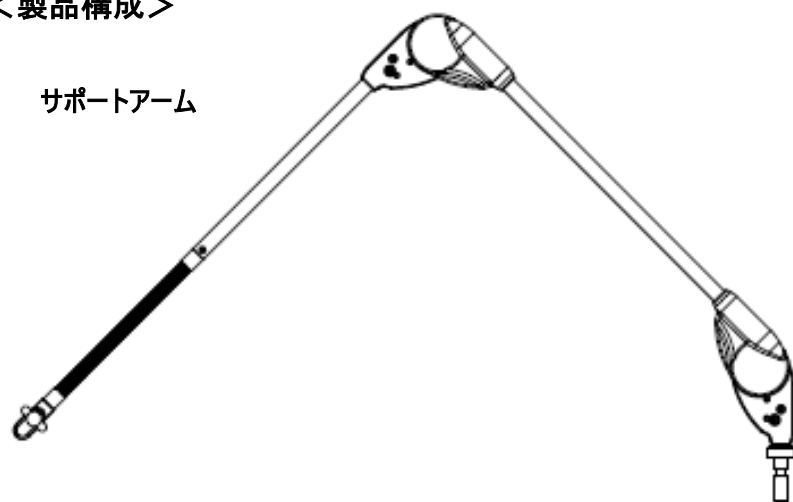

サポートアーム

シャフト

ハンガー

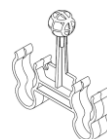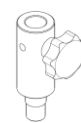


製品名	サポートアーム	保存環境条件 周囲温度 -20° ～ +60° 相対湿度 30～85% 気圧 700～1060hPa 使用環境条件 周囲温度 +10° ～ +40° 相対湿度 30～85% 気圧 700～1060hPa ※ただし結露なきこと
製品番号	SYC-09SF-400A	
搭載可能重量	0.4kg まで	
アーム移動角度	第 1 アーム: 120 度、第 2 アーム: 180 度	
耐用回数	30,000 回 (0.4kg 搭載時)	
製品寸法	外観図に基づく	
製品重量	1.4kg (シャフト及びハンガーを含む)	

<設置及び使用方法>


1. シャフトの取り付け

シャフトをテーブル(架台)の取り付け穴(9/16-18UNF)、または予め設置したクランプ N(別売)、もしくはクランプ H(別売)の穴にねじ込んで固定します。


テーブル(架台)

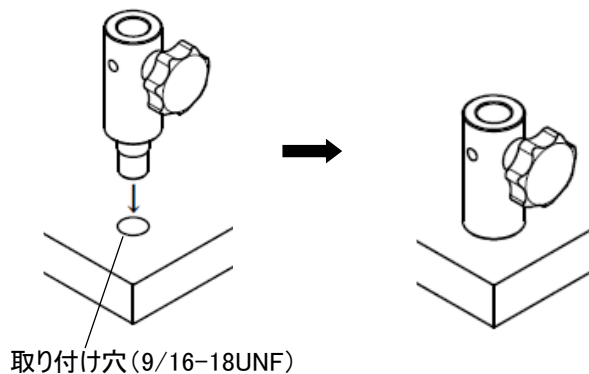

クランプ N(別売)

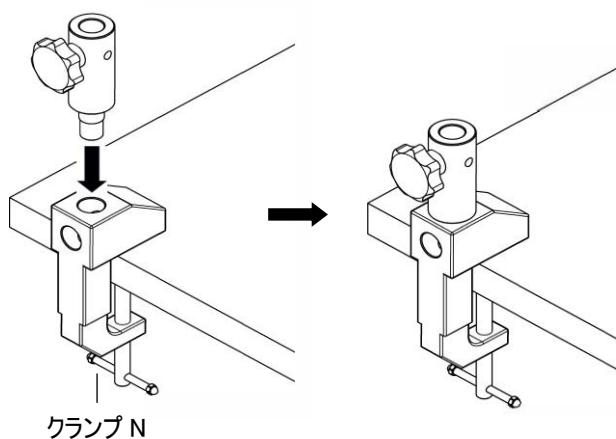


クランプ H(別売)

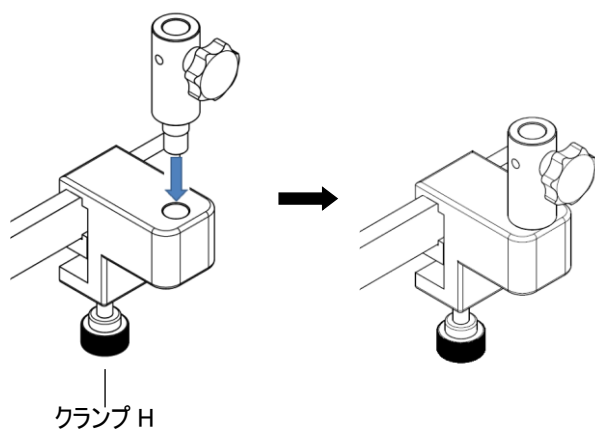


2. サポートアームの取り付け

サポートアームをシャフトの穴に差し込みます。

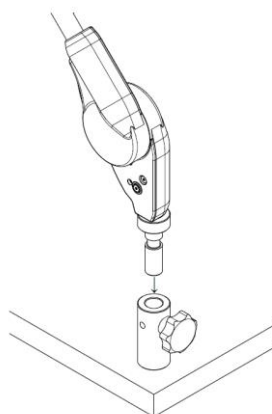


シャフトのノブを締めてサポートアームを固定します。

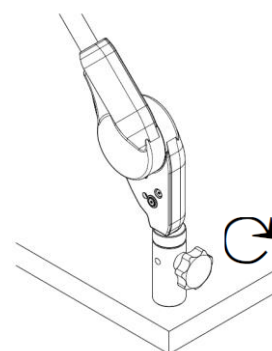


3. ハンガーの取り付け

サポートアーム先端のハンガー取付部にハンガーを取り付けます。

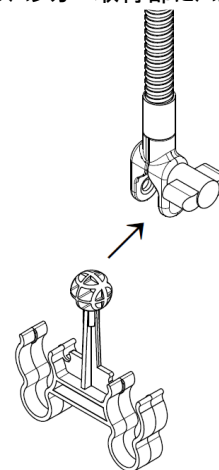


ノブを締めてサポートアームを固定します。

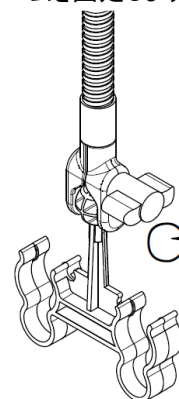


4. ホースの取り付け


ホースをハンガーに差し込みます。

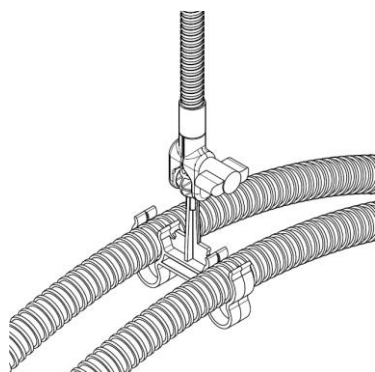

ハンガーの位置は自在に調整、及び固定することができます。



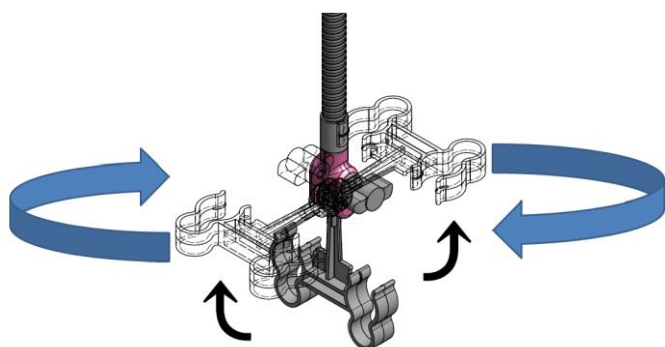


※サポートアーム先端のフレキシブルチューブは上下左右自在に曲げることができます。

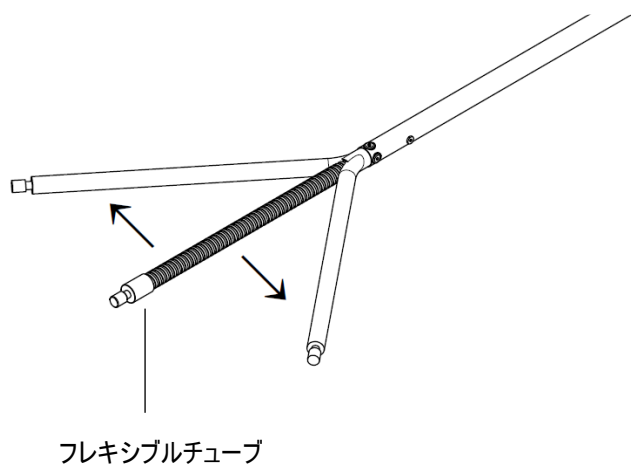

5. サポートアームの角度調整


サポートアームはフリーストップ構造のため、アームを自在に調整してそのまま止めることができます。

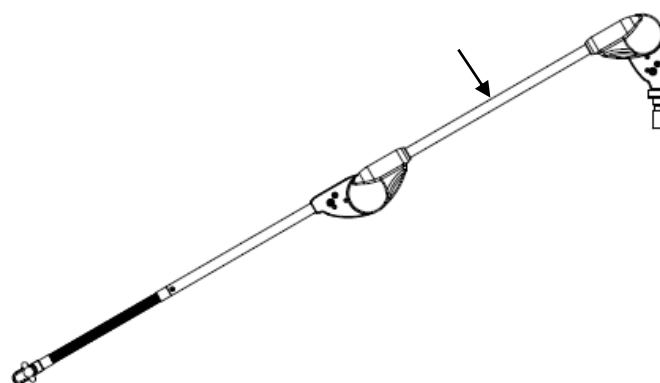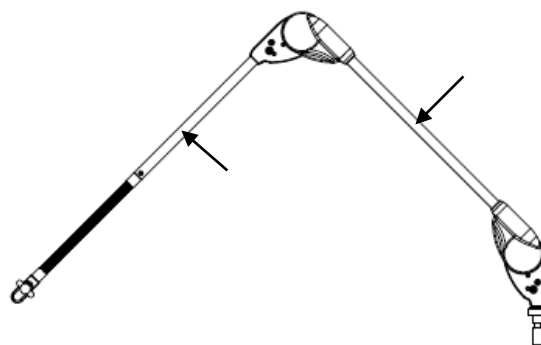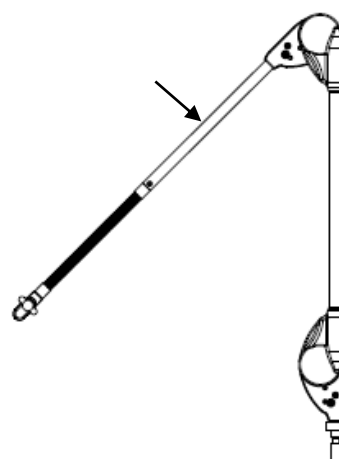

<外観図一寸法単位はmm>

SYC-09SF-400A

水平時アーム全長:115 センチ

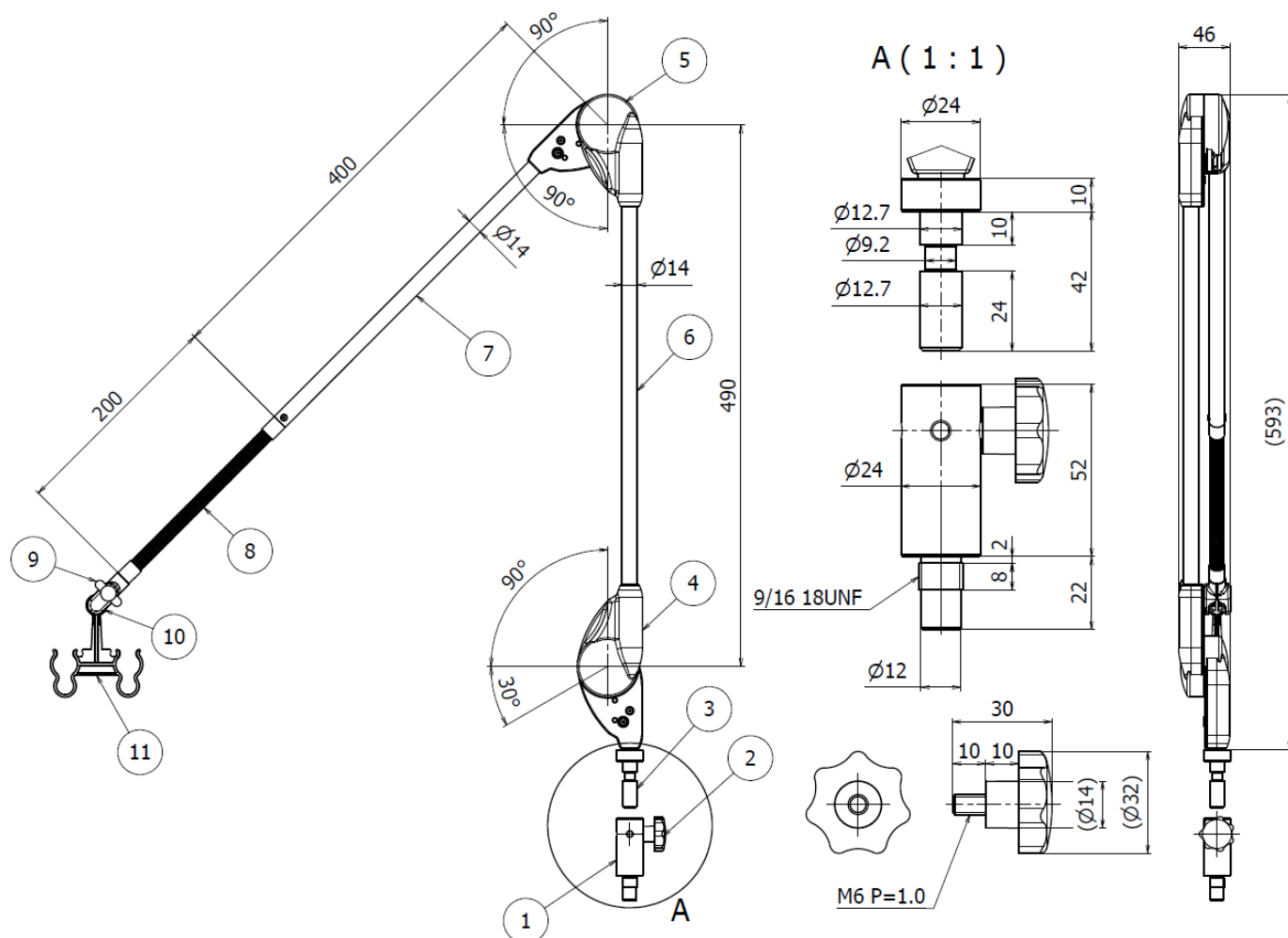

<構成部品表>

番号	部品名称	番号	部品名称	番号	部品名称
①	シャフト	⑤	第 2 アーム関節	⑨	ハンガー取付ノブ
②	アーム固定ノブ	⑥	第 1 アーム	⑩	ハンガー取付部
③	ベースシャフト	⑦	第 2 アーム	⑪	ハンガー
④	第 1 アーム関節	⑧	フレキシブルチューブ		