

「簡易軟膏練り機」

# ねりサポくん

(商標登録手続中)

## 取扱説明書

### はじめに

この度は簡易軟膏練り機・ねりサポくんをお買い上げいただきましてありがとうございました。

本製品は軟膏を練和する機器です。ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、安全のために記載されている注意・警告内容を守った上で正しくご使用ください。

お読みになったあとは保証書とともに、いつでも見ることができる場所に保管してください。

### セット内容

- 1) 本体：1台
- 2) ステンレスボウル：1個
- 3) フットコントローラー：1台
- 4) コネクターカバー：1個
- 5) ヘラ：1本
- 6) 取扱説明書
- 7) 保証書

株式会社 **シンリョウ**

〒171-0043

東京都豊島区要町 3-36-3

TEL(03)3973-6167

23.09

## 【1.安全上の注意】

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しくお使いください。  
次に表示した表示は人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容



**警告**

### 電源コード・プラグは正しく使う〈火災・感電・やけどの原因になります〉

- |   |   |
|---|---|
| ! | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源プラグのホコリは定期的に取り除く</li> <li>■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む</li> <li>■ 異常・故障時は直ちに使用を中止し電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く</li> <li>■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く</li> <li>■ 定格 15A 以上・交流 100V のコンセントで単独で使用する</li> <li>■ お手入れ、清掃をするときは、電源プラグをコンセントから外す</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源コードをたばねて通電しない</li> <li>■ 電源コードを傷つけない</li> <li>■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない</li> <li>■ めれた手で電源プラグの抜き差しをしない</li> <li>■ 分解・修理・改造をしない</li> </ul>   |
| ⊘ |   |

! 注意をすること

⊘ してはいけないこと

! 必ずおこなうこと




**注意**

### ご使用のとき〈火災・感電・やけど・けが・機器の破損の原因になります〉


- |   |  |
|---|--|
| ! | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ステンレスボウルは確実にセットする</li> <li>■ 練和するときは、回転を徐々に上げていく</li> <li>■ 練和終了後や未使用時はメインスイッチを OFF にする</li> </ul>  |
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本体に水をかけたり、水のかかる場所、不安定な場所に設置しない</li> <li>■ 本体カバーを外したり、内部に触れない</li> <li>■ 長時間の連続使用はしない</li> <li>■ ステンレスボウルに 200g 以上軟膏を入れない</li> <li>■ 軟膏以外のもの(液体など)は練和しない</li> <li>■ 本体を落としたり、ぶつけたり、ステンレスボウルに無理な負荷をかけない</li> <li>■ フットコントローラーに物を載せない</li> </ul> |

## 【2.各部の名称】

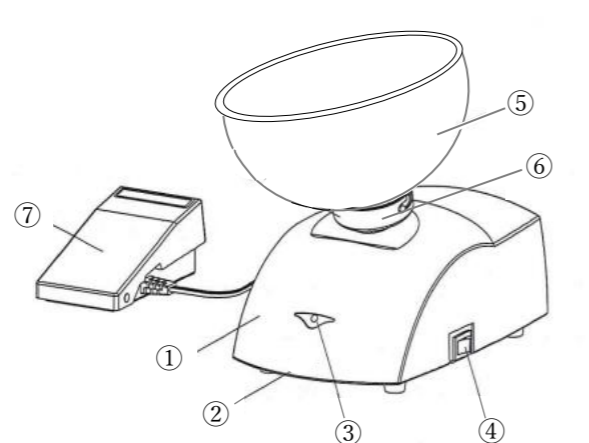


- |             |              |
|-------------|--------------|
| ① 本体カバー     | ⑥ 受け台        |
| ② ベース(本体底面) | ⑦ フットコントローラー |
| ③ メインランプ    | ⑧ ゴム足        |
| ④ メインスイッチ   | ⑨ コネクター      |
| ⑤ ステンレスボウル  |              |

## 【3.付属品】

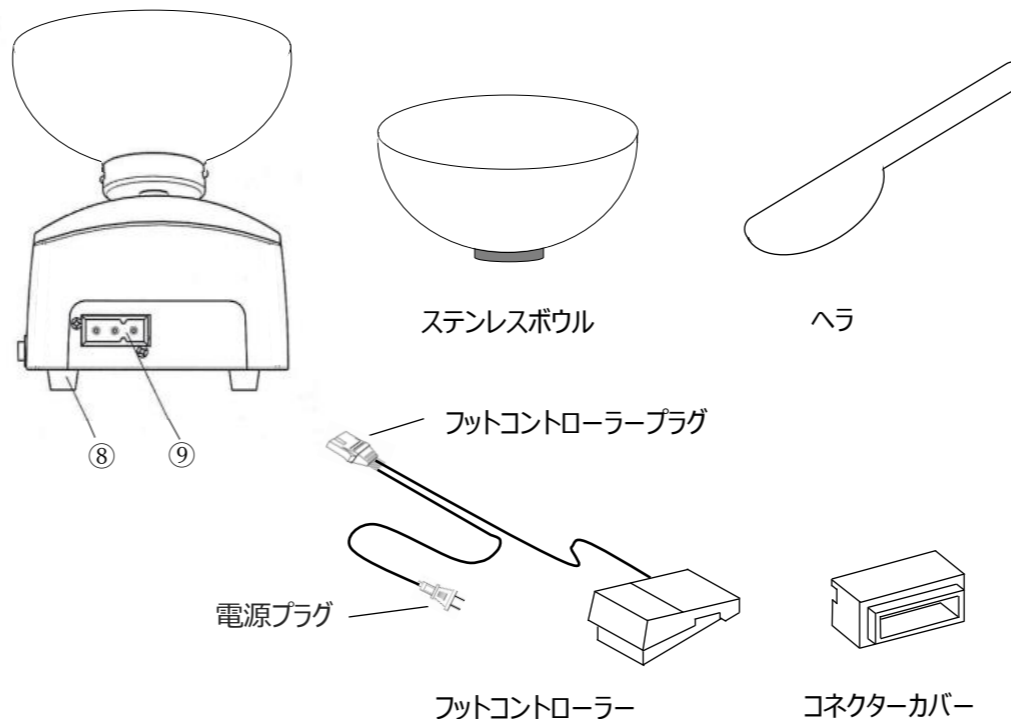


## 【4.フットコントローラーの接続・コネクターカバーの取付方法】

- ① お買い上げ時、コネクターカバーは本体背面にセットされています。
- ② フットコントローラーのプラグをコネクターに差し込みます

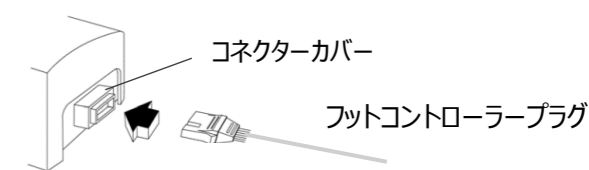

- ③ コネクターカバーを交換する場合  
本体背面のコネクターに、コネクターカバーの切り欠き位置とネジ位置を合わせてはめ込んでください。

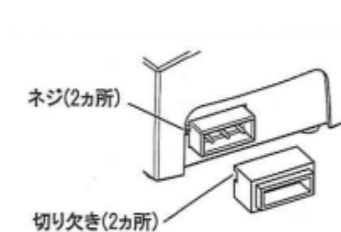

コネクターカバーはコネクターに水や異物が浸入することを防止するため正しく取り付けてください。完全防水ではありません。

## 【5.操作方法】

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. メインスイッチを ON にします。本体正面のメインランプが緑色に点灯します。
3. ステンレスボウルに軟膏を入れます。(最大 200g)



- ⊙ 200g 以上入れない。受け台に負荷がかかり機器の破損につながります。
- ⊙ 軟膏以外(液体など)は入れない。機器の破損につながります。

4. ステンレスボウルを受け台にセットします。ステンレスボウルは受け台に真っすぐに差し込みます。挿し込んだらステンレスボウルのピンを受け台の溝に確実に合わせ、右に回してロックします。



- ① ステンレスボウルは溝の奥まではめ込まないと、回転時に外れるおそれがあります。

5. 本体を押さえ、フットコントローラーを踏んで徐々に回転を上げていきます。

軟膏に対しヘラを斜めに当てて、押さえつけるようにして練和します。




- ⊙ ヘラの角度は左へ倒す(寝かせる)ようにします。右へ倒すと軟膏が飛び出す場合があります。

6. ヘラの角度を立てて、軟膏をせき止めるようにして集めます。

7. 回転を止めて、集めた軟膏をヘラに載せ、ステンレスボウルの縁でしごくようにしてステンレスボウルに戻します。

8. 上記 5～6 を軟膏が滑らかになるまで数回繰り返します。

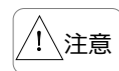

- ⊙ 長時間の連続使用は避けてください。  
発熱による故障の原因になります。(連続使用すると本体が熱を持ちますが、異常ではありません)

9. 作業終了後はメインスイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

## 【6.お手入れ】



- ① 電源プラグをコンセントから外して行ってください。

1. 本体表面・受け台・フットコントローラーの清掃

乾いた布などで拭き取ってください。汚れがひどい場合は少量の中性洗剤を布に含ませて拭いてください。拭き取り後は乾いた布などで十分に乾拭きを行い、水分や洗剤分が残らないようにしてください。

2. ステンレスボウル・ヘラの清掃

ステンレスボウルは、練和終了毎に必ずペーパーなどで一度軟膏を拭き取り、中性洗剤などで洗浄してください。水分は拭きとります。

## 【7.保守点検】

毎回使用前に下表に従って点検を行い、異常、不備がないことを確認します。

点検の結果、処置の範囲を超えた場合および異常がみられた場合は使用を中止し、当社までご相談ください。

NO.	点検項目	処置
1	ステンレスボウルが確実に固定できるか	新品のステンレスボウルに交換してください
2	ステンレスボウルに破損や変形がないか	新品のステンレスボウルに交換してください
3	受け台に軟膏等が付着していないか	付着物を取り除いてください
4	ヘラに摩耗や変形がないか	新品のヘラに交換してください
5	コネクターカバーの外れや破損がないか	外れている場合は元通りに取り付けてください 破損している場合は新品に交換してください

## 【8.保証と修理】

1. 本製品の保証について

本製品は、本取扱説明書に記載の正しいご使用により万一故障が発生した場合、別紙保証書に記載条件・範囲に基づき保証期間内において無償にて修理または部品の交換をいたします。

詳しくは保証書裏面の「保証の内容」をよくお読みください。なお、保証期間はご購入から 1 年間です。

2. 保証書について

ご購入の際、別紙保証書に所定の内容をすべてご記入のうえ、保証書は大切に保管してください。

3. 修理の依頼について

- (1)保証期間中

別紙保証書を添えて当社までご依頼ください。無償にて対応いたします。

なお、消耗品など保証適用外の部分につきましては実費を負担していただきます。

- (2)保証期間以降

当社までご相談ください。修理・部品の交換によって使用できる場合には、有償にて対応いたします。

4. 補修用部品の保有期間について

本製品の製造中止より 5 年間と定めております。

なお、本期間を経過した以降の修理依頼・部品注文につきましては、応じられない場合がありますのでご了承ください。

## 【9.廃棄】

各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

## 【10.別売品】

- ・ステンレスボウル
- ・ヘラ
- ・フットコントローラー
- ・コネクターカバー

## 【11.仕様】

製品名：ねりサボくん

型式：SR-01

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：90W

対応可能容量：200 g

外形寸法：W138×H210×D225(H はステンレスボウル装着時)

質量：本体；約 2kg、ステンレスボウル；約 220g