


ベテリナリーシンク
・ SW-120

取扱説明書

発行日 2024/2/13

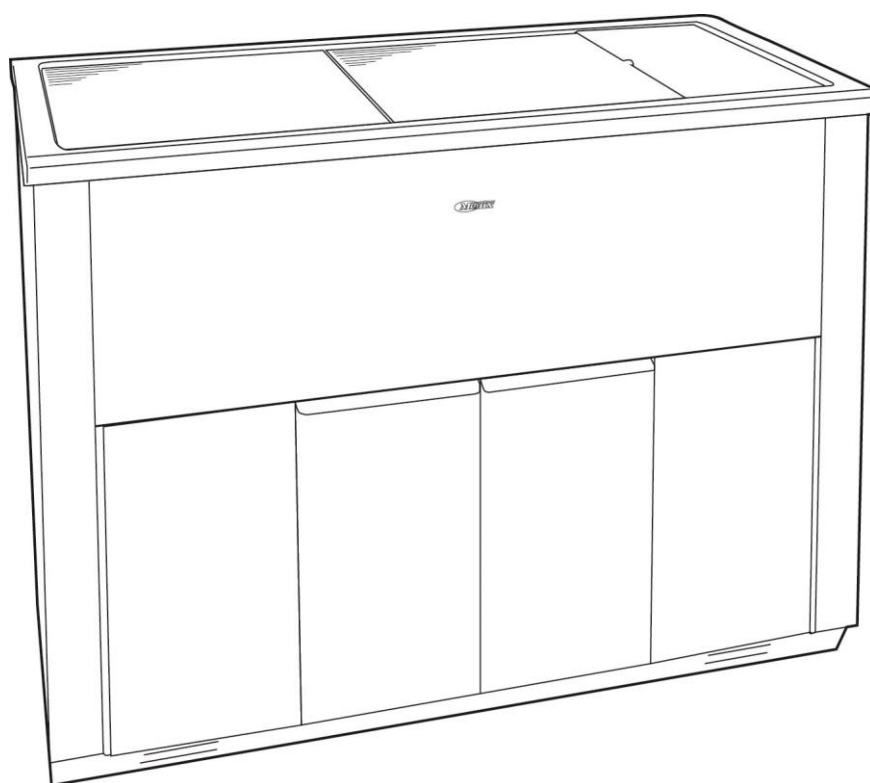

株式会社東京メニックス

もくじ

はじめに	3
取扱説明書の安全表記について	4
■マーク表示について	4
管理者・使用者と使用条件	6
■管理者・使用者	6
■使用条件	6
設置の注意事項	6
■安全にご使用するためのお願い	6
SW-120	7
■基本仕様	7
■各部名称	7
■各部詳細：シンク(流し台)	8
■各部詳細：下部	8
■配管図	9
ロングホース混合栓について	10
■使用方法・メンテナンス	10
オプションの取付けと使用方法	11
■シンク用ゴムシート	11
■サイドトレイ	11
■スプレーハンガー	11
■クリップ付きチューブクランプ	11
■3wayサイドプラス	12
■予備蛇口	13
■ウォールマウントメカノトレー400 セット	13
■両面フルオープンドア	13
■シンク用クランプ式ロープホルダー、ロープ 2 個セット	13
掃除・お手入れ	14
■本体の掃除について	14
■排水トラップの清掃について	14
メンテナンス・不具合について	15
■混合栓の不具合 「水漏れ・温度調節など」	15
■混合栓の交換が必要になった場合のご注意	15
■シンクの不具合について	16
■お問い合わせ窓口	16

はじめに

この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、使用上の注意及び警告事項について記載しています。本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。
- 本書の内容は、製品改良のため、将来予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 株式会社東京メニックスの了解なしに本図書を第三者に貸与することはご遠慮ください。

取扱説明書の安全表記について

■マーク表示について

 警告	: 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性が想定されることを示します。
 注意	: 取扱いを誤った場合、中度または軽度の損傷を負う危険性が想定されることを示します。
注記	: 取扱いを誤った場合、物的損害が想定されることを示します。

この取扱説明書には下記のマークを使用しています。

禁止マーク					
絵表示	名称	絵表示	名称	絵表示	名称
	一般禁止		火気禁止		接触禁止
	水濡れ禁止		濡れ手禁止		風呂使用禁止
	分解禁止				

注意マーク					
絵表示	名称	絵表示	名称	絵表示	名称
	一般注意		回転物注意		破裂注意
	感電注意		高温注意		発火注意
	指のケガに注意		手や腕を挟まれないよう注意		手を挟まれないよう注意

指示マーク					
絵表示	名称	絵表示	名称	絵表示	名称
	一般指示(強制)		電源プラグをコンセントから抜く指示		アース線を必ず接続せよ指示

安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

⚠ 警告		
絵表示	重要事項	危害・損害
	長期間使用しないときは止水栓を止めてください。	水漏れの原因になります。
	分解・改造・修理を行わないこと。	技術のあるサービスマン以外の人には、分解・改造・修理を行わないでください。異常動作をするおそれがあります。
	装置は平らで安定した場所に設置すること。	傾いた場所や不安定な床へ設置すると、転倒し大きな事故になります。

⚠ 注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	適切な周囲環境条件を維持すること。	設置環境が悪くなると、故障などの原因となります。屋外では使用しないでください
	異常を感じたら、すぐに使用を中止すること。	少しでも「おかしいな？」と感じたら、すぐに使用を中止してください。
	本機の上に動物を乗せる際は、桶の中心部に乗せること。	桶の左右に偏った場所に乘せると、本機が転倒する場合があります。また、桶に腰掛ける等はやめてください。

管理者・使用者と使用条件

■管理者・使用者

意図しない行動による事故を防ぐため、次の注意事項を守ってください。

- ・管理者は本製品の使用前に、使用者に対し十分な製品知識を付けさせてください。
- ・本書は日本語を母国語とした方が対象です。管理者は、日本語を母国語としない方に使用させる場合、使用者の安全と関連する作業についての教育は、お客様の責任において実施してください。
- ・管理者は事故を防止するため、本来の意図した使用以外の利用や、本書に記載されていない方法での作業は行わないでください。

■使用条件

1. 室内でご使用ください
2. 装置は平らで安定した場所に使用してください。

設置の注意事項

■安全にご使用するためのお願い


1. 給水栓には、必ず止水栓をつけてください。
2. 排水口からの臭いを防ぐために、付属の防臭キャップを取付けください。

SW-120


■基本仕様

製品名	2 段式多機能シンク
用途	処置台
本体質量	61.6 kg
本体サイズ	シンク外寸 W1200×D540×H890
	シンク内寸 上段 W1080×D460×H210 下段 W940×D420×H240
オーバーフロー	あり
主な素材	SUS304(ステンレス)
標準付属品	ステンレススノコ(2 枚)、排水ホース、薄型排水トラップ、防臭キャップ
	ロングホース混合栓、フラット板、接続金具、水受トレイ、排水栓フタ、止水フタ
オプション	3way サイドプラス、スプレーハンガー、サイドトレイ、シンク用ゴムシート、予備蛇口
	シンク用クランプ式ロープホルダー・ロープ 2 個セット、クリップ付きチューブクランプ
	両面フルオープンドア
製造	日本
保証期間	2 年1ヶ月

■各部名称

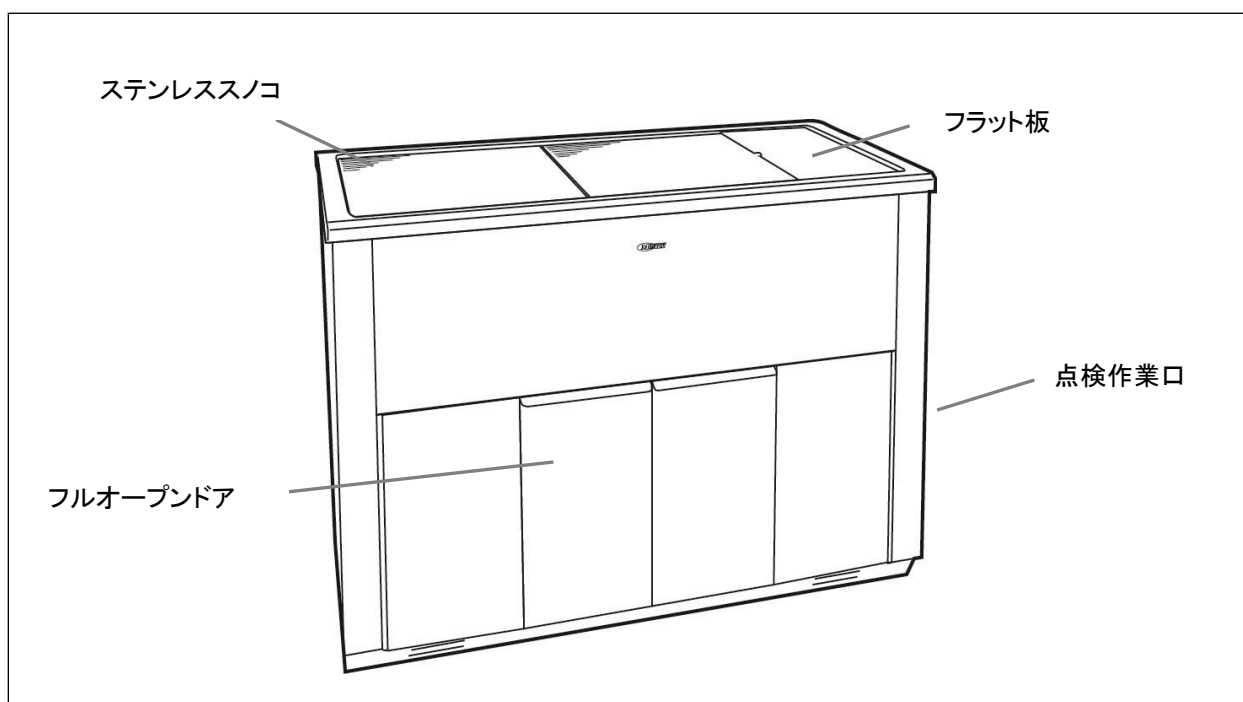


■各部詳細:シンク(流し台)

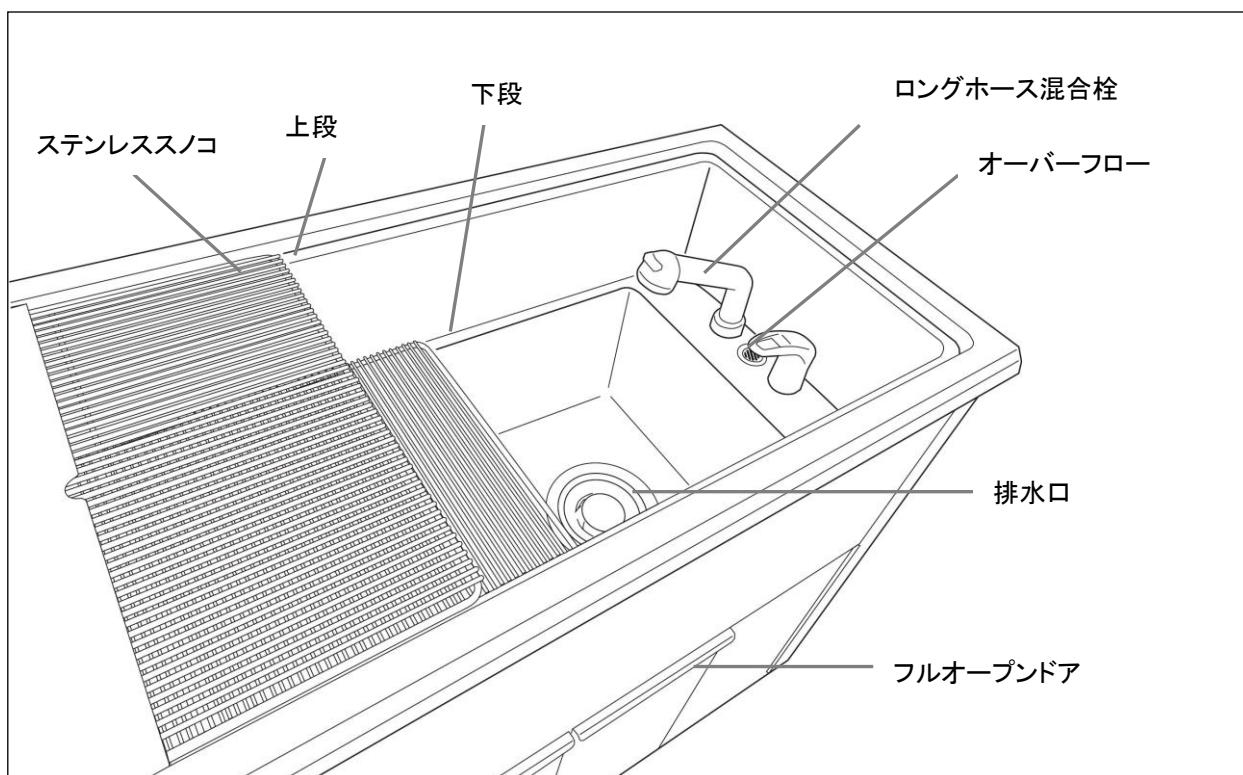


上段のステンレススノコは、向きを変えることで下段に置くことができます。

■各部詳細:下部

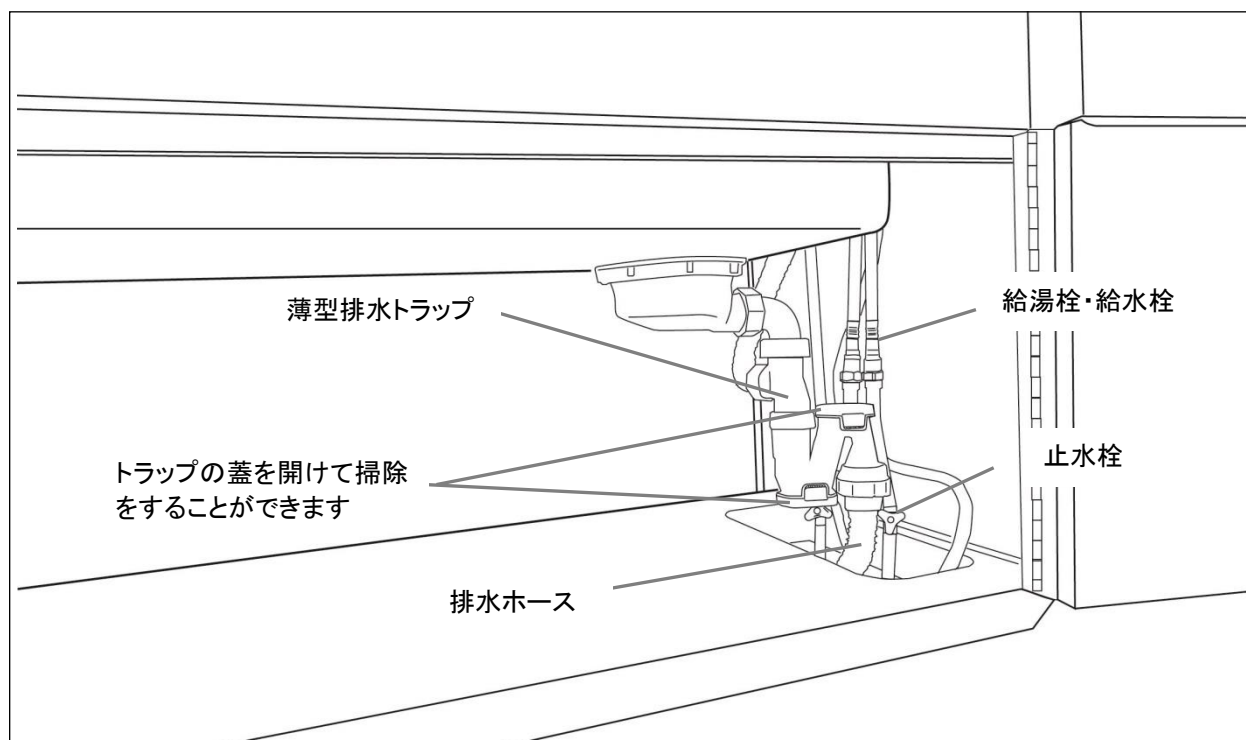

■配管図

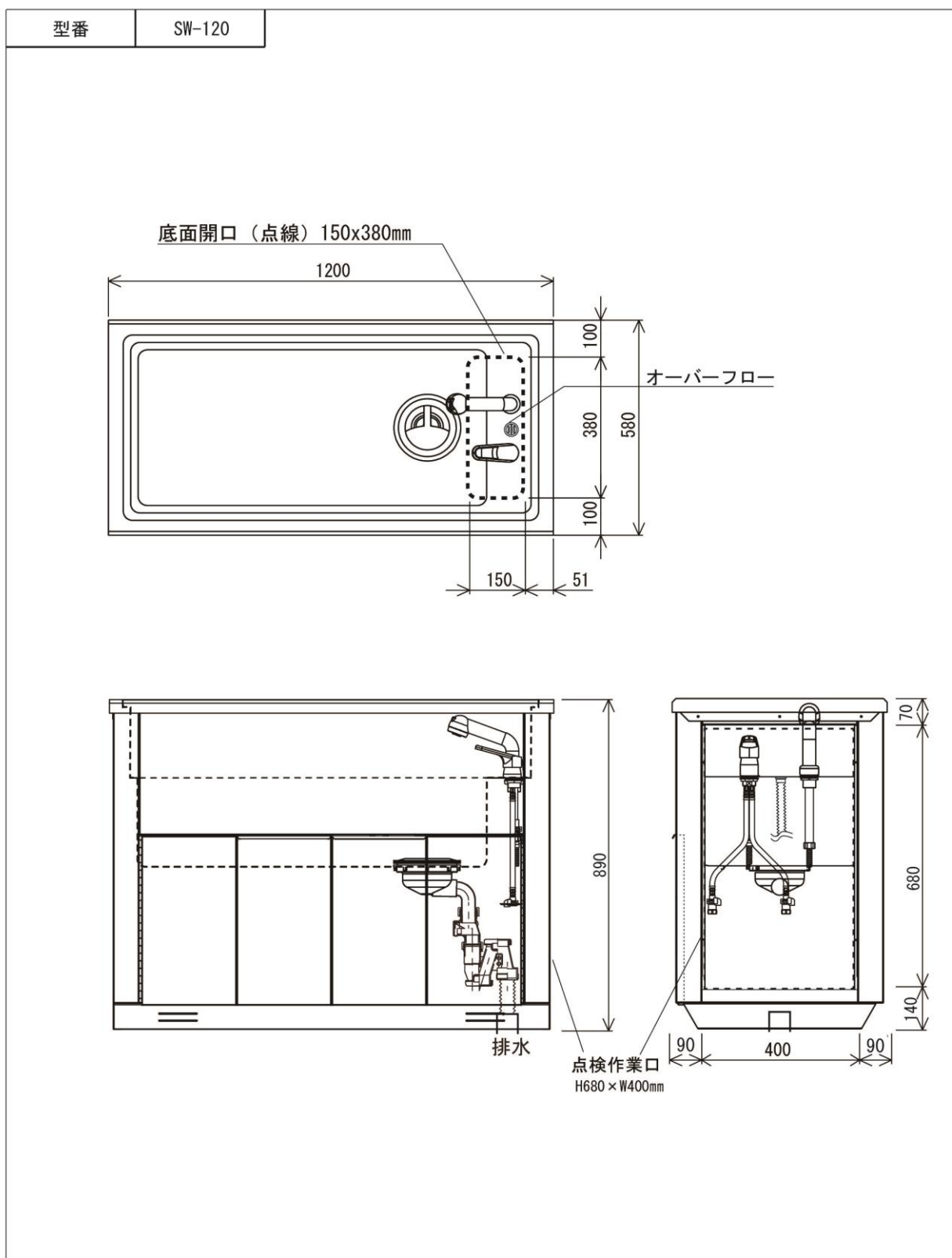

ロングホース混合栓について

■使用方法・メンテナンス

サージカルシンクは、「SANEI株式会社」のシングル
スプレー混合栓」を使用しています。


使用方法・メンテナンス等につきましては、同梱の
取扱説明書をご覧ください。

・ロングホース混合栓とは？

シャワーの水をシンクの端まで届くように、通常よりシャワ
ーホースを延長してあります

・ご注意

ベテリナリーシンクのロングホース混合栓は弊社独自の特別仕様のため、市販されておりま
せん。

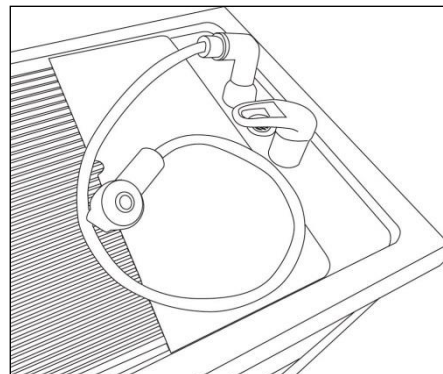

ダウンロードはこちらから➡


<https://www.sanei.ltd/products/k37110ejv-c-13/>



オプションの取付けと使用方法


■シンク用ゴムシート

- 1 ステンレススノコを上段に置いてください
- 2 ステンレススノコの上にゴムシートを敷いてください

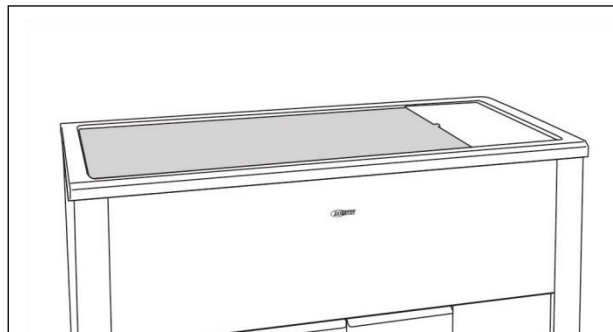


■サイドトレイ

- 1 シンクの縁に引っ掛けて、ローレットネジで固定してください

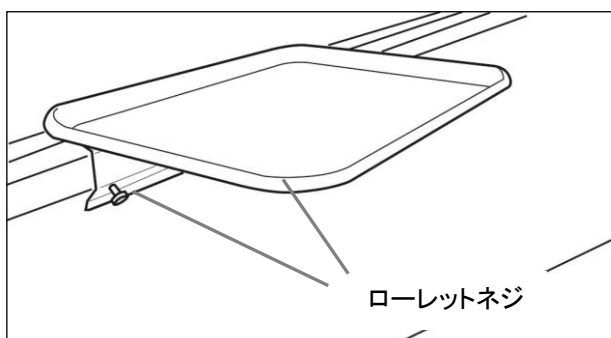


■スプレーハンガー

- 1 シンクの縁に引っ掛けて、ローレットネジで固定してください

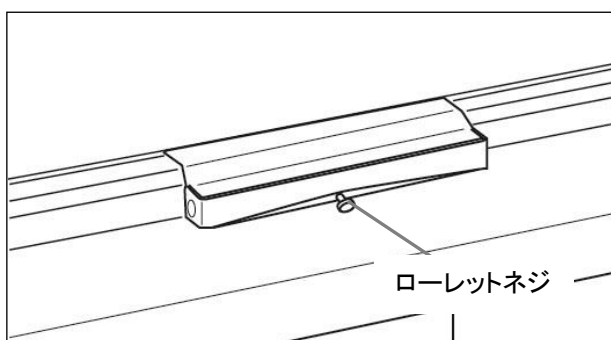

■クリップ付きチューブクランプ


- 1 シンクの縁に引っ掛けて、ローレットネジで固定してください

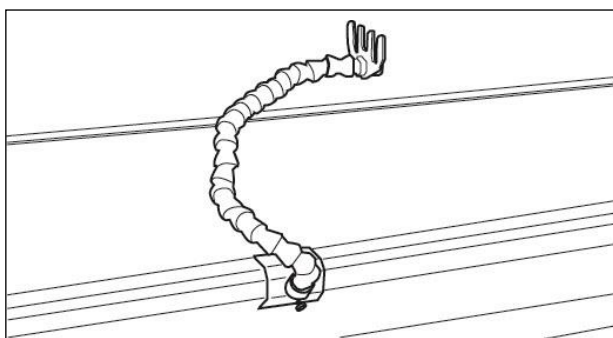

■3wayサイドプラス



取付け①

本体をシンク(桶)に引っ掛けてはめ込む
(※きつい場合があります)

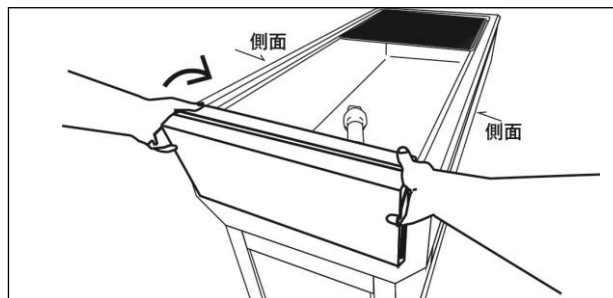


取付け②

ネジ(2ヶ所)を締める

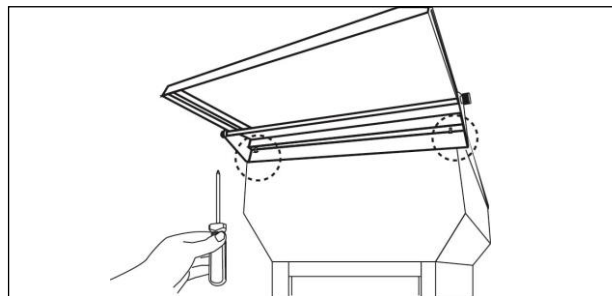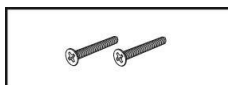


取付け③

側面から見て、ネジが奥まで締められている
か確認してください。

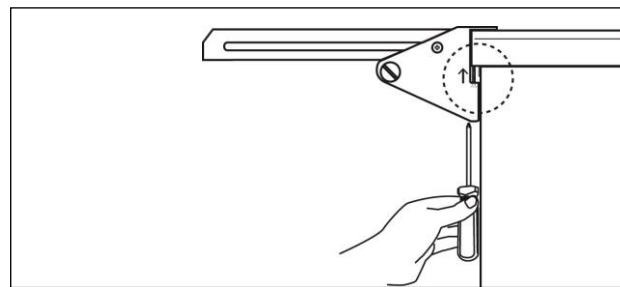


3 通り(3way)の使い方

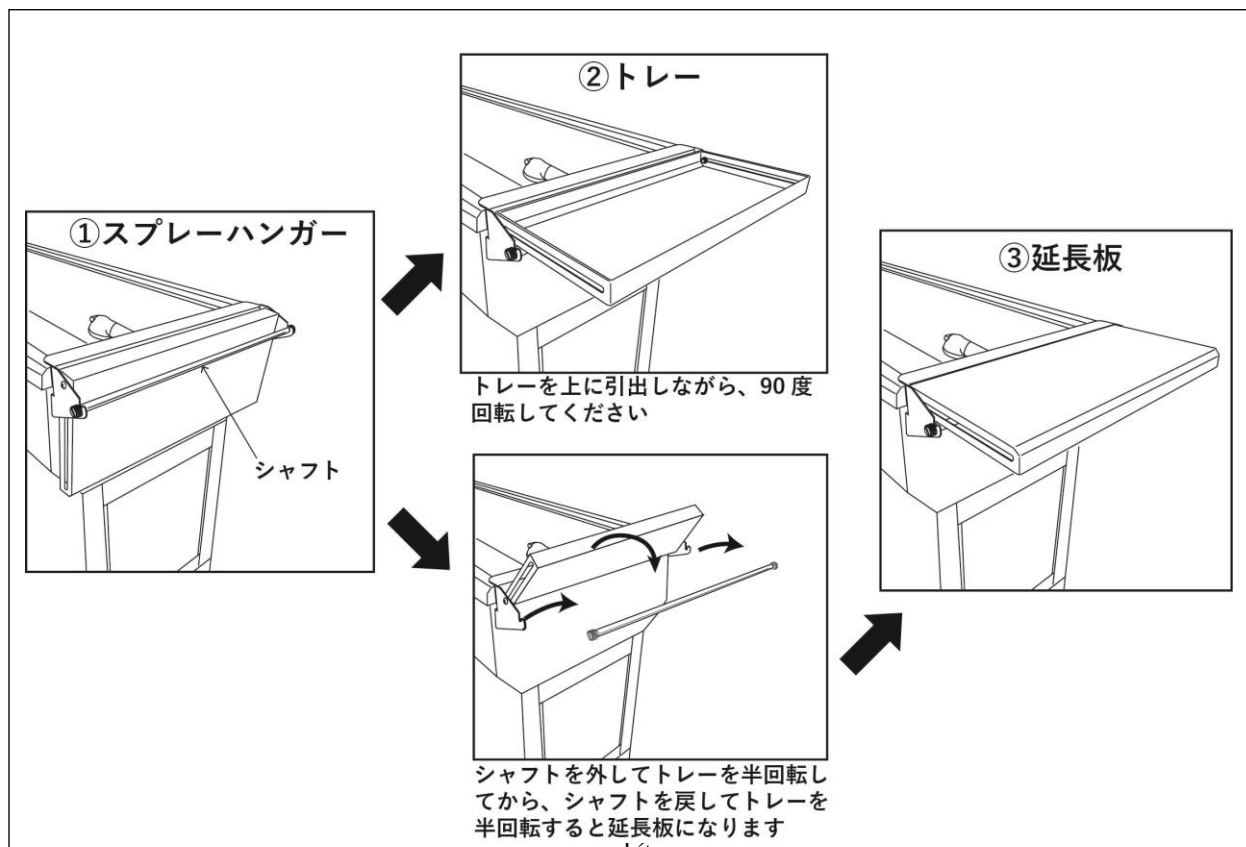


■予備蛇口

- 1 蛇口を回すと水がでます

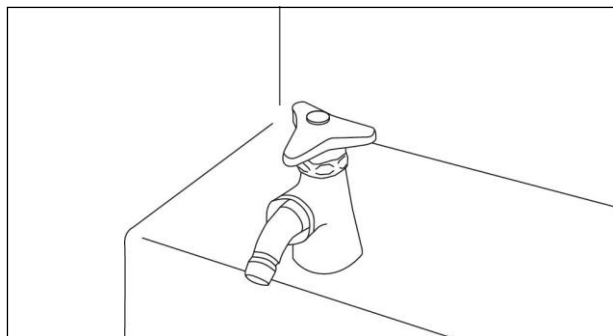


■ウォールマウントメカノトレー400 セット

- 1 ハンドルで固定することで、任意の位置で使用できます

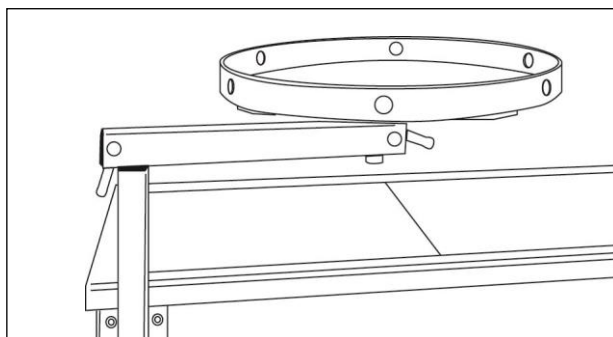


■両面フルオープンドア

- 1 両面から扉を開くことができます

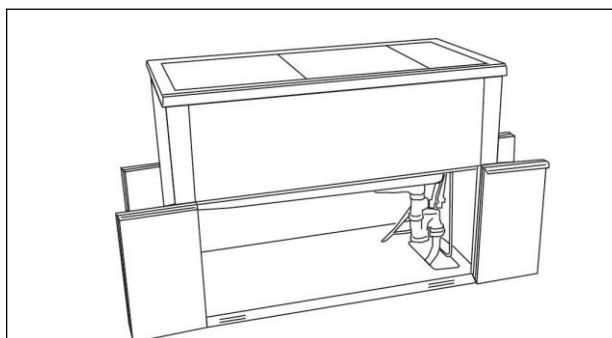

■シンク用クランプ式ロープホルダー、ロープ 2 個セット

- 1 天板(シンク)の縁に引っ掛けて、ローレットネジで固定してください

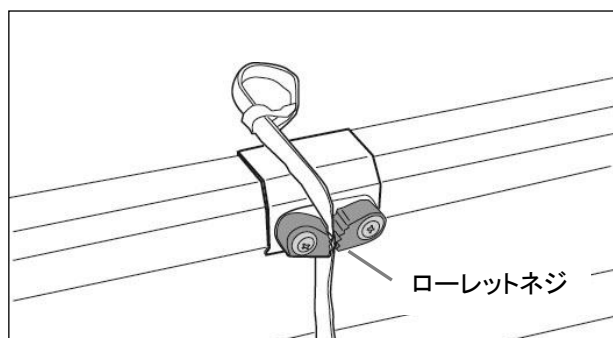


掃除・お手入れ

■本体の掃除について


- ・本体の汚れは、柔らかい布で水拭きをしてください。
- ・水拭きでも落ちない汚れは、少量の中性洗剤を含ませてください。
- ・汚れを落とした後は、乾いた布で水分を拭き取ってください。

【ご注意】
塩素系薬液・酸類・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 金属部分・ゴム類・塗装などの腐食・劣化の原因になります

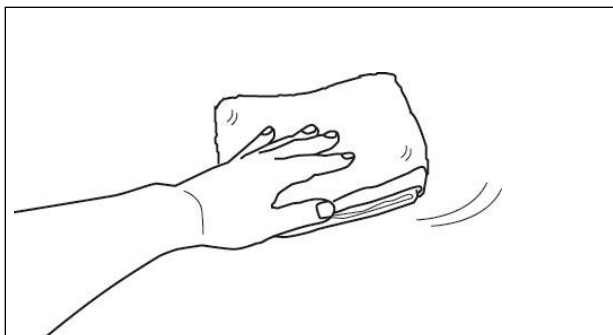

■排水トラップの清掃について

- ・排水トラップの蓋は、コインなどをいれて開けることができます。
- ・汚水が垂れてきますのでご注意ください

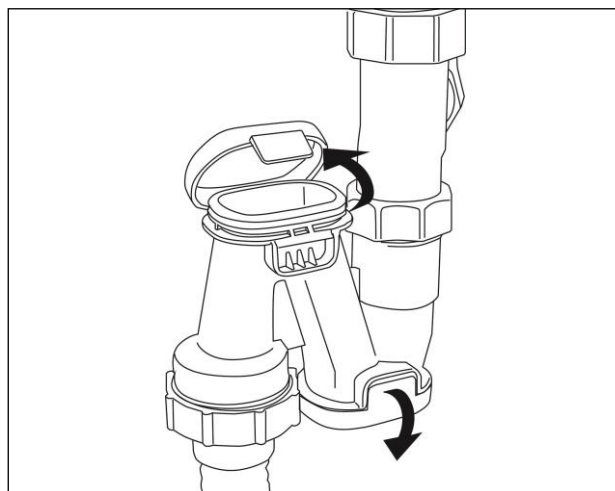

メンテナンス・不具合について

■混合栓の不具合「水漏れ・温度調節など」

【ステップ①】

混合栓の取扱説明書「メンテナンス編」
をご覧ください。



不具合が解決しない場合



弊社では、混合栓に関する修理はして
おりません。【ステップ②】の A と B を
選択してください。

ダウンロードはこちらから ➡
<https://www.sanei.ltd/products/k37110ejv-c-13/>



【ステップ②】

A: お客様から直接、水道業者に修理をご依頼ください。

➡ 水漏れなど緊急の場合が想定されますので、A を推奨しております


B: 弊社から水道業者を手配しますので、弊社までご連絡ください。

■混合栓の交換が必要になった場合のご注意

ロングホース混合栓は、弊社独自の特別仕様のため市販されて
おりません。

市販品のシャワーホースは短いため、シンクの端まで届きま
せん。

お取替えの際に、ロングホース混合栓をご要望の場合は弊社
までご相談ください。

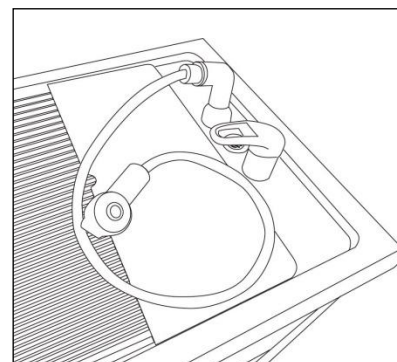

メーカー：SANEI 株式会社
シングルスプレー混合栓(洗髪用)

■シンクの不具合について

症状	考えられる原因	対処法
フルオープンドアが閉まらない	扉や丁番が変形した可能性があります。	弊社までご連絡ください。 (SC-120 は除く)
	マグネットが破損した可能性があります。	
オプションが取り付けられない	破損・変形した可能性があります。	弊社までご連絡ください。
	部品が紛失した可能性があります。	
シンクの水の流れが悪い。 水が詰まる。	排水トラップまたは排水ホースにゴミが詰まっている可能性があります。	排水トラップ、排水ホースの清掃をしてください。(19 ページをご覧ください)
排水口から臭いがする	防臭キャップが外れて可能性があります。	ビニールテープ等で防臭キャップをシーリングしてください。

お困りの点がございましたら、下記のお問い合わせ窓口からお願いします

■お問い合わせ窓口

弊社のホームページの「お問い合わせフォーム」からお願いします

<https://t-menix.com>



株式会社 東京メニックス

TEL 04-2923-8841

FAX 04-2923-8864

E-MAIL info@t-menix.com

受付時間:午前9時～午後5時半まで 土日・祝日は休み