

中性




高発泡型

酵素洗浄剤

トップザイム® F-400

TopZyme® F-400

タンパク質及び脂質汚れに対して高い洗浄力を発揮する中性の高発泡型酵素洗浄剤です。

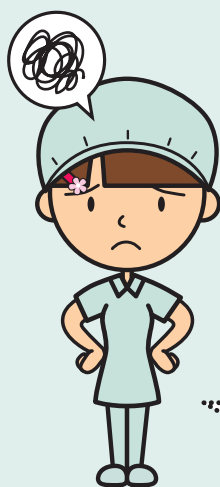

洗浄後に
脂質汚れが
残る!

泡立ちが
物足りない!

中性でも
高い洗浄力が
ほしい!!



高い洗浄力と
高発泡型の
トップザイム®
F-400に
しよう!



製品特長

○中性で高い洗浄力を発揮

タンパク質汚れだけではなく、
脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。

○低温でも優れた洗浄力

優れた洗浄成分を配合し、低温での洗浄力を高めています。

○豊かな泡立ちが持続

高発泡性の界面活性剤を配合しています。

○優れた腐食防止効果

ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした
医療器具に使用できます。



トップザイム® F-400

用途	医療器具の洗浄
液性	中性〔pH6.8(原液)・pH7.8(1.0%)〕
製品仕様	1L×6(6.6kg) 2L×6(13.2kg)
主成分	界面活性剤
	タンパク質分解酵素
	金属腐食防止剤
	酵素安定化剤

1L



ポンプ型減容ボトル
(約3.8mL/プッシュ)

2L



減容ボトル

使用方法	推奨濃度	使用可能濃度	推奨温度
用手・浸漬	1.0% (10Lの水に100mL)	0.3~1.0% (10Lの水に30~100mL)	40℃
超音波洗浄装置	0.5%	0.3~1.0%	45℃

※超音波洗浄装置で使用する場合、泡立ちが発生することがありますので、あらかじめ試験をしてから使用してください。

洗浄力評価

被洗浄物・主成分	① TOSI:牛血液(タンパク質)
	② ISO 15883-5:2021 Annex A Edinburgh soil:卵黄(脂質・タンパク質)、馬血液(タンパク質)、ムチン(糖タンパク質)
試験方法	被洗浄物を1%濃度の希釈液に一定時間浸漬後、アミドブラック染色液で処理し、そのソイル除去状態から洗浄力を評価した。

試験結果

洗浄剤	TOSI		Edinburgh soil	
	40℃・10分	20℃・20分	40℃・25分	20℃・65分
トップザイム® F-400				
他社品A				
他社品B				
他社品C				
他社品D				
未処理				

トップザイム® F-400は
優れた洗浄力を発揮する
ことが認められた。

