



持針器の先端形状について

ピンセット、鉗子、持針器の先端形状について、T/C タングステンカーバイトチップ及び DDJ の詳細

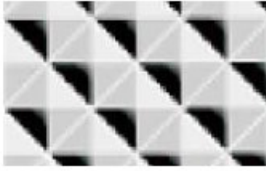


(1) T/C 0.5mm チップ付とは (#2500)

Normal profile (ノーマル形状) で、T/C スタンダードタイプの持針器や T/C スタンダードピンセットに使用しています。タングステンカーバイトの鋸歯状が1平方センチあたり 400 個程のピラミッド状の山が有るという意味です。縫合針との相性としては、通常は 3-0 ~ 4-0 以上の針に使用されています。

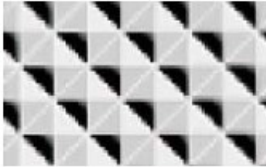


(2) T/C 0.4mm チップ付とは (#4000)

Mini profile (ミニ形状) で、T/C デリケートの持針器や T/C スデリケートピンセットに使用しています。タングステンカーバイトの鋸歯状が1平方センチあたり 650 ~ 700 個のピラミッド状の山が有るという意味です。縫合針との相性としては、通常は 3-0 ~ 5-0 の針に使用されています。

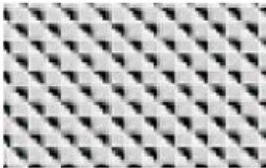

(3) T/C 0.3mm チップ付とは (#7000)

Micro profile (マイクロ形状) で、T/C ライダータイプの持針器や T/C 血管ピンセットに使用しています。タングステンカーバイトの鋸歯状が1平方センチあたり 1000 個程のピラミッド状の山が有るという意味です。縫合針との相性としては、通常は 5-0 ~ 7-0 の針に使用されています。

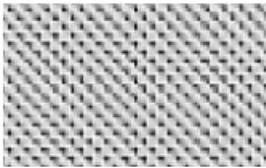

(4) T/C 0.2mm チップ付とは (#14400)

Super Micro profile (マイクロ形状) で、形成外科・美容外科・血管吻合ピンセット等に使用されています。タングステンカーバイトの鋸歯状が1平方センチあたり 2000 個弱のピラミッド状の山が有るという意味です。縫合針との相性としては、通常は 7-0 ~ 8-0 の針に使用されています。



(5) DDJ ダイヤモンドダストジョーとは

Super Micro profile (マイクロ形状) で、T/C 0.2mm Tip より細かく、眼科・形成外科・血管外科・脳外科等のマイクロ縫合に使用されています。DDJ はダイヤモンドダストを散りばめた肌理の細かい表面加工でマイクロ系手術に適します。縫合針との相性としては、通常 8-0 ~ 10-0 の針に使用されています。



(6) T/C スムース (フラット) チップとは

スムース形状、マイクロサージェリー仕様で眼科・美容外科・血管外科・脳外科等に使用されています。縫合針との相性としては、通常は 9-0 ~ 11-0 の針に使用されています。

スタンダード

推奨している縫合針などなし。

