



ミラースタンド台 **組立式** の取扱説明書

此の度はこの商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
組立方法は下記の通りの順にてお願い致します。


A 組立図面

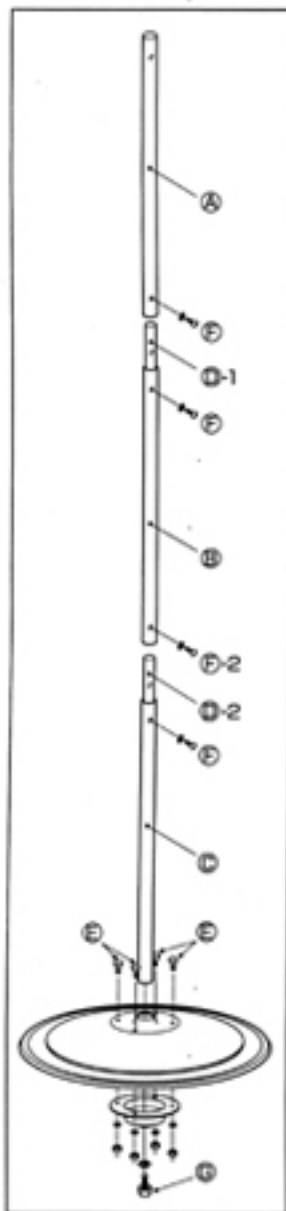

B 組立部品

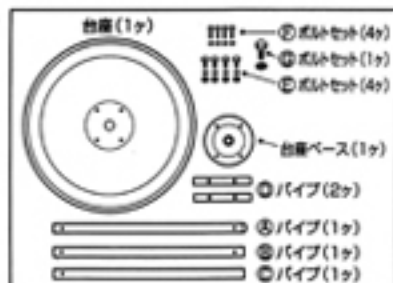

C ミラーの取付部品

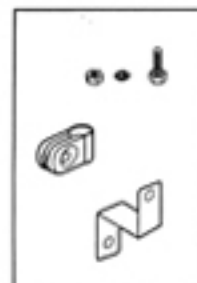

- 1) Aの図面の通りに、台座に①パイプを差し込み、裏側に台座ベースをあてて、②パイプを③ボルトで固定する。台座の4か所の穴と、台座ベースを合わせて、④ボルトで締めつける。後で⑤ボルトも締めつける。
- 2) ⑥パイプと⑦パイプの間に⑧-1をジョイントさせて⑨ボルトで固定する。
- 3) ⑩-2と⑪-2をつなぎ合わせ固定する。

完成図

ミラー(別売)を取付ける場合

- 4) Cミラー取付部品をB図の⑫穴にミラーを取付けて下さい。

D ミラー部組立図

