


貸与

介護保険
公益財団法人テクノエイド協会TAIS認定

特許申請中

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい[®]

製品仕様

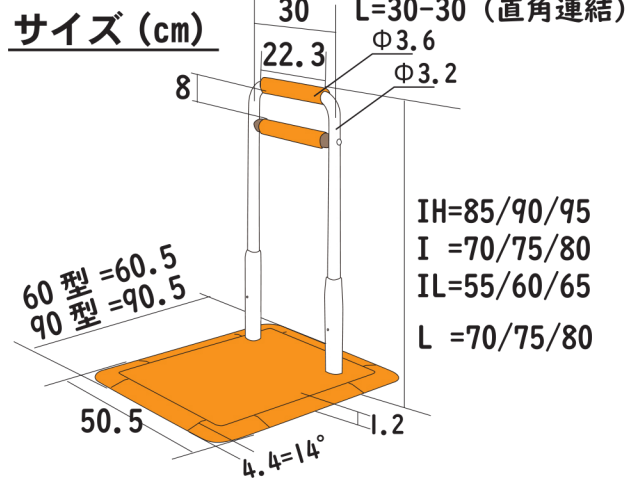

耐荷重 (共通) 100Kg


材質 (共通) 塩素系洗剤が使える素材

ステンレス (SUS304)	手すり芯材、支柱、ベースプレート 突っ張り棒本体・Cクリップピン 全ネジ類 ※支柱は粉体焼き付け塗装
合成ゴム	ベースプレート周辺ゴムスロープ 滑り止めゴムマット、巻き付けゴム
樹脂	手すり被服 (PVC) 手すり接合部・面ファスナー (Ny) 突っ張り棒Cクリップ (PP)

重量 (Kg)

60-I	13.8	90-I	18.5
60-IH	14.2	90-IH	18.9
60-IL	13.4	90-IL	18.1
60-L	16.3	90-L	21.0
60-IT	14.3	90-IT	19.0
60-IHT	14.7	90-IHT	19.4
60-ILT	13.9	90-ILT	18.6
60-LT	16.8	90-LT	21.5

品番の意味

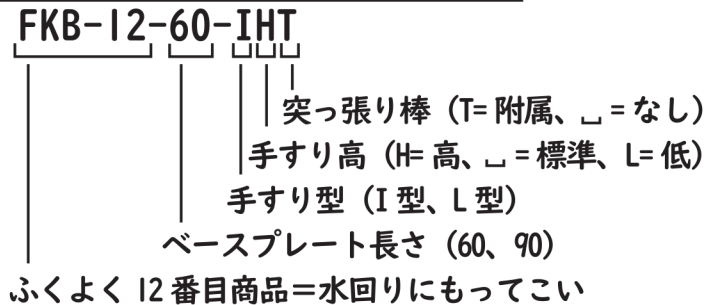


※製品の仕様や材質、外観、価格など予告なく変更する場合があります

TAIS/ 価格

品番	TAIS	価格
60-I	01255-000013	
60-IH	01255-000022	
60-IL	01255-000024	
60-L	01255-000015	
60-IT	01255-000017	
60-IHT	01255-000026	
60-ILT	01255-000028	
60-LT	01255-000019	

品番	TAIS	価格
90-I	01255-000014	
90-IH	01255-000023	
90-IL	01255-000025	
90-L	01255-000016	
90-IT	01255-000018	
90-IHT	01255-000027	
90-ILT	01255-000029	
90-LT	01255-000020	

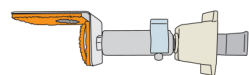

ふくよく 縁でも壁でも突っ張り棒 (1本)
1本あたり

ウェルファン便利帖 申込番号
514035 水回りにもってこい
514087 水回りにもってこい突っ張り棒付き
514081 縁でも壁でも突っ張り棒

代理店 株式会社 ウェルファン
Tel 050-2018-0956 Fax 072-834-5731
製造元 有限会社 サテライト
Tel 0797-24-9015 Fax 0797-24-9012

お問い合わせ

ウェルファン便利帖掲載品 申込番号 514035, 514087, 514081

ふくよく 床置き式手すり 公益財団法人
テクノエイド協会TAIS登録

水回りにもってこい[®]

介護保険
貸与



プラネットアワード
2020
特別賞受賞

高さ 55 ~ 95cm 対応

高ッ

低ッ




- 錆びにくい
キッチンシンクと同じステンレス
- 滑りにくい
「ダイヤタッチ (シンエイテクノ社製)」装備
- 水はけ良好
水抜きトンネル構造
- 分解しないで丸洗い
「カビキラー」使えます



高ッ 使用例

直置き浴槽横 段差の下側 高身長 腕を曲げ込む方

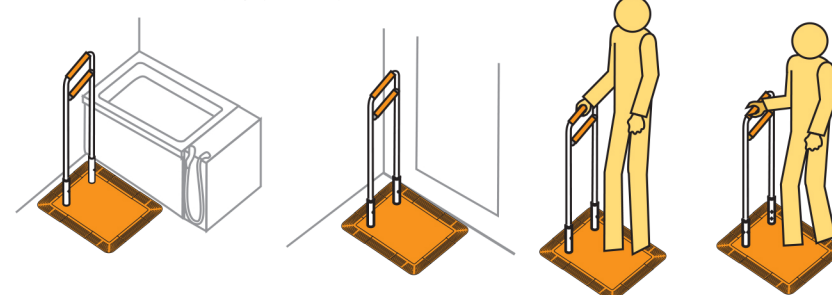

低ッ 使用例

深埋め浴槽横 円背の方



低身長の方
段差の上側

洗い場、脱衣所、キッチン、洗面所、トイレ、ベッドサイド、椅子、玄関など


有限会社 サテライト

ふくよく 床置き式手すり水回りにもってこい[®]

介護保険

公益財団法人テクノエイド協会 T A I S 認定

貸与

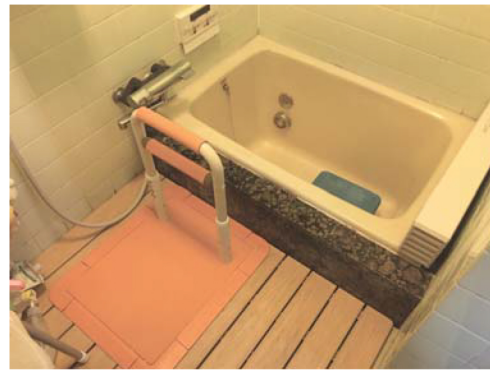


高さ 55cm 深埋め浴槽横 高さ 75cm 住宅改修不可浴室

高さ 95cm 直置き浴槽横 ※踏み台は付属していません


水回り適合

水回りに適した特徴

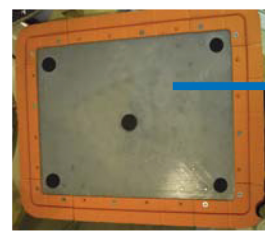


錆びにくい キッチンシンク同種防錆ステンレス SUS304

SUS304
※磁石がつかない
種別ステンレス

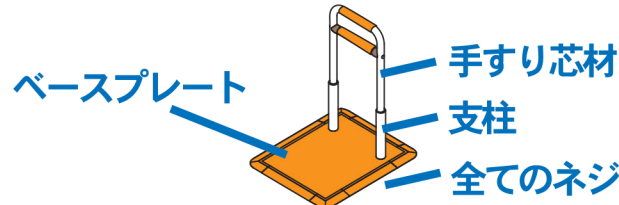

全ての金属
SUS304使用

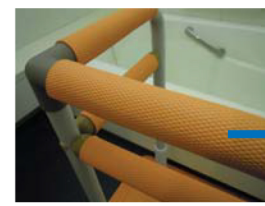

滑りにくい 定評シンエイテクノ社「ダイヤタッチ」ゴム

握り込まないでも滑りにくい

滑らないゴム
ダイヤタッチ

濡れた足でも滑りにくい


バリアフリー

全周囲
段差解消
ミニスロープ

幅広ゴムで
本体も
滑りにくい



水はけ良好 排水口の上に設置可能

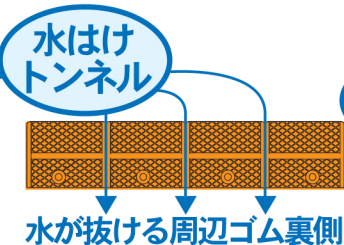

水はけ
トンネル

水が溜まらない
分割式

水が抜ける周辺ゴム裏側

水抜き孔
手すり部

水抜き孔
ベースプレート

利用者像

手すりを諦めていた方にも

賃貸部屋、壁がもろい・配管があるなどで手すりをつけられない
住宅改修の予算枠を使い切っている
浴室内導線が壁方向とは違う（例：片麻痺の方＝往路復路異なる）
脱衣所は洗濯機などがあり、手すり設置場所がない
進行性病状の方で、固定型手すりは陳腐化する
福浴 回転バスタブ座面など着座入浴で、より安定して使いたい
リウマチ・低握力などで手すりを握り込めない（把持部のゴムで安定）
ポータブルでこぼした排泄物臭を消したい（カビキラー等で洗える）
キッチンに椅子代わりのものがほしい（もたれられる、洗える）



お手入れ

洗い方まで考えた設計

分解しない、持ち上げないで、丸洗い



本体を傾げる→周辺ゴム
スロープが保持！
裏面・床面を楽に洗浄。




ベースプレート上ゴムを
上に持ち上げ、手すりに
掛けて乾燥できます。

※重量物ですので、十分に注意して洗浄ください。

カビキラー 使えます 原液 8 時間浸漬試験 硬度変化・色落ちなし

【確認済み洗剤一覧】

- | | | |
|---|--|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> カビキラー | <input checked="" type="checkbox"/> カビキラー除菌キッチン用 | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハイター | <input checked="" type="checkbox"/> キッチンハイター | |
| <input checked="" type="checkbox"/> クエン酸 | <input checked="" type="checkbox"/> 重曹せっけん | |
| <input checked="" type="checkbox"/> マイペット | <input checked="" type="checkbox"/> お風呂の洗剤 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> キッチン泡ハイター | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 強力カビハイター | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> カビ取り剤 | |

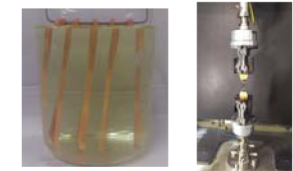


合格

兵庫県立工業技術センター JIS 試験

※洗剤の注意書きを遵守してください。※花王・SEKISUI・ジョンソンなど製造各社の登録商標

分割型の部品交換

支柱・手すり本体・ベースプレート
滑り止めゴム（手すり巻き付け・足元マット）
ベースプレート周辺のミニスロープ状ゴム
固定ネジ・緩み止めネジ・各種資材

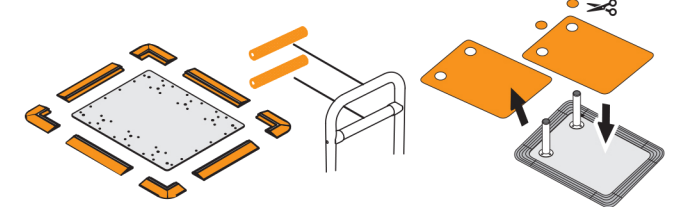

よくあるご質問

十分な耐久性 多場面

- Q1 「貸与？」** 厚生労働大臣の解釈通知で「床置き式手すりは居室内で使う」で、浴室を除くなどの記載はなし。公益財団法人テクノエイド協会ホームページ上でも貸与マーク（詳細説明に洗い場で使用と記載）。バスリフトは貸与品としての前例です。
- Q2 「浴槽内？」** 基本は避けてください。重量物である本体を出し入れする際に浴槽破損や介助者の腰痛発生などがあります。
- Q3 「温泉で？」** 保証はできかねます。硫黄他様々な成分や強酸性・強アルカリ性の湯などもあり、耐久試験の範囲を超える事例もあります。
- Q4 「乗らないで使うと？」** オプション「縁でも壁でも突っ張り棒」使用検討ください。弊社品に限らず床置き式手すりはベースプレートに乗って使用するのが基本となります。
- Q5 「水勾配？」** 付属の高さ微調整用ゴムで水平を保ってください。急な勾配では、すのこ等で床の水平を確保ください。
- Q6 「外では？」** ご使用いただけます。直射日光が当たる場所では、ゴムの劣化が早まると考えられますのでご注意ください。
- Q7 「耐久性は？」** JIS 規格過重試験合格（750N 繰り返し負荷 2 万回など）
紫外線室内 5 年分照射ゴム疲労試験合格
JIS 規格耐薬品性試験合格（洗剤漂白剤等 8 時間浸漬）
- Q8 「注意点は？」** 壁、洗面台、ベッドなどの家具と本品との間に挟まれないよう設置に十分な間隔をあけるか密着ください。その他含め、詳細はマニュアルをご覧ください。